Kurzanleitung

Lightwriter SL50

Art.nr 1740300





WILLKOMMEN BEI IHREM LIGHTWRITER



Der Lightwriter SL50 ist ein schnelles und einfaches Kommunikationsmittel.

Ihr Lightwriter wird mit einer Schutzfolie auf der Tastatur geliefert. Diese bitte vor Gebrauch entfernen.



LIEFERUMFANG

Spare keys

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang beim Öffnen der Verpackung auf Vollständigkeit:



Lightwriter SL50

AKKU LADEN

Verbinden Sie den Lightwriter bitte vor der Verwendung mit dem Ladegerät. Sie können Ihren Lightwriter auch während des Ladevorgangs benutzen.

Das erste Laden des Lightwriters nach der Neulieferung dauert mindestens 12 Std. Später sollte der Lightwriter regelmäßig ca. 3-4 Std. geladen werden, um für einen ganzen Tag einsatzfähig zu sein. Dieses geschieht am besten über Nacht



IHREN LIGHTWRITER EINSCHALTEN

Drücken Sie zum Einschalten Ihres Lightwriter die **Ein/Aus-Taste**



Der erste Start Ihres Lightwriter dauert einen kurzen Moment.

Wenn Sie Ihren Lightwriter einige Zeit nicht benutzen oder keine Tasten drücken, schalten sich die Bildschirme aus und er wechselt in den **Standby-Modus.** Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu aktivieren und dort weiterzumachen, wo Sie aufgehört haben.

Wenn Sie Ihren Lightwriter ausschalten möchten, drücken Sie Umschalten




und dann Ein/Aus



MIT DEM SPRECHEN BEGINNEN

Wenn Sie Ihren Lightwriter einschalten, erscheint als Erstes die Ansicht"Sprechen".

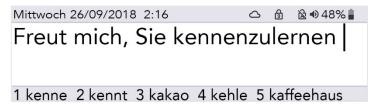


Mit der Tastatur des Lightwriter können weitestgehend genauso Wörter und Wortgruppen getippt werden wie mit einer handelsüblichen Computertastatur. Alles was Sie schreiben erscheint auf dem Bildschirm vor Ihnen.

Wenn Sie **Eingabe** drücken, spricht der Lightwriter die eingegebenen Wörter laut aus und zeigt sie auf dem **Partnerbildschirm** an.

Beim Tippen erscheint unten auf dem Hauptbildschirm eine Zeile mit Wortvorschlägen. Drücken Sie die entsprechende **Zifferntaste**, um den Wortvorschlag zu verwenden. Dafür muss die **Ziffernumschaltung** deaktiviert sein.

Mit **Umschalten** 6 können Sie die roten Zeichen auf den Tasten eingeben.

TASTENFUNKTIONEN

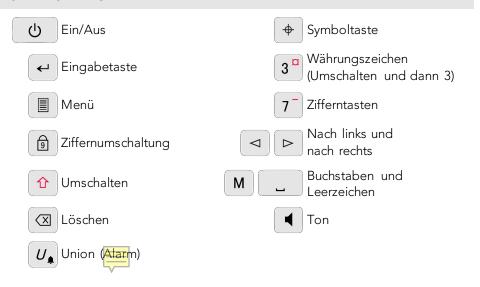


IHREN LIGHTWRITER EINRICHTEN

Mit wenigen einfachen Einstellungen können Sie Ihren Lightwriter gemäß Ihren persönlichen Vorlieben konfigurieren.

DIE MENÜS VERWENDEN

Drücken Sie **Menü** um auf die täglichen Einstellungen zuzugreifen.

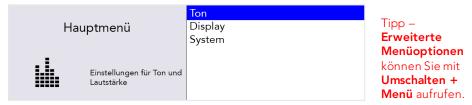

Scrollen Sie mit den Pfeiltasten **Nach links** und **Nach rechts** durch die Optionen. In jedem Menü können Sie mit **Eingabe** eine Auswahl treffen und mit **Ein/Aus** abbrechen.

GRUNDEINSTELLUNGEN SPEICHERN

Stimme – Navigieren Sie zu **Erweitertes Anwendermenü** > **Stimme**

Sprachlautstärke – Navigieren Sie zu **Menü** > **Ton** > **Mixer** > **Sprachlautstärke**. Wählen Sie eine Lautstärkestufe von 1 bis 10 und bestätigen Sie mit **Eingabe**.

Tastendruck-Lautstärke – Navigieren Sie zu **Menü** > **Ton** > **Mixer** > **Tastendruck**. Wählen Sie eine Lautstärkestufe von 1 bis 10 und bestätigen Sie mit **Eingabe**.

Datum und Uhrzeit – Datum und Uhrzeit sollten automatisch für Sie eingestellt werden. Falls Sie dennoch eine Änderung vornehmen müssen, navigieren Sie zu **Erweitertes Anwendermenü** > **Datum und Uhrzeit**.

Scan-Geschwindigkeit – Navigieren Sie zu **Erweitertes Anwendermenü > Scannen** > **Scan-Geschwindigkeit**. Hier können Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der die Tasten gescannt werden.

Scan-Ton – Hier können Sie den Ton beim Scannen der Tasten einstellen oder auch deaktivieren. **Erweitertes Anwendermenü** > **Scannen** > **Scan-Ton**.

Tipp – Nutzen Sie zum Einstellen der **Gesamtlautstärke** die Tastenkombination



DIE SOFTWARE AKTUALISIEREN

Es ist wichtig, dass Sie die Software Ihres Lightwriter auf dem neuesten Stand halten, damit er sicher und problemlos funktioniert. Updates können Fehler beheben, die Sicherheit optimieren und Funktionen verbessern.

Sie können die Software über eine Internetverbindung aktualisieren. Verbinden Sie Ihren Lightwriter einfach per Netzwerk-Kabel mit einem Router.



Ein Wolkensymbol zeigt an, dass Sie neue Updates herunterladen. Sobald der Download abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, den Lightwriter neu zu starten. Danach ist Ihr Update abgeschlossen.

(NUR SCANNEN) SCHALTER ANSCHLIEßEN

Verbinden Sie Ihre zwei Schalter mit Anschluss 1 und 2.



Tipp – Sie können auch mit einem Schalter scannen oder eine beliebige Taste auf der Tastatur benutzen (detaillierte Informationen in der Gebrauchsanweisung).

Drücken Sie den **Schalter an Anschluss 2**, um die hervorgehobenen Zeilen oder Tasten durchzugehen. Benutzen Sie den **Schalter an Anschluss 1**, um die hervorgehobene Zeile auszuwählen, und drücken Sie ihn erneut, um die hervorgehobene Taste zu wählen.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur regulären Eingabe per Tastatur zurückzukehren.

TASTENKOMBINATIONEN

ALIC	
AUS	Drücken Sie Umschalten 👉 und dann Ein/Aus 🔱
EIN	Drücken Sie Ein/Aus U
STANDBY (Ruhemodus)	Halten Sie die Taste Ein/Aus 2 Sekunden lang gedrückt. Sie können den Lightwriter mit einer beliebigen Taste wieder aktivieren.
SELECT MENU ITEM	Press Enter 🗸
ANSICHT VERLASSEN	Drücken Sie Ein/Aus U
EINGABE ABBRECHEN	Wenn Sie tippen, können Sie mit der Ein/Aus -Taste Ulie löschen gesamte Textzeile.
LAUTSTÄRKE	Wenn Sie Ton gedrückt halten, können Sie mit den
	Pfeiltasten nach links ✓ und nach rechts ▷ die Lautstärke
	anpassen.
	Mittwoch 26/09/20 Lautstärkeregler
	•
	5
STUMM SCHALTEN	Mit einem Druck auf Ton können Sie Ihren Lightwriter stumm
	schalten (auch während des Sprechens). Drücken Sie Ton
	erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
NEUSTART ERZWINGEN	Falls Sie einen Neustart erzwingen müssen, halten Sie Ein/Aus 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Bildschirm ausund wieder einschaltet.
ALARM*	Press and hold Union $U_{lacktrleam}$ until the alarm sounds.

^{*} Must be activated in Settings.

Mehr über Ihren Lightwriter erfahren Sie in der Gebrauchsanweisung.

+46859469400 | info@abilia.com | www.abilia.com