


Snap Core First Lernkarten

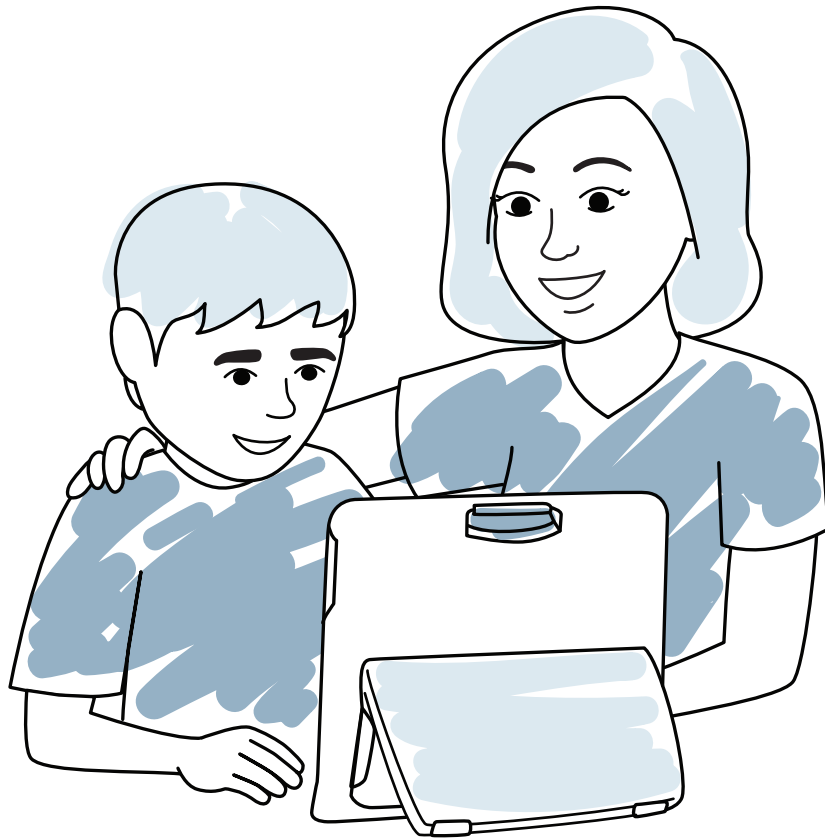

Dies sind Ihre Lernkarten für Snap Core First. Sie helfen Ihnen bei der Integration Ihres Geräts in den Alltag und zeigen Ihnen, wie Sie einfache Änderungen vornehmen können.


Inhalt

- 1 QR-Codes & Häufig gestellte Fragen
- 2 Instandhaltung des Geräts & Einrichtung von Snap Core First
- 3 Glossar für Snap Core First
- 4 Unterstützte Kommunikation verwenden
- 5 Im Alltag einsetzen & Wichtige Informationen
- 6 Aktivitäten: Ein Buch lesen & Ein Spiel spielen
- 7 Aktivitäten: Beim Sport zusehen & Ins Restaurant gehen
- 8 Suchfeld & Rastergrößen ändern
- 9 Ein Feld bearbeiten & Verhaltensunterstützungen bearbeiten
- 10 Seiten mit anderen teilen und speichern
- 11 Pathways for Core First & Core First Learning
- 12 myTobiiDynamox.com & weiterer Support



QR-Codes

Über die QR-Codes erhalten Sie schnell Zugriff auf Informationen (z. B. Videos), ohne dass Sie Internetadressen eingeben müssen. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um die verknüpften Informationen anzuzeigen.

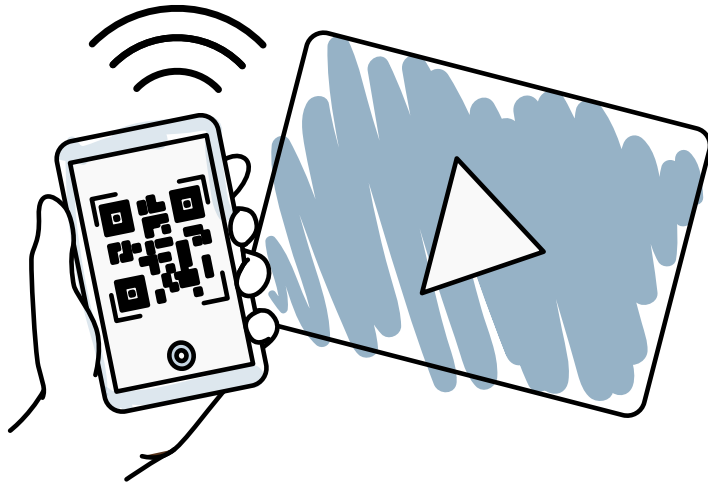

Für Android

Laden Sie einfach eine kostenlose App zum Lesen von QR-Codes aus dem Google Play Store herunter. Unter „QR Scanner“ oder „QR Reader“ werden Ihnen verschiedene Wahlmöglichkeiten angeboten.

Für Windows

Laden Sie einfach eine kostenlose App zum Lesen von QR-Codes aus dem Windows Store herunter. Unter „QR Scanner“ oder „QR Reader“ werden Ihnen verschiedene Wahlmöglichkeiten angeboten.

Für iOS

Wenn Sie iOS 11 haben, öffnen Sie die Kamera Ihres Telefons und richten Sie sie auf den QR-Code. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die nun erscheint.

Wenn Sie nicht auf iOS 11 aktualisiert haben, laden Sie eine App zum Scannen von QR-Codes herunter. Es gibt im App Store viele kostenlose Apps.



tobii dynavox

1

Häufig gestellte Fragen

Kann Unterstützte Kommunikation (UK) jemanden vom Sprechen abhalten?

Nein. Nach zehn Jahren Forschung können wir feststellen, dass UK die Verwendung oder Entwicklung natürlicher Sprache nicht beeinträchtigt.

Ist UK nützlich für Personen, die schon gewisse Sprachkompetenzen haben?

Ja. UK hilft Personen mit sprachlichen Beeinträchtigungen, in Gesprächen mit bekannten und auch unbekanntem Kommunikationspartnern ihr volles Potenzial zu erreichen.

Gibt es eine Lösung, wenn jemand aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, ein Kommunikationsgerät zu berühren?

Ja. Auf einem UK-Gerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Auswahl zu treffen. Sie werden oft auch Auswahlmethoden genannt. Personen, die nicht in der Lage sind, das Kommunikationsgerät zu berühren, können Eye Gaze, Kopfzeiger, Maus oder Scanning als Hauptauswahlmethode verwenden.

Kann man zu jung oder zu stark beeinträchtigt sein, um UK zu nutzen?

Nein. Man ist niemals zu jung oder zu stark beeinträchtigt, um UK zu nutzen.

UK wirkt sich positiv auf Sprachentwicklung, Wahrnehmung, Lese- und Schreibfähigkeiten und die Teilhabe an sozialem Umfeld, Bildungs- und Spielangeboten aus.

Wenn Sie diesen Code scannen, werden weitere häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten angezeigt.



tobii dynavox

1

Instandhaltung des Geräts

Die Verarbeitung unserer Geräte unterscheidet sich von gewöhnlichen Laptops oder Tablets.

Mit ihrer schnellen und stoßsicheren SSD Festplatte, der IP54 Schutzklasse für Feuchtigkeits- und Staubschutz und einem Bildschirm aus bruchsickelem Gorilla Glas.

Sie können das Gerät ohne Bedenken überallhin mitnehmen und darauf vertrauen, dass es der Beanspruchung gewachsen ist.

Sie möchten das Gerät bei Nieselregen benutzen?

Kein Problem! Es ist gegen Spritzwasser geschützt. Achten Sie einfach darauf, dass unterwegs die Anschlüsse des Geräts abgedeckt sind, dann bleibt Ihnen genug Zeit, sich einen trockenen Platz zu suchen.

Sie möchten das Gerät beim Essen benutzen?

Kein Problem. Falls nötig, können Sie den Bildschirm einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.



Es ist wichtig und ganz einfach, das Gerät instandzuhalten.

Instandhaltung der Kabel:

- Stellen Sie das Gerät beim Aufladen in der Nähe der Steckdose auf, damit niemand aus Versehen an den Kabeln oder Steckern zieht.
- Das Netzkabel darf nicht eng aufgerollt, verdreht oder um etwas herumgewickelt werden.

Reinigung:

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Sie können hierfür antibakterielle Reinigungstücher verwenden.
- Wischen Sie nur die Außenflächen ab und lassen Sie das Produkt von selber trocknen.





Verwenden Sie keine Sprays, die in das Gerät eindringen könnten.



Einrichtung von Snap Core First

- 1 Öffnen Sie Snap Core First.
- 2 Wenn Sie Snap Core First zum ersten Mal öffnen, wird der Benutzereinstellungsassistent gestartet.
- 3 Melden Sie sich (jetzt oder später) bei myTobiiDynamox an.
- 4 Geben Sie den Namen der Person ein, die Snap Core First verwenden wird.
- 5 Wählen Sie eine Stimme aus.
- 6 Wählen Sie eine Rastergröße aus, die möglichst viele Felder für das Vokabular enthält und die der Benutzer noch gut verwenden kann.

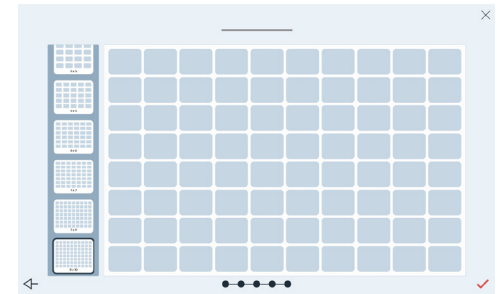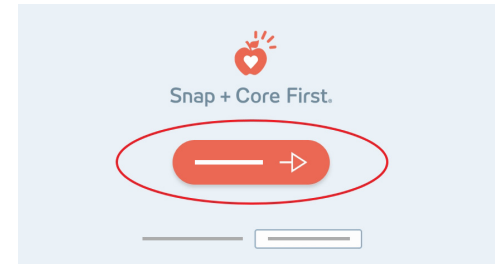

Hilfreiche Tipps für die Auswahl einer Rastergröße

Die kleinsten Raster (1x1 bis 2x3) sind nicht zur langfristigen Verwendung gedacht. Es handelt sich um Übungsseiten für den Anfang. Der Benutzer kann hierbei nicht von einer Seite zur anderen navigieren.


Der Benutzer sollte schnell zu einer Rastergröße (mindestens 3x3) wechseln, die Navigation ermöglicht. Sie können dabei jederzeit unterstützend eingreifen. Dadurch nehmen Sie für den Benutzer Ihre Vorbildfunktion bei der Auswahl der richtigen Navigations- und Vokabularfelder wahr (Modelling).



Glossar für Snap Core First

Kernvokabular

Eine kleine Gruppe von häufig verwendeten Wörtern, die miteinander kombiniert und zur Erstellung eindeutiger Mitteilungen verwendet werden können.

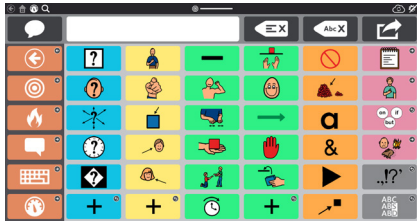

Themen

Im Voraus gespeicherte Mitteilungen, die nach kommunikativer Absicht geordnet sind und sich jeweils auf eine bestimmte Situation oder Umgebung beziehen.




Wortlisten und Themen Wörter



Nach Kategorien geordnete Wortlisten (z. B. Essen, Tiere usw.). Themen Wörter sind nach Kategorien geordnet und auf ein bestimmtes Thema bezogen.


Kommentare

Kleine Wörter und Sätze, die in alltäglichen Unterhaltungen verwendet werden, um das Gespräch fortzusetzen, Aufmerksamkeit zu erhalten oder Kommentare zu machen.

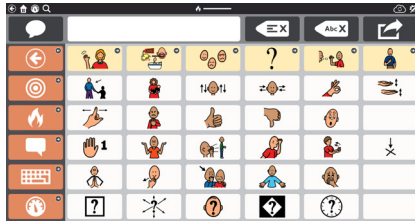

Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste ist der Ort, an dem sich alle Kommunikationswerkzeuge befinden. Von hier aus können Sie auf Werkzeuge wie Kernvokabular, Themen und Kommentare zugreifen.

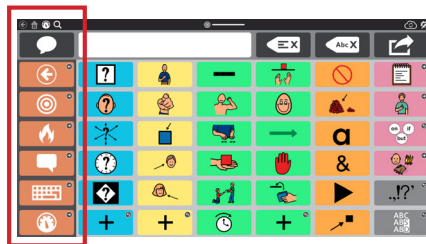


ABC



Nach ihren Anfangsbuchstaben geordnete Wörter aus dem Kern- und Randvokabular können hier miteinander kombiniert und verwendet werden.


Glossar für Snap Core First

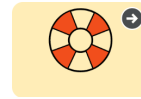

Verhaltensunterstützungen (in jedem Thema zu finden)


Zuerst ... dann

Macht dem/der Benutzer/in deutlich, was zuerst passiert und was dann.

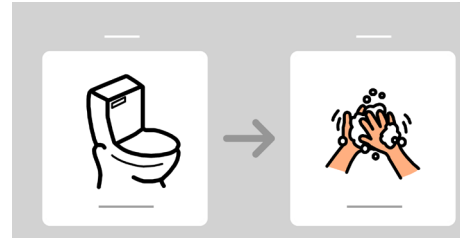


Mini-Ablaufpläne

Zeigen die Reihenfolge einer kleinen Gruppe zueinander gehöriger Aktivitäten.

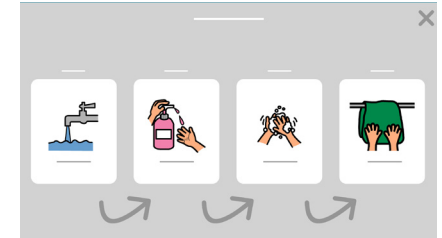


Soziale Geschichten (Skript)

Geschichten, die eine Situation beschreiben und zeigen, wie man sich dabei möglicherweise fühlt und auf positive Weise damit umgeht.

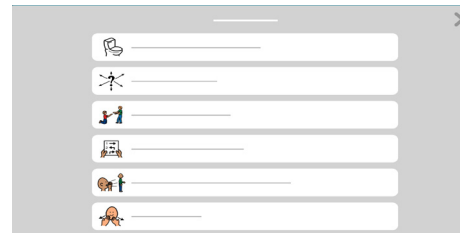

Timer

Zeigt an, wieviel Zeit für eine Aktivität verbleibt.

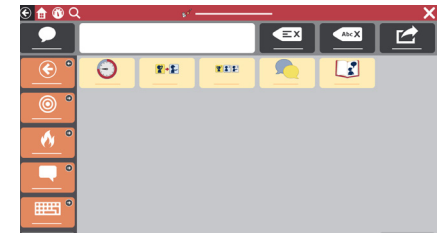

Übersicht



In der Übersicht finden Sie die Gerätesteuerung, z. B. die Lautstärkeregelung und die Fernbedienungen. Sie können über die Werkzeugleiste darauf zugreifen.

Bearbeitungswerkzeug



Nimmt Änderungen an Inhalten oder Einstellungen vor.



Unterstützte Kommunikation verwenden

Die Verwendung von Unterstützter Kommunikation (UK) bietet dem/der Lernenden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation an alltäglichen Aktivitäten. Der erste Schritt zu erfolgreicher UK besteht darin, ein guter Kommunikationspartner zu sein.

Kommunikationspartnerkompetenzen sind Techniken, mit denen Sie dem/der Lernenden helfen, effektiver zu kommunizieren.

Gelegenheiten erkennen

Erkennen Sie, zu welchen Tageszeiten der/die Lernende Kommunikationskompetenzen erlernen und einüben kann. Sie können ihm/ihr beispielsweise helfen, mit Snap Core First mitzuteilen, welchen Snack er/sie essen oder welchen Film er/sie anschauen möchte.



Ein positives Kommunikationsumfeld schaffen

Mit diesen Einstellungen und Strategien können Sie den/die Lernende(n) zur Kommunikation ermutigen.

- **Unterstellen, dass Fähigkeiten vorhanden sind**
„Ich weiß, du kannst es.“
- **Auf alle Arten der Kommunikation reagieren**
Lernende(r): Lächelt Sie an. Partner: „Oh, Hallo!“
- **Warten**
Der Partner zählt bis fünf und hilft erst dann, das Vokabular zu finden.
- **Auf die Verwendung konzentrieren, nicht auf das Ausprobieren**
Sagen Sie nicht: „Such mal das Buch.“ Sondern: „Es ist Zeit zum Lesen. Welches Buch wollen wir lesen?“

Scannen Sie diesen Code, um ein Video über die Schaffung eines positiven Kommunikationsumfelds zu sehen.



Unterstützte Kommunikation verwenden

Modelling

Modelling ist erwiesenermaßen die beste Lehrmethode für die Verwendung von UK. Zum Modelling gehört beispielsweise, dass Sie das Gerät berühren und verwenden, während Sie mit dem/der Lernenden sprechen und interagieren.

- Beim Modelling geht es darum, dass Sie dem/der Benutzer/in zeigen, wie man kommuniziert.
- Das verlangt nicht, dass er/sie Sie nachahmt.
- Geben Sie in Ihrer Funktion als Vorbild die Schlagworte wieder, nicht jedes einzelne Wort.
- Nutzen Sie Modelling, wenn Sie nach Vokabular suchen.
- Fehler sind dabei voll in Ordnung. Sie geben Ihnen die Chance, diese in Ihrer Funktion als Vorbild zu korrigieren.
- Modelling ist kein Quiz oder Test.



Erfolge erkennen

Erfolge, die man erkennen kann, sind mehr als nur ein/e Benutzer/in, der/die zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art das Erwartete kommuniziert.

Dazu gehören beispielsweise:

- Stärkere Aufmerksamkeit bei Interaktionen
- Längere Interaktionen
- Beginnen von Gesprächen
- Mehr Freude an Interaktionen
- Größerer aktiver Wortschatz
- Mehr Selbständigkeit bei der Kommunikation

Scannen Sie diesen Code, um in einem Video zu sehen, wie Modelling funktioniert.




Scannen Sie diesen Code, um in einem Video zu sehen, wie Sie Erfolge erkennen.



Aktivität

Ein Buch lesen

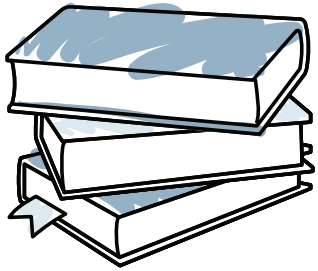

Vorbereitung

Wählen Sie auf der Werkzeugleiste „Themen“ aus. Suchen Sie nach dem Thema „Lesen“ und machen Sie sich vor der Aktivität mit dem Vokabular vertraut.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



- 1 Präsentieren Sie das Buch und zeigen Sie den Umschlag. Sprechen Sie darüber, wovon das Buch handelt.
- 2 Lesen Sie jede einzelne Seite und machen Sie am Ende eine Pause zum Kommunizieren.
- 3 Machen Sie beim Lesen Pausen, um Fragen zu stellen (z. B. „Was hältst du bis jetzt davon?“ „Macht es dir Angst?“ „Ich glaube, der Junge hatte Angst.“).
- 4 Wenn Sie zu Ende gelesen haben, stellen Sie keine Quizfragen, sondern fragen Sie stattdessen, wie er/sie sich gefühlt hat oder was er/sie von der Geschichte hält.

Materialien

Snap Core First
Thema „Lesen“

Ein Lieblingsbuch

Ein bequemer Platz




Hilfreiche Tipps

- Wenn in dem Buch ein Satz sehr häufig vorkommt und auf der Seite noch ein freies Feld ist, programmieren Sie den Satz auf das Feld.
- Wählen Sie jedes Mal das Feld an, wenn der häufig wiederholte Satz vorkommt.
- Mitteilungen wie „Umblättern“ und „Nochmal lesen“ sind bereits im Gerät vorprogrammiert.
- Kommentieren Sie alles, was das Kind ansieht und/oder worauf es in der Umgebung zeigt. Zum Schluss sollten Sie ihm/ihr Bestätigung geben, dass er/sie hervorragend mit Ihnen kommuniziert hat.
- Lesen Sie das Buch noch einmal und konzentrieren Sie sich dabei auf die Bilder. Weisen Sie auf die zu den Bildern passenden Wörter im Gerät hin und üben Sie Ihre Vorbildfunktion aus, indem Sie sie auswählen (Modelling).

Aktivität

Ein Spiel spielen

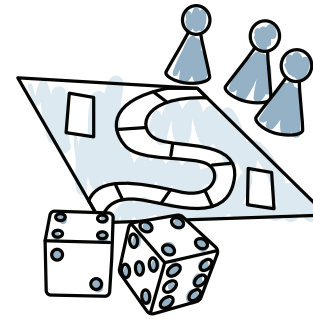

Spielideen

Uno, Bingo, Memory

Vorbereitung

Wählen Sie auf der Werkzeugleiste „Themen“ aus. Suchen Sie nach dem Thema „Spiele“ und machen Sie sich vor der Aktivität mit dem Vokabular vertraut.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



- 1 Erklären Sie das Spiel und gehen Sie die Regeln durch, falls Sie das Spiel noch nie gespielt haben.
- 2 Spielen Sie das Spiel mit dem Vokabular, das Sie sich angeschaut haben.
- 3 Machen Sie Pausen, um Kommentare zum Spielverlauf abzugeben.
- 4 Am Ende des Spiels sollten Sie sich Zeit für Kommentare nehmen.

Materialien

Snap Core First
Thema „Spiele“

Ein Lieblingsbrett-
oder Kartenspiel

Snacks (optional)



Hilfreiche Tipps

- Suchen Sie im Ordner „Spiele“ unter „Themen Wörter“ nach weiterem Vokabular.
- Mitteilungen wie „Ich bin dran“, „Nochmal spielen“ und „Ich mag das Spiel nicht“ sind bereits im Gerät vorprogrammiert.
- Lassen Sie den Benutzer durch Auswahl der passenden Felder mitverfolgen, wer an der Reihe ist („ich bin dran“, „du bist an der Reihe“).



tobii dynavox

6



tobii dynavox

6

Aktivitäten

Beim Sport zusehen



Vorbereitung

Wählen Sie auf der Werkzeugleiste „Themen“ aus. Suchen Sie nach dem Thema „Sport“ und machen Sie sich vor der Aktivität mit dem Vokabular vertraut.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



- 1 Erzählen Sie von der Sportveranstaltung, die Sie sich ansehen, und welche Mannschaften daran teilnehmen.
- 2 Zeigen Sie, wie man beim Spiel lustige Kommentare machen kann, indem man navigiert und Felder auswählt.
- 3 Wenn die Aktivität vorbei ist, können Sie erfolgreiche Kommunikationsversuche noch einmal aufgreifen (z. B. „Es hat mir sehr gefallen, wie du auf den Ball gezeigt hast, um mir zu zeigen, dass es dir gefällt.“).

Materialien

Snap Core First
Thema „Sport“

Eine interessante
Sportveranstaltung

Snacks (optional)



Hilfreiche Tipps

- Mit dem Feld „Bearbeiten“ können Sie dem Feld „Lieblingsmannschaft []“ Ihre Lieblingsmannschaft hinzufügen.
- Mitteilungen wie „Ist heute ein Spiel?“, „Ich liebe diese Mannschaft“ und „Ich hasse diese Mannschaft“ sind schon im Gerät vorprogrammiert.
- Wenn noch ein Feld frei ist, programmieren Sie es mit einem lustigen Anfeuerungsruf für Ihre Mannschaft.

Aktivitäten

Ins Restaurant gehen



Vorbereitung

Wählen Sie auf der Werkzeugleiste „Themen“ aus. Suchen Sie nach dem Thema „Restaurant“ und machen Sie sich vor der Aktivität mit dem Vokabular vertraut.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



- 1 Sprechen Sie darüber, dass Sie ins Restaurant gehen werden.
- 2 Sie können als Vorbild das Vokabular wiedergeben (Modelling), bevor Sie überhaupt im Restaurant sind. Beispielsweise können Sie das Feld „Lass uns essen gehen“ auswählen.
- 3 Sobald Sie im Restaurant sind, üben Sie während der gesamten Mahlzeit die Vorbildfunktion im Umgang mit dem Gerät aus.
- 4 Nach dem Ende der Mahlzeit greifen Sie die erfolgreichen Kommunikationsversuche noch einmal auf. (z. B. „Als du auf ‚Mehr‘ gedrückt hast, wusste ich, dass du die Brötchen haben willst!“).

Materialien

Snap Core First Thema
„Restaurant“

Ein Lieblingsrestaurant

Leckeres Essen




Hilfreiche Tipps

- Mitteilungen wie „Können wir essen gehen?“, „Ich liebe diesen Ort“ und „Ich sehe hier nichts, was ich will“ sind schon im Gerät vorprogrammiert.
- Ermutigen Sie alle Anwesenden, sich zu beteiligen, auch die Kellner.




Nach einem Wort suchen

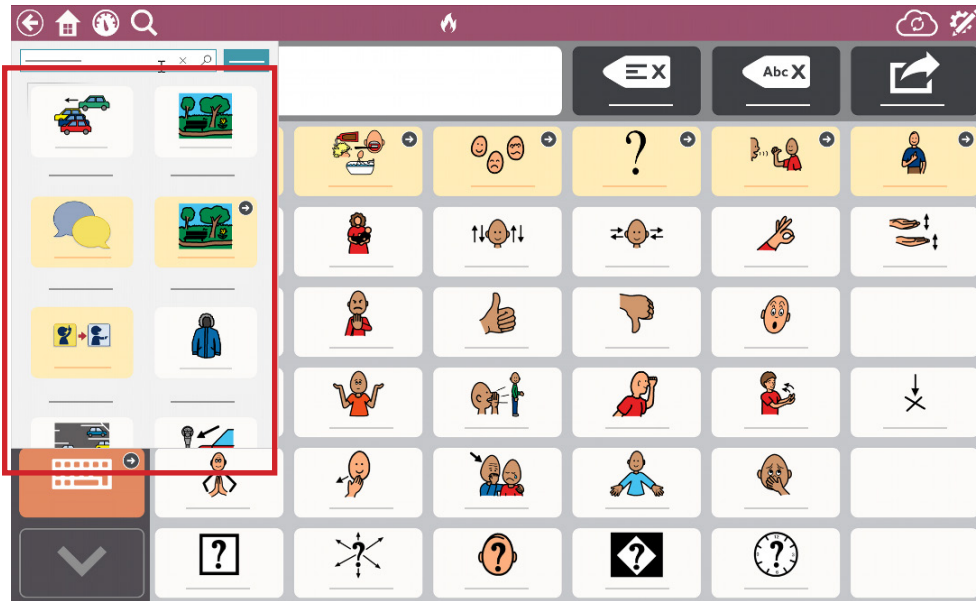

Wenn Sie diesen Code scannen, erhalten Sie weitere Informationen zur Suchfunktion.



- 1  Wählen Sie das Tool „Suchen“.
- 2 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie das gesuchte Wort ein.
- 3 Wählen Sie aus der angezeigten Liste das gewünschte Ergebnis aus.
- 4 Folgen Sie dem Pfad, der hervorgehoben wird, um Ihr Wort bzw. Ihren Satz zu finden.




Rastergrößen ändern

Wir empfehlen, in erster Linie auf die Fähigkeit des Benutzers zur Auswahl der gewünschten Felder zu achten. Die physische Bedienung des Kommunikationsgeräts erfordert Übung. Beginnen Sie mit einer kleineren Rastergröße. Wenn der Benutzer sich an das Gerät gewöhnt hat, kann er möglicherweise ein größeres Raster verwenden. Die Rastergröße lässt sich problemlos ändern, und das Vokabular des Seitensets Core First ist bei allen Rastergrößen auf die gleiche Weise angeordnet.


Wenn Sie diesen Code scannen, sehen Sie ein kurzes Video zur Änderung der Rastergröße.



- 1  Klicken Sie auf das Feld Bearbeiten.
- 2 Wählen Sie den Reiter „Seitenset“.




- 3 Wählen Sie „Rastergröße“ aus.

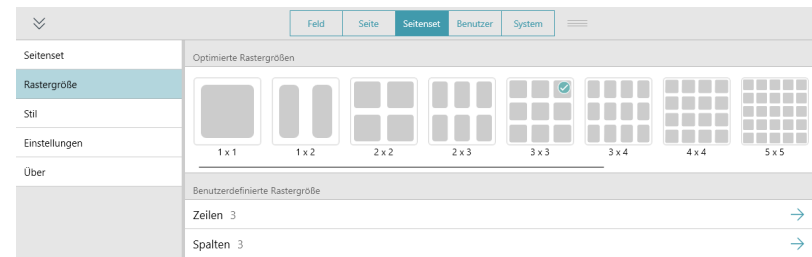

- 4 Wählen Sie eine der optimierten Rastergrößen aus.
- 5 Wählen Sie „Fertig“.




Ein Feld bearbeiten

- 1 Gehen Sie zu der Seite mit dem Feld, das Sie bearbeiten möchten.
- 2  Wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
- 3 Das Bearbeitungs Menü erscheint unten auf dem Bildschirm. Beachten Sie: „Feld“ ist bereits vorausgewählt.



- 4 Wählen Sie das Feld aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 5 So ändern Sie das Symbol des Feldes:

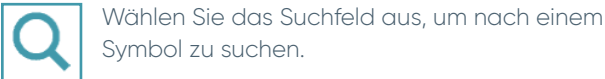

- 6 Wenn Sie den Text ändern möchten, der auf dem Feld erscheint, geben Sie ihn in das Feld für die Bezeichnung ein. Wenn Sie die Mitteilung ändern möchten, die bei einer Auswahl des Feldes eingefügt oder gesprochen wird, geben Sie sie in das Feld für die Mitteilung ein.
- 7 Wenn Sie die Farbe, die Umrandung, die Schriftart oder das Layout des Feldes ändern möchten, wählen Sie „Stil“ aus.
- 8 Bearbeiten Sie „Aktionen“, um zu verändern, was geschieht, wenn das Feld ausgewählt wird.




- 9 Wenn Sie damit fertig sind, wählen Sie „Fertig“.




Verhaltensunterstützungen bearbeiten


- 1 Suchen Sie nach der Seite mit den Unterstützungen, auf der sich die zu bearbeitende Verhaltensunterstützung befindet.

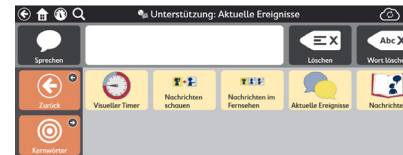

- 2 Wählen Sie „Bearbeiten“ aus.

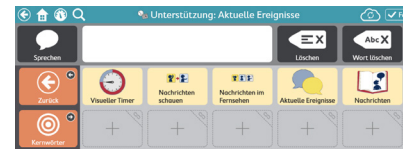


- 3 Wählen Sie das Feld für die zu bearbeitende Verhaltensunterstützung aus.

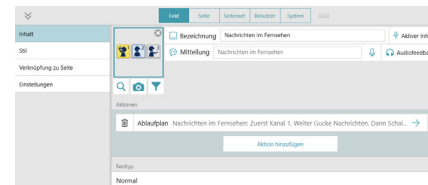

- 4 Wählen Sie die Aktion aus (Ablaufplan, Timer, Zuerst-dann oder Skript).

- 5 Wählen Sie das Stiftsymbol in einer der Reihen aus, um Änderungen vorzunehmen.

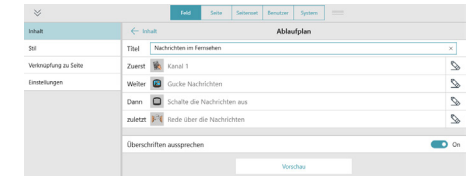

- 6 Wählen Sie das Feld „Vorschau“ unten im Bearbeitungs Menü der Verhaltensunterstützung, um eine Vorschau Ihrer Änderungen anzuzeigen.

- 7 Wenn Sie damit fertig sind, wählen Sie „Fertig“.



Seiten mit anderen teilen und speichern:

Synchronisierung

Die Synchronisierung ermöglicht Ihnen:

- Auf verschiedenen Geräten dieselbe Version eines Seitensets zu verwenden
- Das Seitenset mit anderen zu teilen
- Die Bearbeitung per Fernzugriff
- Das Seitenset mit einem einzigen Klick in der Cloud zu speichern

Anders als bei einem Kopiervorgang werden synchronisierte Seiten über eine aktuelle Version in der Cloud miteinander verbunden.

Wenn Sie „Synchronisieren“ auswählen, senden Sie Änderungen, die Sie vorgenommen haben, an die Cloud und erhalten von dort die Änderungen, die andere vorgenommen haben.

Wenn alle Geräte synchronisiert wurden, verfügen alle über dieselbe Version des Seitensets.



Dies ist das Feld „Synchronisieren“. Es befindet sich in der oberen Leiste von Snap Core First.


Weitere Informationen zur Synchronisierung und zu myTobiiDynavox.com erhalten Sie mit diesem Code:




Seiten mit anderen teilen und speichern:

Als Datei speichern

Benutzer und Seiten in Snap können als Datei gespeichert werden. Derartige Dateien können Sie entweder auf myTobiiDynavox.com oder lokal auf Ihrem Gerät oder USB-Medium speichern.

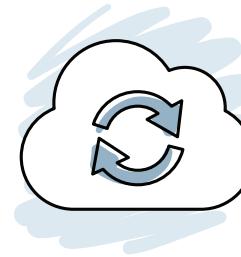

Synchronisieren oder als Datei speichern?

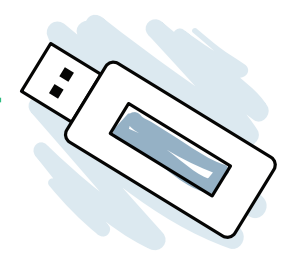

Synchronisierung

Eine Synchronisierung ist am wirkungsvollsten, wenn der Benutzer zwischen mehreren Geräten wechselt. Beispielsweise kann sich ein Gerät in der Schule befinden und eines zu Hause. Wenn Sie Ihr Seitenset zwischen beiden Geräten synchronisieren, bleibt gewährleistet, dass sie identisch sind.

Die Synchronisierung eignet sich auch für die Bearbeitung per Fernzugriff, wenn der Benutzer nicht dadurch gestört werden soll. Beispielsweise kann der Benutzer weiterhin das Kommunikationsgerät benutzen und Sie bearbeiten inzwischen das Seitenset am PC. Sie synchronisieren es zuerst am PC und anschließend auf dem Kommunikationsgerät, damit es die Änderungen empfängt.

Synchronisierung kann auch als praktische Sicherungsmethode für ein einzelnes Gerät verwendet werden. Bei jeder Synchronisierung wird eine Sicherungskopie in der Cloud erstellt.

Als Datei speichern

Das Speichern als Datei eignet sich besser für Personen, die unabhängig von Ihnen, eigene Änderungen vornehmen möchten, oder wenn Sie nur ein paar Seiten speichern bzw. mit anderen teilen möchten, aber kein ganzes Seitenset.

Die Speicherung als Datei ist ideal in Situationen, in denen Sie keine Internetverbindung haben. Erstellen Sie einfach eine Sicherungskopie für sich selbst oder speichern Sie die Datei auf einem USB-Laufwerk, um sie mit jemand anderem zu teilen.

Die Speicherung als Datei ist die einzige Möglichkeit, einen Benutzer mit allen dazugehörigen Einstellungen zu sichern.



Pathways für Core First

Pathways for Core First ist eine KOSTENLOSE Begleit-App mit Expertentipps zur Unterstützung der Kommunikation von Benutzern von Snap Core First.



Pathways geht mit Ihnen Schritt für Schritt die Kompetenzen durch, mit denen Sie den größtmöglichen Nutzen aus der UK-Kommunikation mit Snap Core First ziehen.

- Core First einrichten
- Bearbeitung erlernen und Core First individuell anpassen
- Bei motivierenden Aktivitäten ausprobieren
- Kommunikationskompetenzen aufbauen
- Kompetenzen im Umgang mit dem Gerät aufbauen
- Soziale Kompetenzen aufbauen
- Zu positivem Verhalten ermutigen
- Mit den Förderzielen Ziele ermitteln
- Experten-Tipps zur Verbesserung des Lernerfolgs erhalten
- Fortschritte erkennen



Wenn Sie diesen Code scannen, erhalten Sie weitere Informationen zu Pathway for Core First:



Core First Learning


Was ist Core First Learning?

Ein internetgestütztes Kommunikationsprogramm zur Unterstützung von Sprache, Kommunikation, Lese- und Schreibfähigkeiten.

Es dient als Unterrichtsmaterial für die Bedeutung, Verwendung und Anordnung von Kernwörtern in UK-Systemen.

Woher bekomme ich das?

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie auf Core First Learning zugreifen können.

<p>Wenn Sie Druckversionen der Lektionen und Bücher benötigen, scannen Sie diesen Code.</p> 	<p>In der App „Pathways for Core First“:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Wählen Sie „Kompetenzen aufbauen“ aus.■ Wählen Sie „Kernvokabular unterrichten“ aus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Über Ihr kostenloses Konto bei myTobiiDynavox.com haben Sie Zugriff auf zahlreiche weitere Funktionen, z. B. Cloud-Speicher für Sicherungsdateien, Synchronisierung von Seitensets, Übungspläne und vieles mehr!

myTobiiDynavox.com



Mit myTobiiDynavox haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sichere Backups für Ihr System
- Informationen zu verfügbaren Updates erhalten
- Seitensets und Seitenpakete mit anderen teilen

Community:

<https://www.facebook.com/groups/128363433866458/>

Kontaktieren Sie für weitere Fragen Ihren Hilfsmittelberater.

#PowerToBeYou

