

MEMOday 2

Art. Nr. 508270



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	2
2. Zu Beginn	3
3. Sprachausgabe	3
4. Ändern der Hintergrundfarbe	4
5. Zeitintervalle	4
6. Notfallbatterie	4
7. Ein- und Ausschalten von MEMOday	5
8. Bildschirm	5
9. Pflege/Reinigung	6
10. Umweltschutz	6
11. Technische Spezifikationen	6
12. Mitgelieferte Komponenten	7
13. Aufbewahrung	7
14. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	7
15. Konformität mit der Medizinprodukterichtlinie	7
16. Sicherheit und Haftung	7

1. Einleitung

MEMOday erinnert Sie daran, welcher Tag und welche Uhrzeit es ist. Das eindeutige Display zeigt Uhrzeit, Wochentag, Datum und Tageszeit an. Die angezeigten Daten können wahlweise auch laut vorgelesen werden. Durch eine Tag- und Nachtanzeige kann MEMOday verhindern, dass der Anwender mitten in der Nacht aus Versehen einen Verwandten anruft oder das Haus verlässt.

MEMOday sollte an einem zentralen Ort im Haushalt platziert werden. Es wird mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen.

MEMOday lässt sich einfach an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Wenn die Stromversorgung zu MEMOday unterbrochen ist (z. B. bei einem

Stromausfall), wird der Text nicht mehr angezeigt. Der normale Betrieb wird jedoch wieder aufgenommen, sobald die Stromversorgung wieder vorhanden ist. MEMOday wird bei Beginn und Ende der Sommerzeit automatisch umgestellt.

2. Zu Beginn


1. Entscheiden Sie, wie Sie MEMOday vorstellen möchten. Manche Menschen möchten keine „Hilfsmittel“ verwenden, deshalb könnte es die beste Möglichkeit sein, das Gerät als „Geschenk“ überreichen.
2. Bestimmen Sie, wo MEMOday im Haushalt platziert werden soll. Es sollte an einem Ort stehen, wo es gut sichtbar ist, z. B. beim Telefon oder auf der Küchentheke. Achten Sie darauf, dass Lichtreflektionen von Lampen oder Sonnenlicht die Sichtbarkeit des Displays nicht beeinträchtigen.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie es in den seitlichen Anschluss am MEMOday.
4. Drücken und halten Sie den *Ein/Aus*-Knopf seitlich am MEMOday, bis das Display leuchtet.
5. Befolgen Sie die eingeblendeten Anweisungen zum Einstellen von Sprache, Land, Uhrzeit und Datum sowie der Anzeigeinformationen des Displays. Siehe Abschnitt 8. *Bildschirm* für weitere Informationen.
6. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät stets angeschlossen ist. Das Display bleibt nur eingeschaltet, wenn MEMOday an eine Steckdose angeschlossen ist.

Hinweis! Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Ladegerät. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie ein neues Ladegerät benötigen.

3. Sprachausgabe

Durch leichten Druck auf das Display wird die entsprechende Information laut vorgelesen. Achten Sie darauf, dass die Sprachausgabe eingeschaltet ist. Siehe Abschnitt 8. *Bildschirm*.


4. Ändern der Hintergrundfarbe

Wenn Sie die Schaltfläche  drücken, wird die Hintergrundfarbe von MEMOday von hell auf dunkel oder von dunkel auf hell geändert.

Heller Hintergrund:



Dunkler Hintergrund:

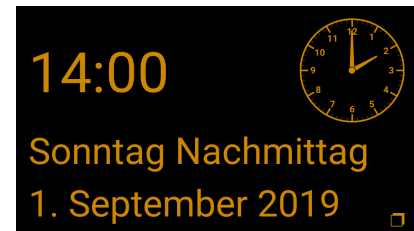

Hinweis! Wenn Sie „Farbe ändern“ nicht ausgewählt haben, ändert MEMOday die Hintergrundfarbe während der Nacht, d. h. von 23:00 bis 06:00 Uhr.

5. Zeitintervalle

MEMOday zeigt die Tageszeit mit Text an.

Die Zeitintervalle für diese Anzeige sind wie folgt vorprogrammiert:

Früher Morgen:	06:00 Uhr	–	09:00 Uhr
Vormittag:	09:00 Uhr	–	12:00 Uhr
Nachmittag:	12:00 Uhr	–	18:00 Uhr
Abend:	18:00 Uhr	–	23:00 Uhr
Nacht:	23:00 Uhr	–	06:00 Uhr

Während der Nachtstunden wird die Display-Helligkeit automatisch reduziert.

6. Notfallbatterie

Wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist oder es zu einem Stromausfall kommt, wird auf dem Display eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, das Ladegerät anzuschließen. Nach einer Minute ohne Stromversorgung wird das Display ausgeschaltet.


Wenn die Stromversorgung zu MEMOday wiederhergestellt wird (das Ladegerät wird angeschlossen oder die Stromversorgung ist nach einem Stromausfall wieder vorhanden), schaltet das Display sich wieder ein und zeigt die korrekte Uhrzeit, den Wochentag, das Datum und die Tageszeit wieder an. Die Einstellungen werden durch eine integrierte Batterie gespeichert.

Wenn MEMOday über einen längeren Zeitraum über keine Stromversorgung verfügt (mehrere Wochen), kann es erforderlich sein, die Einstellungen für Sprache, Land, Uhrzeit, Datum und Display erneut vorzunehmen.

7. Ein- und Ausschalten von MEMOday


Während der normalen Verwendung ist MEMOday eingeschaltet, sodass die Informationen auf dem Display für den Anwender jederzeit sichtbar sind. Sie können das Display ausschalten, indem Sie kurz auf den *Ein/Aus*-Knopf drücken.

Wenn MEMOday über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, können Sie es vollständig ausschalten, indem Sie den *Ein/Aus*-Knopf drücken und halten, bis zwei Auswahlmöglichkeiten auf dem Display angezeigt werden.




Drücken Sie , um das Display auszuschalten.

8. Bildschirm


Sie können auswählen, welche Informationen auf dem Display angezeigt werden sollen.

Gehen Sie in die Einstellungshilfe, indem Sie den *Ein/Aus*-Knopf drücken und halten, bis zwei Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden. Drücken Sie , um die Einstellungshilfe zu starten.

Die Einstellungshilfe führt Sie durch die folgenden Schritte:

- **Sprache einstellen.** Sprachen mit einem -Symbol verfügen über die Funktion für die Sprachausgabe. Sobald die Sprache ausgewählt wurde, ist das Symbol grün () , wenn die Sprachausgabe eingeschaltet ist, oder es ist rot () , wenn die Sprachausgabe ausgeschaltet ist. Drücken Sie auf das Symbol, um die Einstellung zu ändern.
- **Sprachausgabe** . Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn die Sprachausgabe ausgewählt ist. Stellen Sie die *Lautstärke* und das *Sprechtempo* ein, mit der bzw. mit dem die Bildschirminformationen vorgelesen werden sollen. Wählen Sie auch aus, ob sämtlicher Text vorgelesen werden soll oder nur jener Text, auf den Sie drücken.
- **Land wählen.** Wählen Sie das Land aus, in dem MEMOday verwendet wird. Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie die Uhrzeit angezeigt wird und wann die Uhr für Beginn und Ende der Sommerzeit umgestellt wird.
- **Zeit und Datum einstellen.** Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit, Jahr, Monat und Datum ein.
- **Anzeigeinformationen einstellen.** Hier können Sie auswählen, welche Elemente auf dem Display angezeigt werden sollen. Auswahlmöglichkeiten mit Überstrich werden nicht angezeigt.

In der Abbildung unten werden alle verfügbaren Anzeigeeinformationen dargestellt:

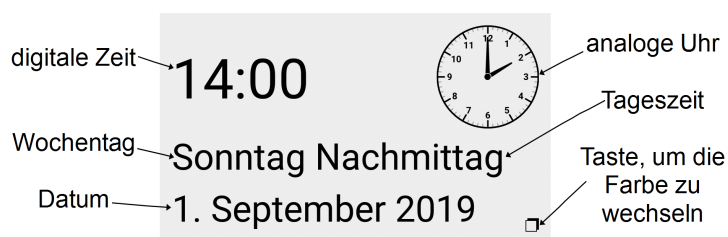

9. Pflege/Reinigung

Reinigen Sie MEMOday mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel für die Reinigung. Das Produkt darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

10. Umweltschutz

Die Verpackung besteht aus recycelbarem Material und wird als Papierverpackung entsorgt. Wenn das Produkt oder die Batterie entsorgt werden, müssen diese als Elektromüll behandelt oder beim Händler zurückgegeben werden.

11. Technische Spezifikationen

Abmessungen (H x B x T):	140 × 185 × 95 mm
Gewicht:	0,35 kg
Batterie:	integriert, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V
Ladegerät:	5,0 V, 2.000 mA (Zentrum positiv). Es darf nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Um ein neues Ladegerät zu bestellen, verwenden Sie die Artikelnummer <i>508258 Power Supply MEMOday</i> .
Bildschirm:	7 Zoll
Verfügbare Sprachen:	Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch*, Nordsamisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Flämisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Slowenisch*, Bosnisch*, Kroatisch*, Serbisch*, Tschechisch, Polnisch, Albanisch*, Arabisch, Persisch*, Türkisch, Somali*, Ungarisch*, Russisch, Griechisch, Kanada* * Die Sprachausgabe ist für diese Sprache nicht verfügbar.

12. Mitgelieferte Komponenten

MEMOday	1 Stück
MEMOday Ladegerät und Stromkabel für UK, Art. Nr.: 508259	1 Stück
Gebrauchsanweisungen	

13. Aufbewahrung

Wenn MEMOday nicht verwendet wird, sollte es im Innenbereich bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

14. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Gehen Sie zum Zurücksetzen von MEMOday auf die Werkseinstellungen in die Einstellungen und stellen Sie die erforderliche Sprache und das Land ein. Siehe Abschnitt 8. *Bildschirm*. Reinigen Sie das Gerät wie in Abschnitt 9. *Pflege/Reinigung* beschrieben und achten Sie darauf, dass das mitgelieferte Ladegerät nicht beschädigt wird. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler, um ein neues zu bestellen.

15. Konformität mit der Medizinprodukterichtlinie

MEMOday ist als Medizinprodukt der Klasse I für Personen mit kognitiven Behinderungen zugelassen und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

16. Sicherheit und Haftung

Abilia hat eine Risikoanalyse für das Produkt in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 14971 durchgeführt.

Es ist immer wichtig, beim erstmaligen und weiteren Gebrauch des Produkts an die Sicherheit zu denken. Es ist nicht möglich, im Rahmen der Gebrauchsanweisung sämtliche Möglichkeiten zu beschreiben, in denen das Produkt nicht verwendet werden darf. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät korrekt eingerichtet oder es zu Beginn ordnungsgemäß verwendet haben, empfehlen wir Ihnen, den Händler zu kontaktieren.

Abilia haftet nicht für Verluste, Schäden und Folgeschäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Kontrolle, unsachgemäße Einstellung, fehlerhafte Verbindung u. Ä. zurückzuführen sind. Die finanzielle Haftung von Abilia ist in jedem Fall auf den Wert des Produkts selbst beschränkt.

CE



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

