

MEMOdayplanner 3

Art.-Nr. 508780 MEMOdayplanner 3, 12-Stunden-Version

Art.-Nr. 508781 MEMOdayplanner 3, 24-Stunden-Version



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1 Zwei verschiedene Versionen: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Version.....	4
2. Geräteübersicht	5
2.1 Weitere mitgelieferte Komponenten	5
3. Installation	6
4. Einstellen der Uhr	6
5. Alarmer beim MEMOdayplanner.....	7
5.1 Einstellen eines Alarms	7
5.2 Ausschalten eines Alarms	8
5.3 Überprüfen von eingestellten Alarmen	8
5.4 Löschen von Alarmen.....	8
6. Personalisieren des MEMOdayplanner	9
6.1 Zeitanzeige als Lichtsäule oder Lichtpunkt.....	9
6.2 Blinklicht als Hinweis auf einen Alarm	9
6.3 Digitale Zeitanzeige.....	9
6.4 Einstellen der Helligkeit der Lichtsäule/des Lichtpunkts	10
6.5 Anpassen der Helligkeit der digitalen Uhr	10
6.6 Anpassen der Alarmlautstärke	10
6.7 Ändern der Anfangszeit für Tag und Nacht	10
6.8 Auswählen der 12-/24-Stunden-Uhr	11
6.9 Ändern des Funktionsmodus für die Sommerzeit.....	11
7. Aufbewahrung	12
8. Reinigung	12
9. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	12
10. Sicherheit und Haftung	13
11. Technische Daten.....	13
11.1 Umgebung.....	13
11.2 Lieferumfang	13
11.3 Ersatz-/Zubehörteile	14
11.4 Technische Daten	14
11.5 Konformität mit der Medizinprodukterichtlinie.....	15
11.6 Recycling von Elektromüll	15

1. Einleitung

MEMOdayplanner 3 ist eine als Planungshilfe genutzte Tafel, die die aktuelle Uhrzeit und die Dauer bis zur nächsten Aktivität bzw. zum nächsten Ereignis anzeigt. Eine Lichtsäule, auf der jede Viertelstunde eine Licht erlischt, oder alternativ ein absteigender Lichtpunkt macht es für den Anwender klar ersichtlich, wie viel Zeit des Tages bereits verstrichen ist. Durch die verschiedenen Farben der Lichtsäule ist leicht erkennbar, ob Tag oder Nacht ist. Für jeden Lichtpunkt kann ein akustischer Alarm eingestellt werden, um den Anwender darauf aufmerksam zu machen, auf die Tafel zu schauen, wenn ein Ereignis bevorsteht. Das Tablet ist ein selbstständiges Gerät, das keine Internetverbindung erfordert.

Das Whiteboard ist magnetisch und kann mithilfe von Text, Bildern und Symbolen einfach an Ihre eigene Gestaltungsweise und Ihre Bedürfnisse angepasst werden.


MEMOdayplanner wird mit Alarmen zu gewünschten Zeitpunkten/Lichtpunkten personalisiert. Ein Alarm wird in Form eines Pieptons und/oder eines blinkenden Lichtpunkts ausgegeben. Die Alarmlautstärke kann eingestellt werden.

Hilfreiche Tipps zur Verwendung von MEMOdayplanner finden Sie im Ideenheft.


1.1 Zwei verschiedene Versionen: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Version



MEMOdayplanner 3 ist in zwei verschiedenen Versionen verfügbar, in der 12- oder in der 24-Stunden-Version. Der Unterschied ist, dass die Zeitsäule 12 oder 24 Stunden anzeigt und dass die entsprechenden Zahlen auf der Vorderseite vordruckt sind.

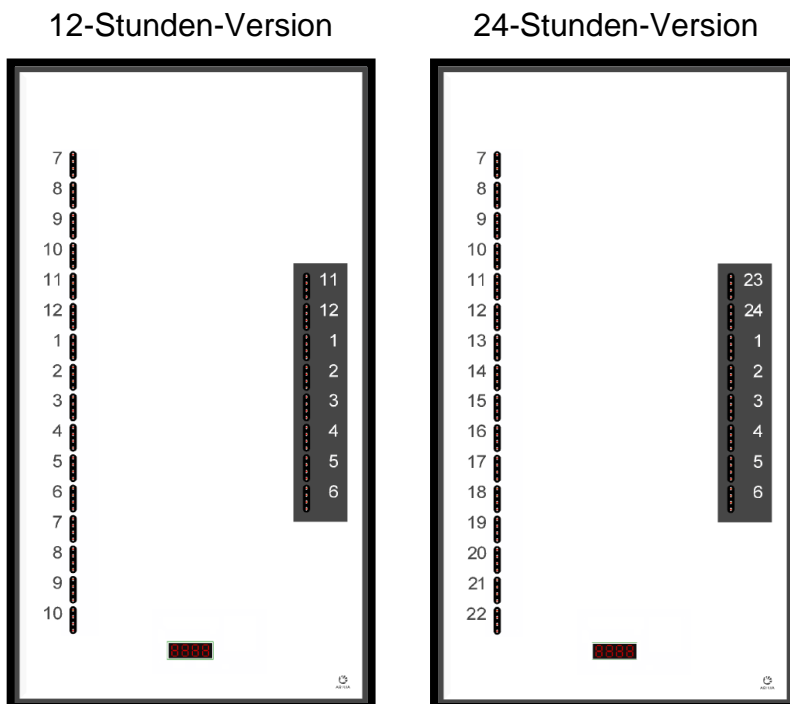Es besteht die Möglichkeit, MEMOdayplanner 3 vom 12-Stunden- auf den 24-Stunden-Modus umzustellen (und umgekehrt). Bringen Sie einen der Zeit-Magnetstreifen (erhältlich als Zubehör) an und legen Sie die Anfangszeit für die Tagesstunden neu fest. Siehe dazu Abschnitt 6.7 *Ändern der Anfangszeit für Tag und Nacht*.

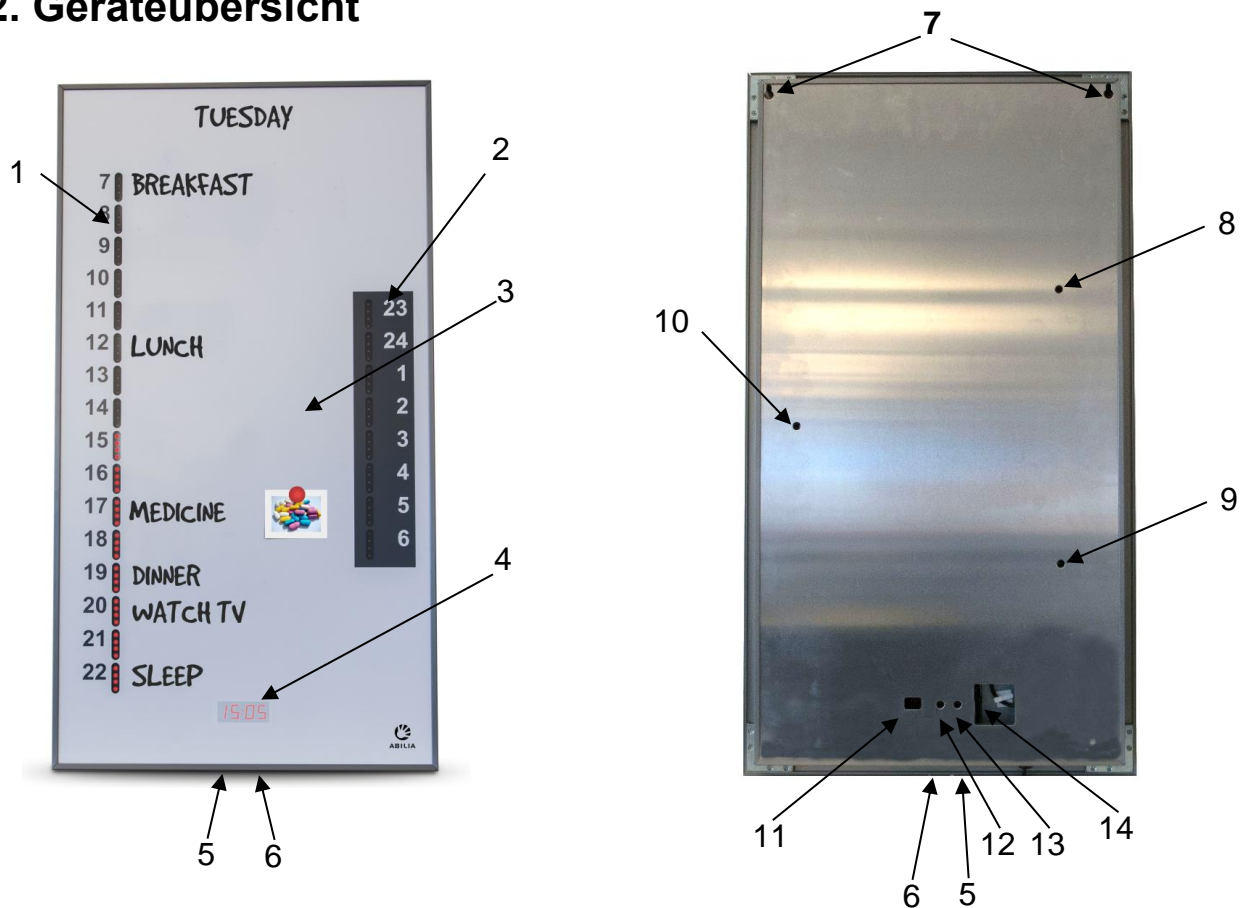

2. Geräteübersicht



1. Zeitanzeige, Tag	7. Öffnung für Wandbefestigung
2. Zeitanzeige, Nacht	8. Helligkeitseinstellung, Morgen
3. Magnetisches Whiteboard	9. Helligkeitseinstellung, Abend
4. Digitale Uhr	10. Helligkeitseinstellung, Nacht
5. Alarm-Taste, 	11. Anzeige-Einstellung
6. Zeit-Taste, 	12. Helligkeitseinstellung für die digitale Uhr
	13. Einstellung der Alarmlautstärke
	14. Ausgang für den Anschluss eines Steuerschalters

2.1 Weitere mitgelieferte Komponenten

Im Lieferumfang des MEMOdayplanner sind folgende Komponenten enthalten:

- Netzadapter
- 3 x Whiteboard-Marker
- Mikrofasertuch
- Schraubendreher
- Schrauben für Wandbefestigung und Bohrschablone
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung
- Ideenheft



3. Installation


Befestigen Sie den MEMOdayplanner mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand. Verwenden Sie die Schablone, um einen korrekten Abstand zwischen den Schrauben zu erzielen. Achten Sie darauf, die richtige Befestigungsmethode für die jeweilige Wandart anzuwenden.







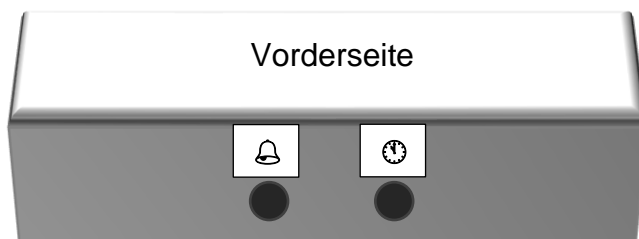

Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an. MEMOdayplanner muss jederzeit an eine Steckdose angeschlossen sein. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, läuft die Uhr zwar weiter, jedoch leuchtet die Lichtsäule nicht, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. MEMOdayplanner zeigt dann die eingestellte Zeit an.

4. Einstellen der Uhr



Wenn MEMOdayplanner an die Stromversorgung angeschlossen ist, wird die Uhrzeit auf der Uhranzeige digital angezeigt. Bei der Auslieferung des Geräts ist die Uhr so eingestellt, dass die Einstellung der Sommer- und der Winterzeit automatisch erfolgt (EU-Sommerzeit). Informationen zum Einstellen der Uhr finden Sie in den nachstehenden Anweisungen. Damit die Einstellung der Winter- und der Sommerzeit funktioniert, muss auch das Datum richtig eingestellt sein.

Verwenden Sie zum Einstellen der Uhr die Tasten  (*Alarm*) und  (*Zeit*), welche sich an der Unterseite des MEMOdayplanner befinden.



1. Wechseln Sie in den Modus für die Zeiteinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken.
2. Die **Stundenanzeige** blinkt und kann durch Drücken der Taste  geändert werden. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang drücken, können Sie durch die Zahlen scrollen.
3. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Minutenanzeige**. Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
4. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Jahresanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 1 14). Drücken Sie die Taste , um das Jahr einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
5. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Monatsanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 2 06). Drücken Sie die Taste , um den Monat einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
6. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Tagesanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 3 25). Drücken Sie die Taste , um den Tag einzustellen. Indem Sie die Taste

länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie automatisch durch die Zahlen scrollen.



7. Verlassen Sie in den Modus für die Zeiteinstellung, indem Sie die Taste  drücken. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Zeiteinstellung automatisch.)


5. Alarme beim MEMOdayplanner

MEMOdayplanner kann Alarme für Aktivitäten ausgeben, indem ein akustisches Signal ertönt und der Lichtpunkt für den jeweiligen Zeitraum blinkt. Sie können auswählen, ob der Lichtpunkt bei einem Alarm blinken soll oder nicht. Siehe 6.2 *Blinklicht als Hinweis auf einen Alarm*.




Alarme können in einem Zeitraum von 24 Stunden für jede Viertelstunde eingestellt werden. Alle Alarme sind wiederkehrend, d. h. sie werden jeden Tag zur gleichen Zeit wiederholt.

5.1 Einstellen eines Alarms

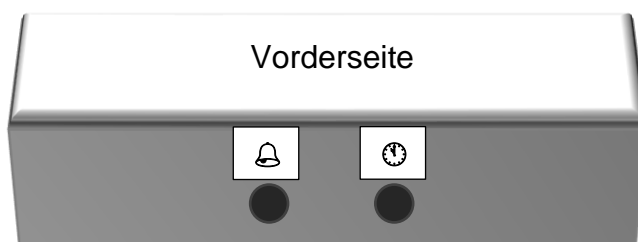Verwenden Sie zum Einstellen eines Alarms die Tasten  (*Alarm*) und  (*Zeit*), welche sich an der Unterseite des MEMOdayplanner befinden.



Vorgangsweise zum Einstellen eines Alarms:



1. Wechseln Sie in den Modus für die Alarmeinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken. Nach diesen 2 Sekunden erlöschen alle Lichtpunkte auf der Lichtsäule, außer jene, für die Alarme eingestellt wurden. Lichtpunkte, für die Alarme eingestellt wurden, bleiben stets eingeschaltet.
2. Scrollen Sie zur gewünschten Zeit mithilfe der Taste . Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie automatisch durch die Lichtpunkte scrollen.
3. Drücken Sie die Taste , um für den ausgewählten Lichtpunkt einen Alarm zu aktivieren. Sobald ein Alarm für einen Lichtpunkt ausgewählt wurde, blinkt dieser schnell.

Drücken Sie die Taste , um den Alarm ein-/auszuschalten.

Schnell blinkend = Alarm eingestellt

Langsam blinkend = kein Alarm



4. Wiederholen Sie die Schritte 2–3 oben, um weitere Alarme einzustellen.

5. Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang, um den Modus für die Alarめinstellung zu verlassen. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Alarめinstellung automatisch.)



Hinweis! Solange Sie sich im Modus für die Alarめinstellung befinden, bleiben die Lichtpunkte für die eingestellten Alarme eingeschaltet. Es können höchstens 96 Alarme eingestellt werden, d. h. jeweils ein Alarm für einen Lichtpunkt.

5.2 Ausschalten eines Alarms

Wenn MEMOdayplanner einen Alarm ausgibt, ertönt 60 Sekunden lang ein hörbarer Piepton und der Lichtpunkt blinkt 15 Minuten lang. Es gibt drei Möglichkeiten, um einen Alarm auszuschalten:

1. **Automatisch.** Warten Sie 60 Sekunden und der Alarm schaltet sich automatisch aus. (Der Lichtpunkt blinkt 15 Minuten lang weiter.)
2. **Drücken Sie den Steuerschalter.** Sie können einen Alarm ausschalten, indem Sie einen Steuerschalter drücken, der an die Alarm-Schaltbuchse an der Rückseite des MEMOdayplanner angeschlossen ist. Siehe *Geräteübersicht*. Alle Steuerschalter mit einem 3,5-mm-Mono-Stecker können verwendet werden. Wenden Sie sich für eine Auswahl von Steuerschaltern an Abilia.
3. **Drücken Sie die Taste .** Ein Alarm kann ausgeschaltet werden, indem die Taste  an der Unterseite des MEMOdayplanner gedrückt wird.






5.3 Überprüfen von eingestellten Alarmen

Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang, um zu sehen, für welche Lichtpunkte ein Alarm eingestellt wurde. Drücken Sie erneut die Taste  2 Sekunden lang, um zum Betriebsmodus zurückzukehren. Im Betriebsmodus wird nicht angezeigt, für welche Lichtpunkte ein Alarm eingestellt wurde.

5.4 Löschen von Alarmen


Befolgen Sie die gleiche Vorgehensweise wie unter 5.1 *Einstellen eines Alarms*, um einen Alarm zu löschen.

Es ist auch möglich, alle Alarme in einem Schritt zu löschen:

1. Wechseln Sie in den Modus für die Alarめinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken.
2. Drücken und halten Sie die beiden Tasten  und  1 Sekunde lang. Ein akustisches Signal ertönt und alle Alarme werden gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang, um den Modus für die Alarめinstellung zu verlassen. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Alarめinstellung automatisch.)

6. Personalisieren des MEMOdayplanner

Verwenden Sie die Schalter 1–3 auf der Rückseite, um den MEMOdayplanner zu personalisieren.

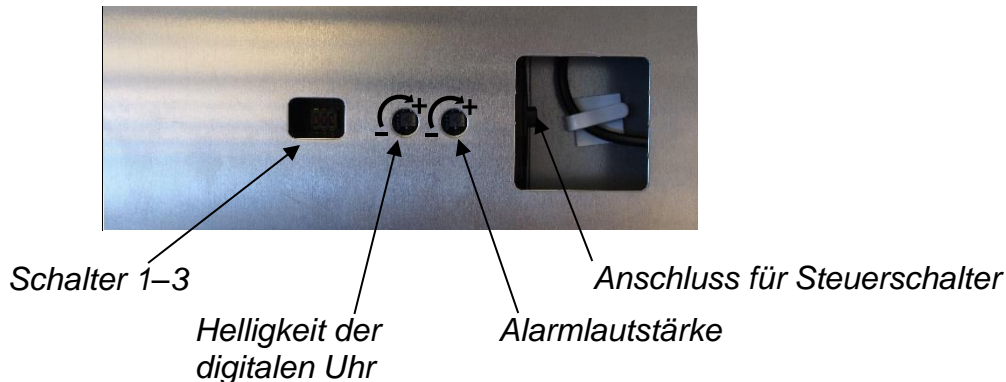

6.1 Zeitanzeige als Lichtsäule oder Lichtpunkt

Die aktuelle Uhrzeit kann auf zwei verschiedene Arten auf dem MEMOdayplanner angezeigt werden: als Lichtsäule oder als Lichtpunkt.

Wird die Lichtsäule gewählt, wird die aktuelle Uhrzeit als eine Säule von Lichtpunkten angezeigt, auf der jede Viertelstunde ein Licht erlischt. Bei der Option mit Lichtpunkten bewegt sich jede Viertelstunde ein Lichtpunkt nach unten, um den aktuellen Zeitpunkt der Tageszeit anzuzeigen.

Verwenden Sie zum Einstellen der Zeitanzeige **Schalter 1**.

Schalter 1 oben = Lichtsäule

Schalter 1 unten = Lichtpunkt

6.2 Blinklicht als Hinweis auf einen Alarm

Sie können wählen, ob die Leuchte, die die aktuelle Uhrzeit anzeigt, blinken soll, wenn ein akustischer Alarm für eine Aktivität ausgegeben wird.

Verwenden Sie **Schalter 2**, um das Blinklicht für einen Alarm einzustellen.

Schalter 2 oben = Blinklicht bei Alarm

Schalter 2 unten = normales konstantes Leuchten bei Alarm

6.3 Digitale Zeitanzeige

Unten auf dem MEMOdayplanner befindet sich eine digitale Uhr. Sie können auswählen, ob die Uhr angezeigt werden soll oder nicht, indem Sie Schalter 3 (siehe Abbildung oben) auf der Rückseite des MEMOdayplanner verwenden.

Verwenden Sie zum Einstellen der digitalen Uhr **Schalter 3**.

Schalter 3 oben = digitale Uhr wird angezeigt

Schalter 3 unten = keine digitale Uhr

6.4 Einstellen der Helligkeit der Lichtsäule/des Lichtpunkts

Die Helligkeit der Lichtsäule/des Lichtpunkts auf dem MEMOdayplanner kann angepasst werden. Die Helligkeit kann für die Tages- und für die Nachtstunden getrennt eingestellt werden. Verwenden Sie dazu einen kleinen Schraubendreher, um die Schrauben auf der Rückseite des MEMOdayplanner einzustellen. Siehe 2. *Geräteübersicht*. Es sind zwei Schrauben für die Tagesanzeige vorhanden, eine für den Morgen und eine für den Nachmittag.

6.5 Anpassen der Helligkeit der digitalen Uhr

Die Helligkeit der digitalen Uhr auf dem MEMOdayplanner kann angepasst werden. Verwenden Sie dazu einen kleinen Schraubendreher, um die Schraube auf der Rückseite des MEMOdayplanner anzupassen. Siehe Abbildung oben.

6.6 Anpassen der Alarmlautstärke

Die Lautstärke des Alarmtons des MEMOdayplanner kann angepasst werden. Verwenden Sie dazu einen kleinen Schraubendreher, um die Schraube auf der Rückseite des MEMOdayplanner einzustellen. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu senken. Siehe Abbildung oben.

6.7 Ändern der Anfangszeit für Tag und Nacht

MEMOdayplanner ist in der Regel so eingestellt, dass die Tagesstunden zwischen 07:00 und 23:00 Uhr angezeigt werden. Die Nachtstunden werden von 23:00 bis 07:00 Uhr angezeigt. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie einen der Magnetstreifen (siehe 11.3 *Ersatz-/Zubehörteile*) anbringen und die Anfangszeit für die Tagesstunden neu einstellen; siehe unten.

Beispiel: Sie möchten, dass die Tagesstunden um 08:00 Uhr beginnen und um 24:00 Uhr enden. Die Nachtstunden werden dann zwischen 24:00 und 08:00 Uhr angezeigt.






Schneiden Sie einen entsprechenden Magnetstreifen (mit 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige oder mit der Symbolanzeige der analogen Uhr) so zu, dass der Punkt auf der Tafel, wo sich „07:00 Uhr“ befindet, durch „08:00 Uhr“ verdeckt wird.



Wenn die Zeitanzeige nicht benötigt wird, verwenden Sie die weißen Magnetstreifen, um die Anzeige auf der Tafel zu verdecken.









Verwenden Sie einen Magnetstreifen, um die Anzeige der Nachtstunden gleichermaßen zu verdecken.

1. Wechseln Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Tasten  und  5 Sekunden lang drücken.
2. Die **Anfangszeit der Tagesstunden** blinkt nun (die Anzeige zeigt z. B. 1 07 an). Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu ändern. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie automatisch durch die Zahlen scrollen.
Wenn die Anzeige „1 08“ anzeigt, bedeutet das, dass die neue Anfangszeit 08:00 Uhr ist.
3. Verlassen Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste  dreimal drücken.
(Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Zeiteinstellung automatisch.)

6.8 Auswählen der 12-/24-Stunden-Uhr

MEMOdayplanner ist in zwei verschiedenen Versionen verfügbar, in der 12- oder in der 24-Stunden-Version. Es besteht die Möglichkeit, MEMOdayplanner vom 12-Stunden- auf den 24-Stunden-Modus umzustellen (und umgekehrt). Befolgen Sie die Anweisungen unten und bringen Sie den entsprechenden Magnetstreifen auf dem MEMOdayplanner an.





MEMOdayplanner ist in der Regel so eingestellt, dass die digitale Uhr auf der 12-Stunden-Version eine 12-Stunden-Anzeige hat und dass die digitale Uhr auf der 24-Stunden-Version eine 24-Stunden-Anzeige hat. Diese Einstellung kann jedoch geändert werden; siehe unten.

1. Wechseln Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Tasten  und  5 Sekunden lang drücken.
2. Drücken Sie die Taste . **12 oder 24** blinkt nun (die Anzeige zeigt z. B. 2 24 an). Drücken Sie die Taste , um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige auf der digitalen Uhr umzuschalten.
3. Verlassen Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste  zweimal drücken.
(Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Zeiteinstellung automatisch.)



6.9 Ändern des Funktionsmodus für die Sommerzeit

MEMOdayplanner kann so eingestellt werden, dass die Sommer- und Winterzeit automatisch eingestellt wird. Diese Einstellung kann gemäß den Normen in der EU oder den USA vorgenommen werden.

MEMOdayplanner ist in der Regel so eingestellt, dass die Sommerzeit gemäß EU-Norm automatisch eingestellt wird. Siehe unten, um diese Einstellung zu ändern.

1. Wechseln Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Tasten  und  5 Sekunden lang drücken.
2. Drücken Sie zweimal die Taste . Der **Funktionsmodus für die Sommerzeit** blinkt nun (die Anzeige zeigt z. B. 3 01 an). Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu ändern.

00 = keine automatische Umstellung auf die Sommerzeit
 01 = automatische Umstellung auf die EU-Sommerzeit
 02 = automatische Umstellung auf die USA-Sommerzeit

3. Verlassen Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste  drücken. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Zeiteinstellung automatisch.)

7. Aufbewahrung

Wenn MEMOdayplanner nicht verwendet wird, sollte das Gerät bei Raumtemperatur im Innenbereich aufbewahrt werden.

8. Reinigung

Wartung:

Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines Mikrofaser-tuchs. Befeuchten Sie das Tuch mit ein wenig Wasser, um Text oder hartnäckige Flecken zu entfernen. Wenn hartnäckige Flecken oder Schmutz nicht entfernt werden können, kann die Kunststoffolie gegen Aufpreis von Abilia getauscht werden.

Tipp!

Lässt sich die Tafel schwer reinigen? Verwenden Sie einen Whiteboard-Marker und zeichnen Sie damit Text und Flecken nach, die sich schwer entfernen lassen. Warten Sie eine Minute, bevor Sie die Markerrückstände abwischen.

9. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Um MEMOdayplanner auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, löschen Sie alle eingestellten Alarme und stellen Sie sicher, dass alle anderen Einstellungen auf die folgenden Werte festgelegt sind:

Zeitanzeige: Lichtsäule

Blinklicht bei Alarm: Ein

Digitale Zeitanzeige: Ein

Lichtsäulenhelligkeit Tag/Nacht: Mittel

Helligkeit der digitalen Uhr und Lautstärke: Mittel

Tag- und Nachtstunden: Tag 07:00–23:00 Uhr, Nacht 23:00–07:00 Uhr

12- oder 24-Stunden-Anzeige je nach Modell

Umstellung auf die Sommerzeit: 01 EU-Sommerzeit

Anweisungen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanweisung. Siehe auch Abschnitt 8. *Reinigung* und 11.2 *Lieferumfang*.

10. Sicherheit und Haftung

Abilia hat eine Risikoanalyse für das Produkt nach EN 14971 für Medizingeräte durchgeführt. Die Gebrauchsanweisung und technischen Daten für das Gerät wurden im Hinblick auf die in diesem Dokument ausgeführten Sicherheitsbewertungen ausgearbeitet.

Es ist immer wichtig, beim erstmaligen und weiteren Gebrauch des Produkts an die Sicherheit zu denken. Es ist nicht möglich, im Rahmen der Gebrauchsanweisung sämtliche Situationen zu beschreiben, in denen das Produkt nicht verwendet werden darf. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß eingestellt und in Gebrauch genommen haben, fragen Sie Ihren Lieferanten.

Abilia haftet nicht für Verluste, Schäden und Folgeschäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Kontrolle, unsachgemäße Einstellung, fehlerhafte Verbindung oder andere missbräuchliche Verwendung des Geräts zurückzuführen sind. Die finanzielle Haftung von Abilia ist in jedem Fall auf den Wert des Produkts selbst beschränkt.

11. Technische Daten

11.1 Umgebung

MEMOdayplanner ist nur für den Innengebrauch bestimmt.

11.2 Lieferumfang

Artikel-Nr.	Name	Beschreibung	Menge
	MEMOdayplanner 3	12-Stunden- oder 24-Stunden-Version	1 Stück
	Netzadapter		1 Stück
	Whiteboard-Marker		3 Stück
	Mikrofasertuch	für die Reinigung	1 Stück
	Schraubendreher	für die Anpassung der Helligkeit/Alarmlautstärke	1 Stück
	Schrauben/Dübel mit Bohrschablone	für die Wandbefestigung	1 Set
	Gebrauchsanweisung		1 Stück
	Kurzanleitung		1 Stück
	Ideenheft		1 Stück

11.3 Ersatz-/Zubehörteile

Artikel-Nr.	Name
508785	Anpassungsset für MEMOdayplanner 3
508786	Zubehör-Set für MEMOdayplanner 3
508787	Magnetstreifen, ohne Aufdruck (zum Verdecken von Informationen)
508788	Magnetstreifen, 24-Stunden-Anzeige
508789	Magnetstreifen, 12-Stunden-Anzeige
508790	Magnetstreifen, Uhr
508794	Tischständer für MEMOdayplanner 3
508795	Stiftablage für MEMOdayplanner 3
508796	Abschließbare Tür für MEMOdayplanner 3
	Optionaler Steuerschalter (wenden Sie sich an Abilia)
508800	Netzadapter für MEMOdayplanner 3

Weitere Informationen finden Sie im Ideenheft.

11.4 Technische Daten

Größe (H x B x T):	713 x 392 x 32 mm
Gewicht:	4,1 kg
Netzanschluss:	9 V Wechselstrom, 1 A

Verwenden Sie nur den Original-Netzadapter!

11.5 Konformität mit der Medizinprodukterichtlinie

MEMOdayplanner wird als technisches Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung vertrieben und erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG einschließlich der relevanten Anforderungen für EMV, elektrische Sicherheit und der Risikoanalyse.

11.6 Recycling von Elektromüll

Dieses Produkt enthält elektrische Komponenten, die am Ende der Lebensdauer des Produkts recycelt werden müssen. Bringen Sie es zu einem Recyclinghof, der Elektromüll annimmt.





Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

