

Handbuch für HandiCalendar iOS und Android

Artikel-Nr. 706380



HandiCalendar iOS: Version 2.4 oder neuer
HandiCalendar Android: Version 2.0 oder neuer

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Begriffserklärung	4
1.3 myAbilia	5
1.4 Bildarchiv in HandiCalendar	6
1.5 Sprachausgabe in HandiCalendar	6
1.6 Aktivitätstypen in HandiCalendar	6
1.7 Das Prinzip der Viertelstunden-Uhr	8
2. Installation und Lizenz	8
2.1 Installation	8
2.2 Updates	8
2.3 Lizenzverwaltung	9
4. Erste Schritte mit HandiCalendar	10
4.1 Anmeldung bei HandiCalendar	10
4.2 Sprachausgabe installieren (Android)	10
4.3 Hinzufügen des Einstiegspakets	10
4.4 HandiCalendar anpassen	10
5. Kalenderfunktionen	11
5.1 Kalender-Anzeige	11
5.2 Aktivitätsanzeige	14
5.3 Alarmer und Erinnerungen	17
5.4 Aktivität hinzufügen	18
5.5 Aktivität abhaken	24
5.6 Timer starten	25
5.7 Aktivität/Timer bearbeiten	25
5.8 Aktivität/Timer löschen	26
5.9 Bearbeiten-Anzeige	27
5.10 Uhr-Anzeige	31
5.11 Aktivität suchen	32
6. Einstellungsmenü	33
6.1 Schutz durch Code	33
6.2 Kalender-Anzeige	33
6.3 Aktivitätsanzeige	34
6.5 Bearbeiten-Anzeige	36
6.6 Info-Menü	36
6.7 Kalender-Menü	37

6.8 Zeitanzeige	37
6.9 Zeiteingabe (Android)	38
6.10 Uhr-Anzeige.....	39
6.11 Monatsansicht	40
6.12 Wochenansicht	40
6.13 Timer starten	40
6.14 Standardaktivitäten	41
6.15 Standardtimer	41
6.16 Kategorien	42
6.17 Alarmklang.....	42
6.18 Alarm-Anzeige (Android)	43
6.19 Sprachgaube	43
6.20 Protokolle (Android)	44
6.21 Über HandiCalendar (Android)	44
6.22 Abmelden	44
7 HandiCalendar auf Apple Watch (iOS)	45
7.1 Funktionsübersicht	45
7.2 Alarmer auf Apple Watch	45
7.3 Installation	45
8. Sicherheit und Haftung	46
9. Voreinstellungen	47

1. Einleitung

HandiCalendar ist eine Hilfe für Zeit und Planung auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet. Die Anwendung ist für Personen gedacht, die nach einer erweiterten Zeitunterstützung in einem einfach zu bedienenden Kalender suchen.

HandiCalendar eröffnet folgende Möglichkeiten:

- noch übersichtlicherer Kalender mithilfe von Bildern
- Anzeige eines Countdowns bei Start bzw. Ende von Aktivitäten mittels "Punkten"
- Vorlesen von Texten (Sprachsynthese)
- eindeutigere Alarmer bei Start/Ende von Aktivitäten
- einfacheres Hinzufügen von Aktivitäten
- vordefinierte Aktivitäten und Timer
- kontrollierbare Aktivitäten für bessere Gedächtnisstützen und Erinnerungen

Dieses Handbuch beschreibt *HandiCalendar für iOS* und *HandiCalendar für Android*. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Anwendungen.

- Beide stimmen hinsichtlich des Funktionsumfangs weitgehend überein, auf Abweichungen wird deutlich aufmerksam gemacht.
- Die Darstellung der Kalenderfunktionen ist in beiden weitgehend die gleiche. Abweichungen gibt es lediglich bei den Bearbeitungs- und Einstellungsfunktionen.
- Die Screenshots in diesem Dokument entsprechen der App *HandiCalendar für Android*.

Dieses Handbuch erläutert die Installation und die ersten Schritte mit HandiCalendar. Es enthält ferner eine ausführliche Beschreibung der Grundlagen, Funktionen und Einstellungen von HandiCalendar.

Zusätzliche Unterlagen wie die **Kurzanleitung** und die **Anleitung zur Personalisierung** können Sie herunterladen unter www.abilia.com. Verwenden Sie den QR-Code auf der Rückseite für einen einfachen Zugang.

1.1 Begriffserklärung

In diesem Handbuch werden folgende Begriffe verwendet.

Gerät



iPhone, iPad oder iPod Touch



Smartphone oder Tablet auf Android-Basis

HandiCalendar

Die in diesem Handbuch beschriebene Kalenderanwendung gilt für



myAbilia



Ein Webdienst für HandiCalendar und andere Produkte von Abilia. myAbilia ist zugänglich über www.myAbilia.com.

Benutzerkonto

Die Verwendung von HandiCalendar setzt ein Benutzerkonto bei myAbilia voraus.

Lizenz

Die Verwendung von HandiCalendar setzt (nach Ablauf einer vierwöchigen Testphase) den Erwerb einer Lizenz voraus.

Einstellungsmenü

Hier nehmen Sie die Einstellungen für HandiCalendar vor; siehe 6. *Einstellungsmenü*

1.2 Kompatibilität



HandiCalendar für iOS kann auf einem iPhone, iPad und iPod Touch installiert werden und bietet eine App für Apple Watch. Benötigt iOS 10.0 oder höher.



HandiCalendar für Android kann auf Geräten mit Android ab Version 5.0 installiert werden.



myAbilia ist mit allen Webbrowsern kompatibel (Internet Explorer: Version 11).

1.3 myAbilia

myAbilia ist ein Webservice für HandiCalendar und andere Produkte von Abilia.

Mit der Nutzung von myAbilia können Sie:

- den Kalender, die Checklisten und das Bildarchiv vom Computer und/oder Tablet etc. aus verwalten.
- Hilfspersonen auswählen, die über das Internet z. B. Erinnerungen hinzufügen oder bearbeiten können.

Sie müssen ein Benutzerkonto bei myAbilia haben, um HandiCalendar zu verwenden. Sie müssen jedoch nicht den tatsächlichen Webservice verwenden oder Ihr Gerät mit dem Internet verbinden (ausgenommen bei der Anmeldung).

1.3.1 Rollen in myAbilia

Sie können je nach Zweck des Kontos verschiedene Arten von Konten in myAbilia haben. Der **Anwender**, d. h. die Person, die das Hilfsmittel verwendet, steht immer im Mittelpunkt. Der Anwender benötigt möglicherweise Unterstützung von einer Hilfsperson, um seinen Kalender etc. zu verwenden. Abhängig vom Betrieb ist möglicherweise ein **Kontoadministrator** erforderlich. Das ist eine Person, die das Konto und die Lizenzen verwaltet, ohne Zugriff auf die persönlichen Daten des Anwenders zu erhalten.

Abhängig von Ihrer Rolle erhalten Sie unterschiedliche Anmeldeinformationen für myAbilia und können verschiedene Aufgaben im Webservice durchführen.

Rolle	Beschreibung	Funktionen
Anwender	Die Person, die das Hilfsmittel verwendet. Diese Person muss im Webservice nicht aktiv sein, jedoch ein Konto haben, das mit dem Hilfsgerät verknüpft ist.	Kalender, Standardaktivitäten, Standardtimer, Bildarchiv, Checkliste, Profil, Lizenzen, Hilfspersonen, Kontoadministratoren
Hilfsperson	Eine oder mehrere Personen, die den Anwender bei der Verwendung des Hilfsmittels unterstützen.	Gleich wie oben
Administrator	Die Person, die das Benutzerkonto und die Lizenzen erstellt bzw. verwaltet. Dies kann auch eine Hilfsperson sein.	Benutzerkonten: Profil, Hilfspersonen, Kontoadministratoren

1.3.2 Adapt myAbilia

Unter **Mein Profil|Module** in myAbilia können Sie auswählen, welche Module in myAbilia angezeigt werden sollen. Wenn Sie dasselbe myAbilia-Konto für verschiedene Geräte verwenden (z. B. für HandiCalendar und MEMOplanner), können Sie auswählen, welcher Kalender angezeigt werden soll.

1.3.3 myAbilia-Kalender teilen

Durch die Erstellung eines Abo-Links (ICS) für den myAbilia-Kalender kann dieser in anderen Kalenderanwendungen, wie etwa Outlook und Google, angezeigt werden. Anweisungen sind auf myAbilia verfügbar.

1.4 Bildarchiv in HandiCalendar

Auf myAbilia sind die folgenden Bilderdatenbanken vorhanden, die in HandiCalendar hinzugefügt werden können:



Handi-Bilder

Etwa 160 Bilder, die ursprünglich von der Ressourceneinheit AIR an der psychiatrischen Abteilung der Sahlgrenska-Universitätsklinik in Göteborg erstellt wurden. Die Bilderdatenbank wurde 2014 vom Zeichner Andreas Högberg ergänzt.



Rolltalk-Bilder

Etwa 60 Bilder von der Bilderdatenbank, die zur Rolltalk-Kommunikationshilfe gehört.



Smileys

20 Smiley-Bilder, die speziell für Handi entwickelt wurden




Standard-Bilder



84 Piktogramme und PCS-Bilder.


Über *myAbilia* können Sie das Bildarchiv individuell anpassen. Beispielsweise können Sie Ihre eigenen Fotos oder mehr Bilder von der *myAbilia*-Bilderdatenbank hinzufügen.

1.5 Sprachausgabe in HandiCalendar

HandiCalendar verfügt über eine eingebaute Sprachunterstützung. Diese bietet die Möglichkeit, sich den Text in HandiCalendar mittels Sprachsynthese vorlesen zu lassen.

Sie können einstellen, ob und wie Sie die Sprachunterstützung nutzen möchten; siehe 6.19 *Sprachgaube*. Wenn Sprachausgabe ausgewählt ist, wird die Taste *Sprachausgabe*  angezeigt. Um die Vorlesefunktion zu nutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie die Sprachausgabe, indem Sie auf diese Taste  tippen:
2. Tippen Sie auf den gewünschten Text, z. B. das Datum oder die Uhrzeit.
3. Um die Sprachausgabe zu deaktivieren, tippen Sie erneut auf die Taste . (Automatische Deaktivierung nach wenigen Sekunden.)

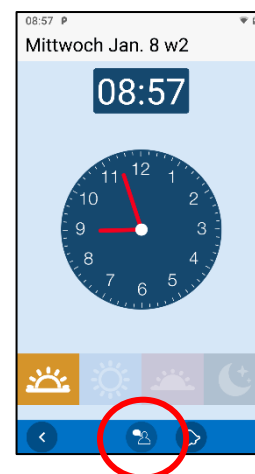

1.6 Aktivitätstypen in HandiCalendar

Es gibt verschiedene Aktivitätstypen in HandiCalendar und diese können unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Die verschiedenen Typen werden in diesem Kapitel beschrieben.

Zeitlich festgelegte Aktivitäten	Zeitlich festgelegte Aktivitäten haben immer eine Startzeit, können jedoch auch eine Endzeit haben.
----------------------------------	---

	<p>Wenn die Aktivität eine Endzeit hat, wird die „Länge“ bzw. Dauer der Aktivität auf dem Zeitstrahl angezeigt. Dies dient als visuelle Zeitunterstützung.</p> <p>In der Listenanzeige wird die Start- und Endzeit als Klartext angezeigt.</p>
Zeitlich festgelegte Aktivitäten mit Erinnerung	<p>Zeitlich festgelegte Aktivitäten können zu einem oder mehreren Zeitpunkten vor deren Beginn Erinnerungen erhalten.</p> <p>In der Listenanzeige werden die Erinnerungen im Klartext angezeigt.</p>
Zeitlich festgelegte Aktivitäten mit Alarm	<p>Bei Beginn und Ende einer zeitlich festgelegten Aktivität wird normalerweise ein Alarm mit Ton und/oder Vibration (sofern das Gerät über die Vibrationsfunktion verfügt) ausgegeben. Sie können wählen, ob der Alarm stumm sein soll oder ob überhaupt kein Alarm ausgegeben werden soll.</p>
Ganztägige Aktivitäten	<p>Ganztägige Aktivitäten haben keine Startzeit (und können folglich nicht mit einem Alarm versehen werden). Sie werden getrennt von den zeitlich festgelegten Aktivitäten angezeigt.</p>
Kontrollierbare Aktivitäten	<p>Mit „kontrollierbar“ ist gemeint, dass die betreffende Aktivität nach Beendigung über ein Kontrollkästchen „abgehakt“ werden muss. Es können sowohl zeitlich festgelegte als auch ganztägige Aktivitäten kontrollierbar gemacht werden.</p> <p>Wird eine zeitlich festgelegte Aktivität nicht abgehakt, erhalten Sie so lange Erinnerungen, bis Sie die Aktivität abgehakt haben (bis zu zwei Stunden).</p>
Aktivitäten mit Zusatzinformationen	<p>Sie können Zusatzinformationen mit einer Aktivität verknüpfen, entweder eine Checkliste oder einen Hinweis.</p> <p>Eine Checkliste kann eine gute Idee sein, wenn Sie eine Aktivität in mehrere Schritte oder Aufgaben unterteilen müssen, z. B. Morgenroutinen oder To-do-Listen. Die Checkliste kann direkt in der Aktivität erstellt werden. Sie können auch aus ausgefüllten Checklisten auswählen, die über <i>myAbilia</i> erstellt werden.</p>
Timer	<p>„Timer“ bezieht sich auf eine Aktivität, die direkt mit dem Hinzufügen beginnt und für die zugleich ein Alarm für die Endzeit gesetzt wird. Ein Timer funktioniert also in etwa wie eine „Eieruhr“.</p>
Wiederkehrende Aktivitäten	<p>Aktivitäten können so hinzugefügt werden, dass sie jede Woche (an einem oder mehreren Wochentagen), jede zweite Woche, monatlich (an einem oder mehreren Tagen) und jährlich wiederholt werden.</p>
Standardaktivitäten	<p>Eine „Standardaktivität“ bezieht sich auf eine vordefinierte Aktivität, die verwendet wird, wenn Sie neue Aktivitäten hinzufügen. Sie können einen Namen, ein Bild, eine Checkliste, eine Erinnerung etc. zur Standardaktivität hinzufügen.</p> <p>Die Verwendung von Standardaktivitäten erleichtert das Hinzufügen von neuen Aktivitäten.</p> <p>Standardaktivitäten werden in HandiCalendar (siehe Kapitel 6.14 <i>Standardaktivitäten</i>) oder über <i>myAbilia</i> angelegt.</p>
Standardtimer	<p>Ein „Standardtimer“ bezieht sich auf einen vordefinierten Timer, der ein Bild und/oder einen Namen sowie eine voreingestellte Zeit enthält. Standardtimer werden in der Liste nach Namen und eventuell durch ein Symbol angezeigt.</p> <p>Durch die Verwendung von Standardtimern können Timer einfacher gestartet werden.</p> <p>Standardtimer werden in HandiCalendar (siehe Kapitel 6.15 <i>Standardtimer</i>) oder über <i>myAbilia</i> angelegt.</p>

1.7 Das Prinzip der Viertelstunden-Uhr

Das "Das Prinzip der Viertelstunden-Uhr" bezieht sich auf die **Viertelstunden-Uhr**, ein 1993 entwickeltes Zeit-Hilfsmittel, das nunmehr die Grundlage für die kognitiven Hilfsprodukte von Abilia bildet.



Die *Viertelstunden-Uhr* funktioniert so, dass anhand einer bestimmten Anzahl von Punkten bis zum Beginn eines bestimmten Ereignisses heruntergezählt wird ("Countdown"). Ist der geplante Zeitpunkt eingetroffen, wird ein Alarm aktiviert.

Das Prinzip der *Viertelstunden-Uhr* zusammengefasst:

- Countdown bis zu einem Ereignis
- Feste, zählbare Schritte
- Die Punkte verschwinden von oben nach unten
- 1 Punkt = 15 Minuten = "Eine Viertelstunde"
- Mehr als 8 Punkte = "Eine lange Zeitspanne"



Die *Viertelstunden-Uhr* ist eine Hilfestellung, indem sie die "unsichtbare" Zeit sichtbar macht

- Zeigt die Zeit als Menge an
- Es ist für jeden nachvollziehbar, was **mehr** und **weniger** ist. Wenn ein Punkt "**verschwindet**", ist klar, dass weniger Zeit verbleibt als zuvor.
- Der Begriff "Punkt" kann in die Alltagssprache aufgenommen werden
- Keine Notwendigkeit, in Stunden und Minuten zu denken
- Der verständliche Begriff "Punkt" fördert das Zeitgefühl

2. Installation und Lizenz

2.1 Installation

Der HandiCalendar kann **kostenlos** aus dem App Store installiert werden.

1. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie nach *HandiCalendar*.
3. Installieren Sie die App.

Die Verwendung von HandiCalendar setzt ein **Benutzerkonto** bei myAbilia voraus. Erstellen Sie das Benutzerkonto auf myAbilia.com.

Die App kann vier Wochen lang kostenlos genutzt werden, danach ist eine **Lizenz** erforderlich. Die Lizenz wird von Abilia erworben und auf myAbilia.com registriert.

2.2 Updates

Aktualisierungen von HandiCalendar werden über die Systemeinstellungen des Geräts vorgenommen:



Siehe *Einstellungen|Allgemeines|Aktualisierung im Hintergrund*



Siehe *Google Play|Einstellungen*

2.3 Lizenzverwaltung

Beim Kauf von HandiCalendar wird ein Lizenzgutschein ausgestellt, auf dem Lizenzschlüssel und Lizenzdauer vermerkt sind.

Der Lizenzschlüssel muss auf das Benutzerkonto registriert werden; siehe die Anleitung unten.

Sie werden in HandiCalendar rechtzeitig im Voraus gewarnt, wenn die Lizenz auf das Ende der Gültigkeitsdauer zugeht (3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage). Hilfspersonen und Administratoren erhalten eine Erinnerung per E-Mail, dass die Lizenz bald abläuft und verlängert werden muss.

Wenn die Lizenz abgelaufen ist, werden Sie von HandiCalendar abgemeldet. Dabei bleiben jedoch sämtliche Daten auf dem Benutzerkonto erhalten, so dass Sie HandiCalendar nach der Lizenzverlängerung wie gewohnt weiter nutzen können.

2.3.1 Registrieren des Lizenzschlüssels



1. Melden Sie sich im Benutzerkonto an, gehen Sie zu Mein Profil und wählen Sie die Registerkarte Lizenzen.
2. Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen und geben Sie den Lizenzschlüssel ein.
HandiCalendar wird automatisch mit den Lizenzdaten aktualisiert, sofern das Gerät eine Internetverbindung hat.

2.3.2 Lizenzdaten

Das Ablaufdatum der Lizenz wird auf dem Gerät sowie auf myAbilia angezeigt.



Melden Sie sich im Benutzerkonto an, gehen Sie zu Mein Profil und wählen Sie die Registerkarte Lizenzen.



Rufen Sie die App *Einstellungen* auf und wählen Sie *HandiCalendar*.



Rufen Sie die App *HandiCalendar* auf, gehen Sie in die *Einstellungen* und weiter in *Über Handi*.

2.3.3 Lizenz verlängern

Um die Lizenz ab dem Ablaufdatum um einen weiteren Zeitraum zu verlängern, müssen Sie bei Abilia den Artikel *706382 HandiCalendar Verlängerung* bestellen. Der Lizenzschlüssel muss bei der Bestellung angegeben werden.

Danach wird Abilia die Lizenz entsprechend den Bedingungen verlängern. Sobald dies geschehen ist, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung angezeigt.

4. Erste Schritte mit HandiCalendar

Dieses Kapitel setzt voraus, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, dass HandiCalendar auf Ihrem Gerät installiert ist und dass Sie ein Benutzerkonto eingerichtet haben.

4.1 Anmeldung bei HandiCalendar

Starten Sie HandiCalendar auf Ihrem Gerät und geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Benutzerkonto ein.

Um HandiCalendar nutzen zu können, müssen Sie immer angemeldet sein. Wenn Sie sich abmelden, verschwinden alle HandiCalendar-Daten vom Gerät, bleiben aber in Ihrem Benutzerkonto gespeichert. Sie können sich über Einstellungen abmelden; siehe 6.22 *Abmelden* 6.22 .

4.2 Sprachausgabe installieren (Android)



Nach der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Stimmen für die Sprachausgabe herunterzuladen. Wählen Sie die gewünschte(n) Stimme(n) aus und tippen Sie auf *Weiter*. Sie können den Download am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Beachten Sie, dass neue Stimmen auch über Einstellungen heruntergeladen werden können; siehe 6.19 *Sprachgaube*.

4.3 Hinzufügen des Einstiegspakets

Bei einem komplett neuen Benutzerkonto können Sie ein Einstiegspaket hinzufügen. Dieses enthält ein Standard-Bildarchiv und Beispiele für Standardaktivitäten, Standardtimer und Checklisten.

Das Einstiegspaket kann später über *myAbilia* oder direkt in HandiCalendar angepasst werden.

4.4 HandiCalendar anpassen

HandiCalendar bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, um verschiedenen Benutzern gerecht zu werden. Alle Einstellungen werden über das Einstellungsmenü ausgewählt; siehe 6. *Einstellungsmenü*.

Ziehen Sie die **Anleitung zur Personalisierung** zu Rate, um Einzelheiten über die gewünschten Einstellungen zu erfahren. Laden Sie sie auf www.abilia.com herunter oder verwenden Sie den QR-Code auf der Rückseite für einen einfachen Zugang.

5. Kalenderfunktionen

Der Kalender verschafft Ihnen einen Überblick über den Tag, die Woche und den Monat. Sie erhalten eine Erinnerung, wenn etwas beginnt oder endet. Mit einer Erinnerungshilfe können Sie sehen, ob Sie bestimmte Aufgaben erledigt haben.

5.1 Kalender-Anzeige

Kalender-Anzeige bezieht sich auf die Anzeige der im Kalender gespeicherten Aktivitäten. Dabei gibt es vier Ansichten:


Zeitachsen-
Ansicht



Listenansicht




Wochenansicht

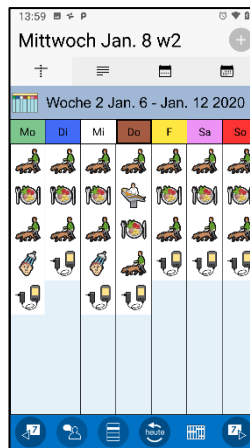



Monatsansicht

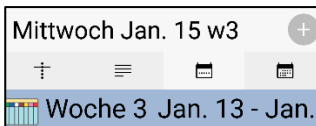

Mithilfe der jeweiligen Symbole können Sie zwischen den Ansichten wechseln:



Das Hinzufügen neuer Aktivitäten erfolgt über die Taste  oder das Kalender-Menü . Wenn Sie eine Aktivität antippen, werden ihre Details angezeigt; siehe 5.2 *Aktivitätsanzeige*.

Die Reihe an verschiedenen Tasten in der *Kalender-Anzeige* setzt sich folgendermaßen zusammen:



Um einen Tag / eine Woche / einen Monat rückwärts blättern.




Zum heutigen Datum oder zur aktuellen Uhrzeit gehen. (Wird nur angezeigt, wenn Sie zu einem anderen Tag geblättert haben oder wenn die nächste Aktivität nicht am Anfang der Liste angezeigt wird).



Gehen Sie ins Kalender-Menü, um andere Funktionen zu starten oder um Einstellungen zu bearbeiten; siehe 5.1.5 *Kalender-Menü*.



 Für den Fall, dass ein Alarm verpasst wurde, erscheint auf der Taste *Menü* ein roter Punkt; siehe 5.3.1 *Verpasste Alarme*.



Sprachausgabe. Drücken Sie die Taste und anschließend auf das Element, das vorgelesen werden soll.



Um einen Tag / eine Woche / einen Monat vorwärts blättern.



Die *Kalender-Anzeige* lässt sich auf vielfältige Weise anpassen; siehe 6.2 *Kalender-Anzeige* sowie 6.8.

5.1.1 Zeitachsen-Ansicht


Die *Zeitachsen-Ansicht* zeigt die Aktivitäten des Tages neben einer "Zeitsäule", bei der jeder Punkt eine Viertelstunde darstellt.

Die Zeit wird für jede Stunde digital angezeigt, eine rote Linie steht für die aktuelle Uhrzeit.

Aktivitäten ohne Endzeit werden mit einer Länge von 30 Minuten angezeigt.

Gibt es mehr Aktivitäten, als auf dem Bildschirm gleichzeitig Platz haben, sind die Symbole *Mehr anzeigen* ( und ) zu sehen. Wischen Sie nach oben/unten, um alle Aktivitäten zu sehen.

Wenn Sie eine Aktivität antippen, die Aktivitätsanzeige aufgerufen; siehe 5.2 Aktivitätsanzeige.

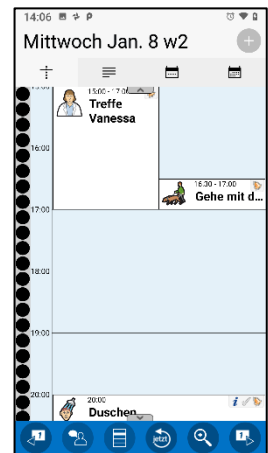


Anzeige der Zeitsäule



Es ist möglich, die Zeitsäule mit einem kleinen oder großen Zoom einzustellen; siehe 6.2 *Kalender-Anzeige*. Mit dem kleinen Zoom sehen Sie einen größeren Ausschnitt des Tages, dafür sind Bilder und Text kleiner. Mit dem großen Zoom sind die Bilder und der Text größer, dafür ist der angezeigte Ausschnitt des Tages kleiner.



Durch Tippen auf  können Sie hinein- bzw. herauszoomen, d. h. die Zeitsäule vergrößern oder verkleinern, so dass in derselben Ansicht ein größerer/kleinerer Ausschnitt des Tages angezeigt wird. Es gibt vier Zoomschritte.

5.1.2 Listenansicht

Die *Listenansicht* zeigt die im Kalender eingetragenen Aktivitäten in der Reihenfolge an, in der sie im Laufe des Tages stattfinden sollen.

Bereits zurückliegende Aktivitäten sind ausgeblendet. Wischen Sie nach unten, um auch sie zu sehen.




5.1.3 Wochenansicht


Die *Wochenansicht* zeigt die Aktivitäten für die ganze Woche.

Für die einzelnen Tage scheinen die Aktivitäten in der geplanten Reihenfolge auf.

Indem Sie auf eine Aktivität tippen, wird die *Aktivitätsanzeige* aufgerufen.



Um zur Stundenanzeige zu wechseln, tippen Sie auf . Dadurch sehen Sie nicht die geplanten Aktivitäten, sondern eine Übersicht über freie/verplante Zeit.

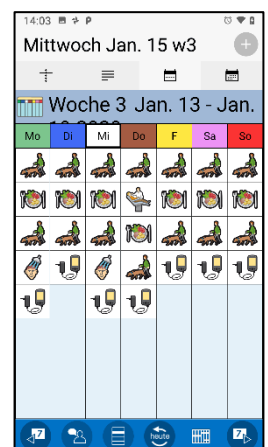

5.1.4 Monatsansicht

Die *Monatsansicht* zeigt die Aktivitäten für den ganzen Monat.


Tage mit Markierungen sind solche, an denen Aktivitäten eingetragen sind.



Die Aktivitäten eines bestimmten Tages werden in einer Listenansicht angezeigt.



5.1.5 Kalender-Menü

Drücken Sie die Taste *Menü*  in der Kalender-Anzeige, um das Kalender-Menü aufzurufen. Sie können einstellen, was im Kalender-Menü angezeigt werden soll; siehe 6.7.

Von hier aus starten Sie weitere Kalender-Funktionen oder gehen zum *Einstellungsmenü*.



5.1.6 Feiertage

Der Kalender kann **Feiertage** und **besondere Tage** anzeigen. Ein gesetzlicher Feiertag ist ein arbeits- und schulfreier Tag. Ein besonderer Tag ist kein gesetzlicher Feiertag, also nicht arbeitsfrei. Ein Beispiel ist der Gründonnerstag.

Die gesetzlichen Feiertage sind für jedes Land individuell. Für Großbritannien werden die folgenden Feiertage und besonderen Tage angezeigt:

Neujahr
Heilige Drei Könige
Valentinstag
St. David's Day
St. Patrick's Day
Muttertag
Gründonnerstag
Karfreitag

Ostersonntag
Ostermontag
St. George's Day
Maifeiertag
Early May
Frühlingsbeginn
Vatertag
Late Summer

Allerheiligen
Bonfire Night
Remembrance Day
Andreastag
Erster
Weihnachtsfeiertag
Zweiter
Weihnachtsfeiertag
Silvester

Feiertage und besondere Tage werden je nach Ansicht unterschiedlich angezeigt:



Sie können festlegen, ob Feiertage angezeigt werden sollen; siehe 6.8.4 .


5.2 Aktivitätsanzeige

Die *Aktivitätsanzeige* zeigt ausführlichere Informationen zur Aktivität an. Um sie aufzurufen, tippen Sie in der *Kalender-Anzeige* auf die entsprechende Aktivität.





Ein Countdown bis zum Beginn der Aktivität wird in Form von "Punkten" angezeigt; siehe 1.7 *Das Prinzip der Viertelstunden-Uhr*.

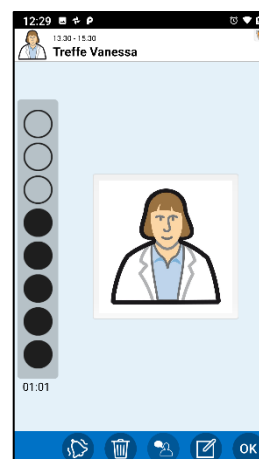Das Bild kann durch Antippen im Vollbildmodus angezeigt werden.

Siehe die Beschreibung der **verbundenen Funktionen** unten.



Die Reihe an verschiedenen Tasten setzt sich folgendermaßen zusammen:

-  Schaltfläche *Kontrollieren*. Um die Aktivität abzuheben, tippen Sie auf die Schaltfläche *Kontrollieren*.
-  Schaltfläche *Alarm*. Um den gewünschten Alarmklang einzustellen, drücken Sie die Schaltfläche *Alarm*; siehe 5.9.12 *Alarm*. (Kann auch über Anzeige bearbeiten erfolgen).
-  Schaltfläche *Löschen*. Um die Aktivität zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Löschen*, siehe Kapitel 5.8 *Aktivität/Timer löschen*.
-  Schaltfläche *Bearbeiten*. Um Änderungen an den Einzelheiten einer Aktivität vorzunehmen, drücken Sie die Schaltfläche *Bearbeiten*, siehe Kapitel 5.9.


Sie können einstellen, welche Tasten und Schaltflächen zu sehen sein sollen; siehe Kapitel 6.3.

5.2.1 Verknüpfter Hinweis, Sprachhinweis, Timer

Ein Hinweis kann durch Betätigen der Taste *Sprachausgabe* laut vorgelesen werden.

Ein Sprachhinweis kann laut abgespielt werden, indem Sie auf die Taste *Abspielen* tippen.

Ein voreingestellter Timer startet, indem Sie auf die Taste *Timer starten* tippen.

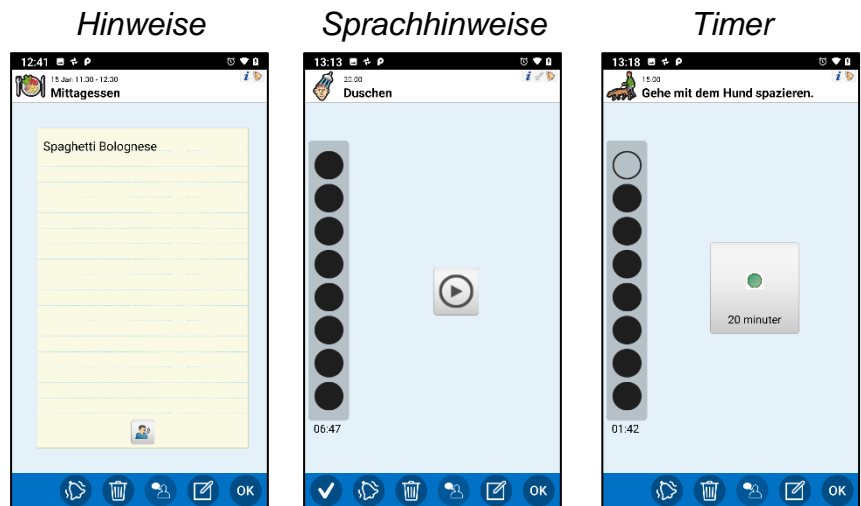


5.2.2 Verknüpfte Checkliste

Die Aufgaben der Checkliste werden mit Text und/oder Bild für jede Aufgabe angezeigt.

Tippen Sie auf ein Bild, um es im Vollbildmodus zu sehen.

Sie können ausgeführte Aufgaben abhaken, indem Sie sie antippen; sie erhalten dann ein ✓ Symbol.


Checkliste

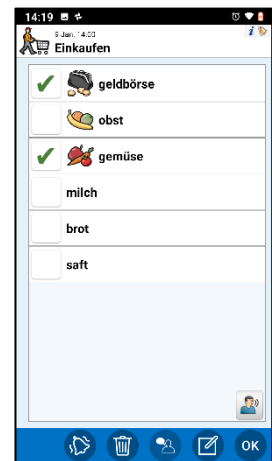


5.2.3 Verknüpfte Systemfunktion

“Systemfunktionen” sind eingebaute Funktionen des Telefons, u. a. *Foto*, *SMS*, *Link*, *Adressen* und *Telefonnummer*.

Eine Adresse wird in der bevorzugten Kartenanwendung auf dem Gerät geöffnet.

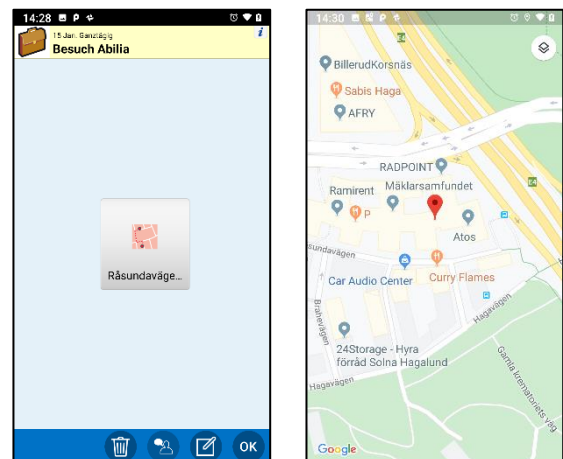

Ein Link wird in einer bevorzugten Webbrowser-Anwendung auf dem Gerät geöffnet.


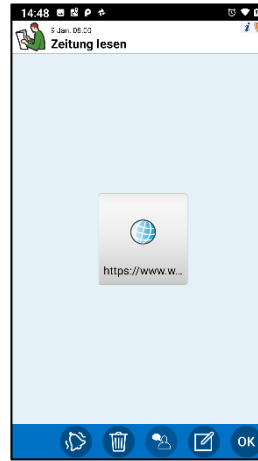


5.2.4 Verknüpfte Anwendungen von Drittanbietern (Android)



Anwendungen von *Drittanbietern* sind solche, die über Google Play heruntergeladen wurden, z. B. Reiseplaner, Hörbuch-Reader, News, Spotify und Facebook.

Eine Drittanbieteranwendung wird geöffnet, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche tippen.

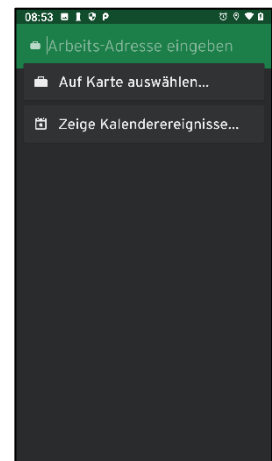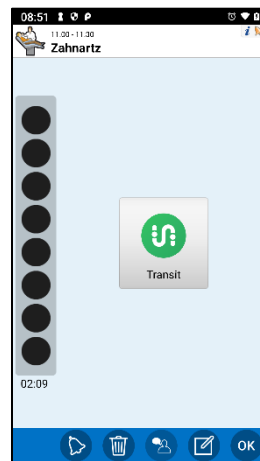

5.3 Alarme und Erinnerungen

Die *Alarm-Anzeige* wird angezeigt, wenn eine oder mehrere Aktivitäten entweder starten oder enden. Sie kann auch als Erinnerung angezeigt werden, bevor eine Aktivität beginnt, oder wenn Sie vergessen haben, eine Aktivität abzuhaken.




Sofern Sie sich nicht bereits in HandiCalendar befinden, wird eine **Benachrichtigung** auf dem Gerät angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die *Alarm-Anzeige* zu öffnen.

Wenn Sie ein langes Alarmsignal wünschen, müssen Sie einen langen Alarmton auswählen; siehe *6.17 Alarm*.



Je nach Einstellung (siehe *6.18 Alarm-Anzeige (Android)*) wird die **Alarm-Anzeige oder eine Benachrichtigung** angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die *Alarm-Anzeige* zu öffnen.

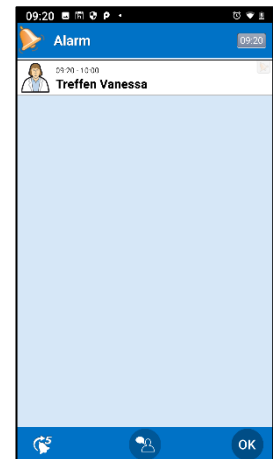

Wenn es sich um einen Alarm für eine kontrollierbare Aktivität handelt, können Sie die Aktivität in der *Aktivitätsanzeige* abhaken.

5.3.1 Verpasste Alarme (iOS)




Verpasste Alarme werden wie unten beschrieben angezeigt.



Eine Markierung an der Taste *Menü* in der *Kalender-Anzeige*. Um die verpassten Alarme zu sehen, gehen Sie zu *Kalender-Menü | Verpasste Alarme*.



Eine Markierung auf dem HandiCalendar-Symbol auf dem Startbildschirm des Geräts.

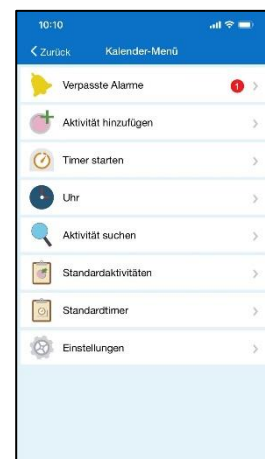

5.4 Aktivität hinzufügen




Aktivitäten hinzufügen können Sie in der *Kalender-Anzeige* oder im *Kalender-Menü*.

Es gibt verschiedene Verfahren, die wir hier beschreiben wollen. Wählen Sie die gewünschte Methode in den Einstellungen; siehe *6.4 Aktivität hinzufügen*

5.4.1 Aktivität über die Bearbeiten-Anzeige hinzufügen

5.4.1.1 Typ auswählen

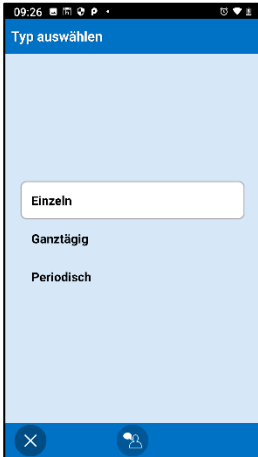


Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, den Sie hinzufügen möchten. Unten ist die Option *Einzel* beschrieben.

Ganztägig ist beschrieben in *5.4.3 Ganztägige Aktivität hinzufügen*.

Die Option *Wiederkehrend* ist beschrieben in *5.4.4 Wiederkehrende Aktivität hinzufügen*.

5.4.1.2 Eingabe der Aktivitätseigenschaften in der Bearbeiten-Anzeige

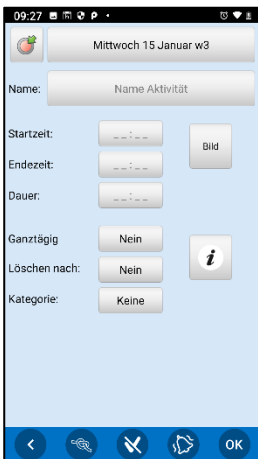

Fügen Sie die Eigenschaften der Aktivität in der *Anzeige Bearbeiten* hinzu, z. B. Name und Startzeit.


Die *Bearbeiten-Anzeige* ist beschrieben in *5.9 5.9*.

Indem Sie auf *OK* drücken, wird die Aktivität gesteuert und dem Kalender hinzugefügt.

5.4.2 Aktivität Schritt für Schritt hinzufügen

Wenn Sie die Schritt-für-Schritt-Methode verwenden, sollten Sie nur die typischerweise verwendeten Schritte einbeziehen, um die Anzahl der Schritte zu reduzieren. Siehe die Gesamtheit der Einstellungen in *6.4 Aktivität hinzufügen*

5.4.2.1 Datum einstellen

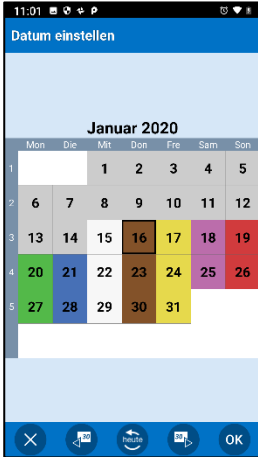

Wählen Sie das gewünschte Datum aus.

(Sie können HandyCalendar so anpassen, dass es nur möglich ist, Aktivitäten für die Zukunft hinzuzufügen; in diesem Fall sind zurückliegende Termine grau).

5.4.2.2 Typ auswählen



Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, den Sie hinzufügen möchten. Unten ist die Option *Einzel* beschrieben.

Ganztägig ist beschrieben in *5.4.3 Ganztägige Aktivität hinzufügen*.

Die Option *Wiederkehrend* ist beschrieben in *5.4.4 Wiederkehrende Aktivität hinzufügen*.

5.4.2.3 Standardaktivität auswählen




Für eine Beschreibung der Standardaktivitäten siehe unter *1.6 Aktivitätstypen in HandyCalendar*.

Wenn Sie keine Standardaktivitäten verwenden möchten, wählen Sie "Keine Standardaktivität".

Wenn eine Standardaktivität ausgewählt ist, springen Sie direkt in die Ansicht *5.4.2.11 S*.


5.4.2.4 Bild auswählen

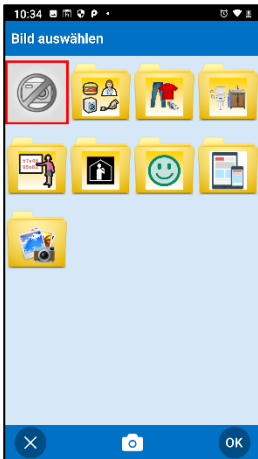

Wählen Sie aus dem Bildarchiv ein Bild für die Aktivität aus.

Wenn die Aktivität kein Bild haben soll, tippen Sie auf **OK**.


5.4.2.5 Name Aktivität

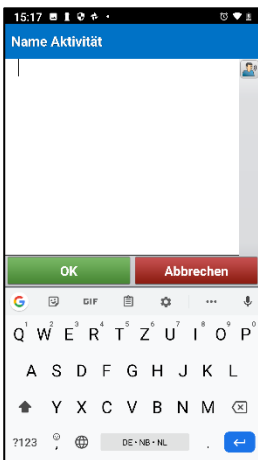

Geben Sie den Namen der Aktivität ein.

Einer Aktivität muss entweder ein Name oder ein Bild zugeordnet sein.

5.4.2.6 Info-Menü

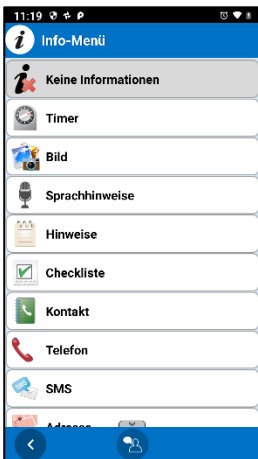

Fügen Sie der Aktivität zusätzliche Informationen hinzu. (Siehe Beschreibung in 5.2 .)



Wenn die Aktivität keine zusätzlichen Informationen haben soll, wählen Sie "Keine Informationen".

Stellen Sie ein, welche Funktionen über das Info-Menü verfügbar sein sollen; siehe 6.6 *Info-Menü*.

5.4.2.7 Löschen nach, Kontrolle und Alarm



Beachten Sie, dass *Löschen nach*, *Kontrolle* und *Alarm* in iOS anders eingegeben werden.

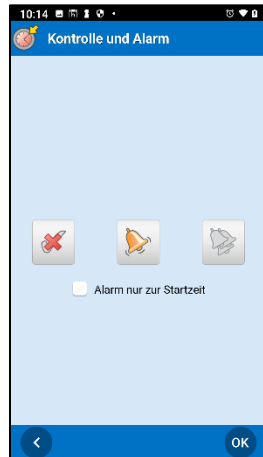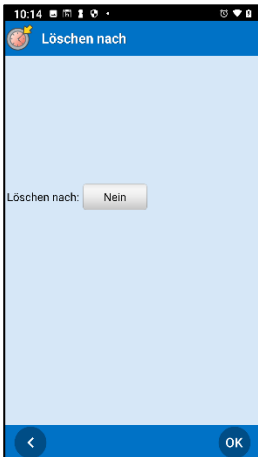

„Löschen nach“: Die Aktivität wird automatisch am Tag nach ihrem Auftreten entfernt.



Aktivität abhaken Ein/Aus



Alarm ausgeben Ein/Aus



Vibrationsalarm Ein/Aus

Alarm nur zur Startzeit: Zum Ende der Aktivität wird kein Alarm ausgegeben.

Bei einzelnen Aktivitäten ist die Voreinstellung für „Löschen nach“ *Nein*. (Bei wiederkehrenden Aktivitäten *Ja*.)

5.4.2.8 Kategorie auswählen




Weisen Sie der Aktivität eine Kategoriefarbe zu.

Wenn die Aktivität keine Kategoriefarbe haben soll, wählen Sie „Keine Kategorie“.


Die Kategorien werden im Einstellungsmenü festgelegt; siehe 6.16 .

5.4.2.9 Erinnerung eingeben

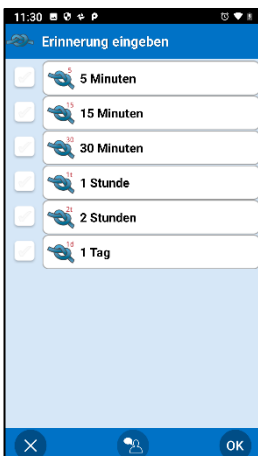

Versehen Sie die Aktivität mit einer oder mehreren Erinnerungen.

5.4.2.11 Startzeit festlegen

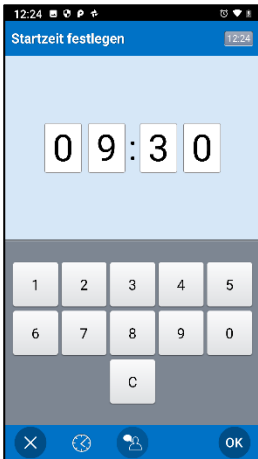


Geben Sie die Startzeit der Aktivität mit vier Ziffern ein.

Wenn Sie auf *OK* tippen und Sie sich in der letzten Ansicht der Schritt-für-Schritt-Anleitung befinden, wird die Aktivität kontrolliert und dem Kalender hinzugefügt.

Diese Ansicht zeigt die 24-Stunden-Zeit, sie kann in den Allgemeinen Einstellungen des Geräts auf AM/PM geändert werden.

5.4.2.12 Endzeit festlegen

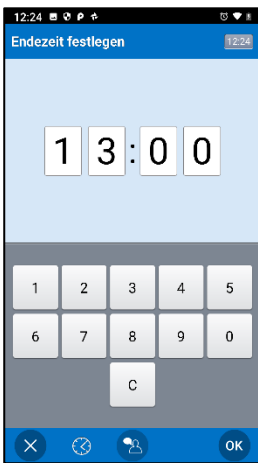

Geben Sie die Startzeit der Aktivität mit vier Ziffern ein.

Indem Sie auf *OK* tippen, wird die Aktivität gesteuert und dem Kalender hinzugefügt.

5.4.3 Ganztägige Aktivität hinzufügen




Wählen Sie Ganztägig, wenn Sie eine Aktivität ohne eine bestimmte Startzeit hinzufügen möchten.

Je nach Einstellung für Aktivität hinzufügen gelangen Sie weiter zur *Bearbeiten-Ansicht* oder zur Schritt-für-Schritt-Anleitung.

5.4.4 Wiederkehrende Aktivität hinzufügen

Anstatt jeden Tag dieselbe Aktivität manuell hinzuzufügen, ist es möglich, sie nur einmal als "wiederkehrende" Aktivität hinzuzufügen.

5.4.4.1 Typ auswählen

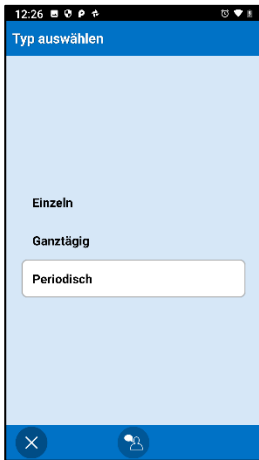

Wählen Sie die Option *Periodisch*.

5.4.4.2 Tage auswählen




Wählen Sie das Muster aus, nach dem die Aktivität wiederholt werden soll. Sie können als *wöchentlich*, *monatlich* oder *jährlich* hinzugefügt werden.

Je nach getroffener Wahl wird eine der drei untenstehenden Ansichten angezeigt.

Wöchentlich



Monatlich

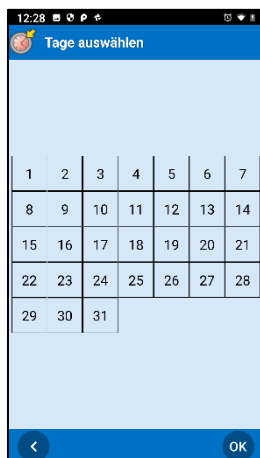

Jährlich



Wöchentlich: Sie können verschiedene Tage auswählen, z. B. jeden Dienstag oder Donnerstag. Über die Kontrollkästchen können Sie alle Tage und/oder jede zweite Woche auswählen.

Monatlich: Sie können verschiedene Tage auswählen, z. B. den 1. und den 15.

Jährlich: Wählen Sie das Datum, an dem die Aktivität erstmalig hinzugefügt werden soll.

5.4.4.3 Enddatum auswählen



Wählen Sie das Enddatum, d. h. den Tag, an dem sich die Aktivität zum letzten Mal wiederholen soll.

Wenn die Aktivität kein Enddatum hat, wählen Sie *Kein Enddatum*. Dies bedeutet, dass sie auf unbestimmte Dauer hinzugefügt wird.

Je nach Einstellung für Aktivität hinzufügen gelangen Sie weiter zur *Bearbeiten-Ansicht* oder zur Schritt-für-Schritt-Anleitung.


Beachten Sie, dass die Eigenschaft "Löschen nach" für wiederkehrende Aktivitäten auf *Ja* voreingestellt ist. Sofern Sie also nicht auf *Nein* umstellen, werden die wiederkehrenden Aktivitäten nicht für den nächsten Tag gespeichert. (Siehe 5.9.8 Auswahl "Löschen nach.")

5.5 Aktivität abhaken


Eine kontrollierbare Aktivität kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt oder in Verbindung mit einem Alarm abgehakt werden. Beide Methoden werden im Folgenden beschrieben.

5.5.1 Aktivität abhaken über Aktivitätsanzeige

Um eine Aktivität zu jedem beliebigen Zeitpunkt abhaken zu können, öffnen Sie die *Aktivitätsanzeige* und drücken Sie die Schaltfläche

Kontrollieren , um zu bestätigen, dass Sie die Aktivität abgeschlossen haben.

Es wird kein Alarm ausgegeben, wenn die Aktivität im Voraus abgehakt wurde.

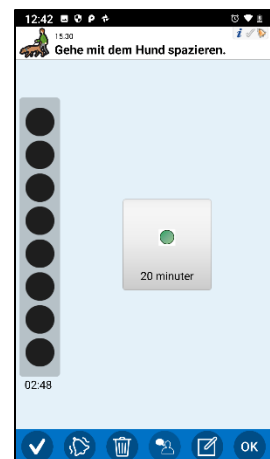


5.5.2 Aktivität in Verbindung mit einem Alarm abhaken

Wenn es einen Alarm für eine kontrollierbare Aktivität gibt, erhalten Sie die Möglichkeit, die Aktivität abzuhaken. Wenn Sie *Ja* wählen, wird die Aktivität abgehakt.

Wenn Sie *Nein* wählen, wird die Aktivität nicht abgehakt, und Sie erhalten **zwei Stunden lang alle 15 Minuten eine Erinnerung**.




5.6 Timer starten

 Timer starten aus dem *Kalender-Menü*.

Sie können entweder Ihre eigene Zeit für den Timer eingeben oder einen vordefinierten Timer (Standardtimer) auswählen. Eine Beschreibung der Erstellung von Standardtimern finden Sie in Kapitel 6.15.

Die folgende Anleitung wird gezeigt:

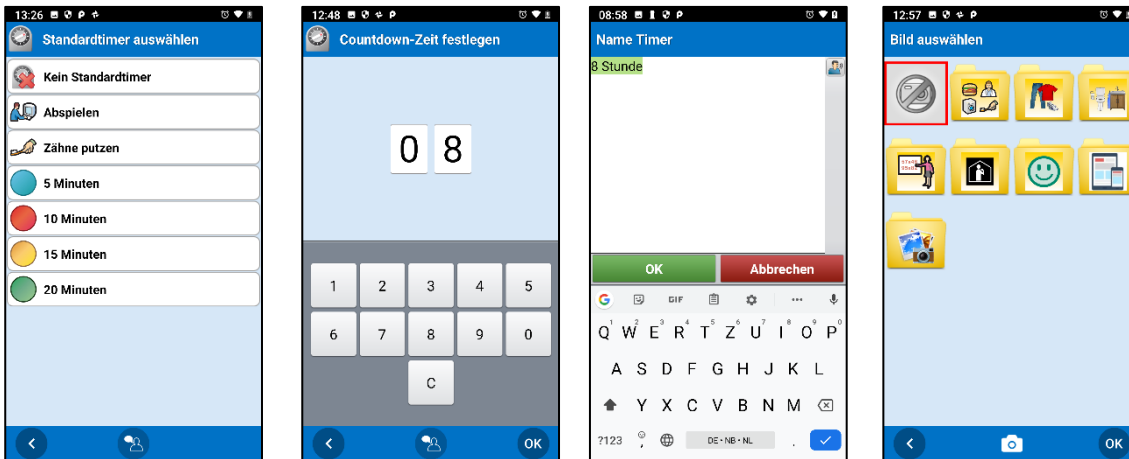


Wählen Sie einen Standardtimer oder wählen Sie "Kein Standardtimer", wenn Sie einen eigenen Timer hinzufügen möchten. Der Timer wird in der *Kalender-Anzeige* angezeigt.


Sie können einstellen, wie die Timerzeit eingegeben werden soll; siehe 6.13.1.

Wenn Sie kein Bild oder keinen Namen für den Timer eingeben, erhält er automatisch einen Namen, der auf der Zeit basiert, z. B. "10 Minuten".

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Timer mit einer Aktivität zu verknüpfen; siehe 5.2.1 *Verknüpfter Hinweis, Sprachhinweis, Timer*.

5.7 Aktivität/Timer bearbeiten

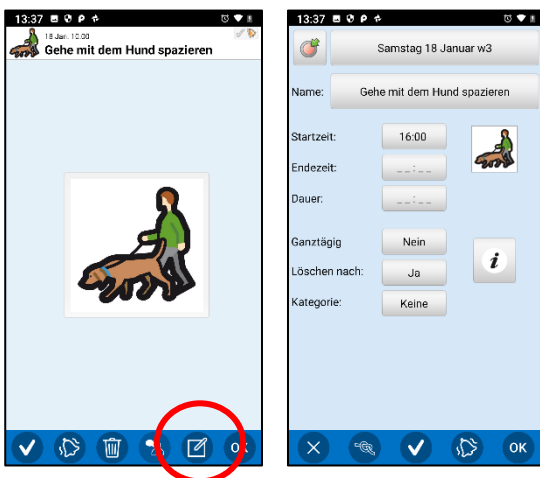

Um eine Aktivität oder einen Timer zu bearbeiten, öffnen Sie die *Aktivitätsanzeige* und tippen Sie auf die Schaltfläche *Bearbeiten* .


In der *Bearbeiten-Ansicht* können Sie die Eigenschaften der Aktivität bearbeiten; siehe 5.9 5.9.


Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf *OK*.

Wenn es sich um eine einzelne Aktivität handelt, werden die Bearbeitungen direkt gespeichert.

Wenn es sich um eine wiederkehrende Aktivität handelt, müssen Sie wählen, ob die Bearbeitung *Nur an diesem Tag* oder *Von diesem Tag an* gelten soll.

5.8 Aktivität/Timer löschen

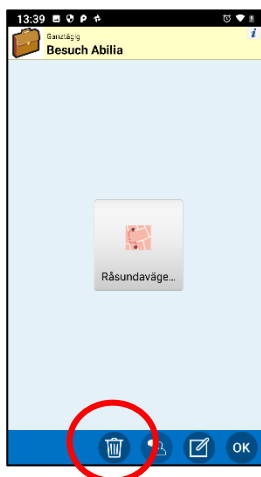


Um eine Aktivität oder einen Timer zu löschen, öffnen Sie die *Aktivitätsanzeige* und tippen Sie auf die Schaltfläche *Löschen* .

Wenn es sich um eine einzelne Aktivität oder einen Timer handelt, müssen Sie das Löschen durch Tippen auf *OK* bestätigen.

Wenn es sich um eine wiederkehrende Aktivität handelt, müssen Sie wählen, ob das Löschen *Nur an diesem Tag*, *Von diesem Tag an* oder *Jeden Tag* gelten soll.


5.9 Bearbeiten-Anzeige

Die *Bearbeiten-Anzeige* dient dazu, Aktivitäten anzulegen und zu bearbeiten; siehe 5.4.1 sowie 5.7 *Aktivität/Timer bearbeiten*.

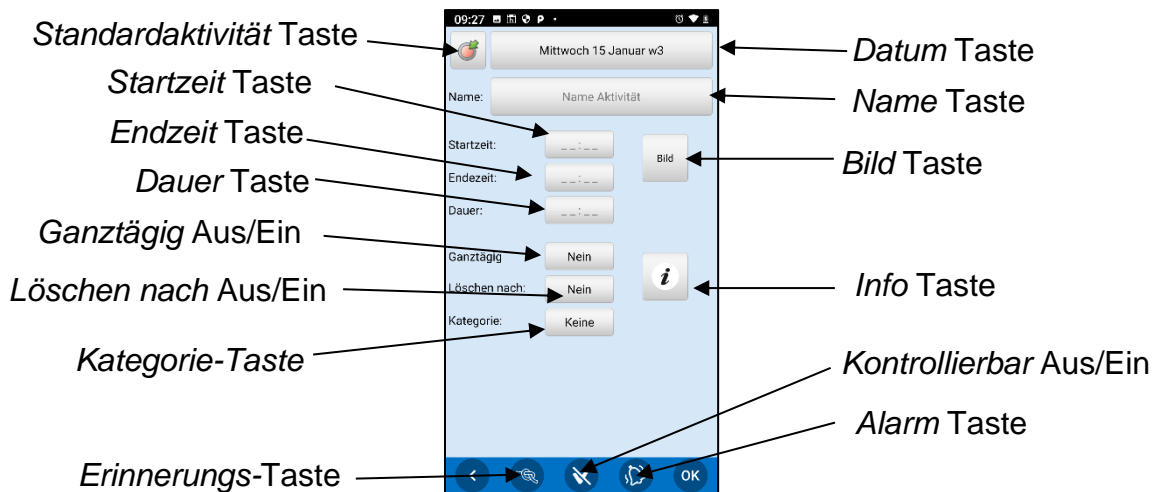

Sie können festlegen, welche Eigenschaften in der *Bearbeitungsanzeige* angezeigt werden sollen, siehe 6.5 *Bearbeiten-Anzeige*.


5.9.1 Datum einstellen

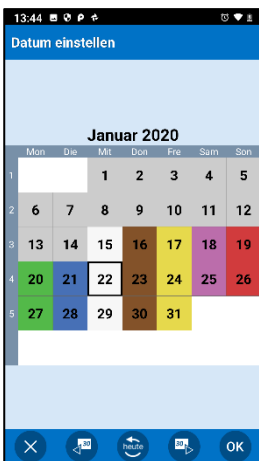

Wählen Sie das gewünschte Datum aus.

(Sie können HandiCalendar so anpassen, dass es nur möglich ist, Aktivitäten für die Zukunft hinzuzufügen; in diesem Fall sind zurückliegende Termine grau).

5.9.2 Aktivität benennen

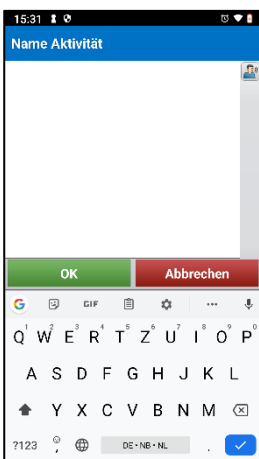

Geben Sie den Namen der Aktivität ein.

Einer Aktivität muss entweder ein Name oder ein Bild zugeordnet sein.

5.9.3 Standardaktivität auswählen




Für eine Beschreibung der Standardaktivitäten siehe unter 1.6 *Aktivitätstypen in HandiCalendar*.

Sobald Sie eine Standardaktivität ausgewählt haben, werden ihre Eigenschaften der Aktivität hinzugefügt.


(Die Schaltfläche für *Standardaktivität* ist nur beim Anlegen einer Aktivität verfügbar).

5.9.4 Bild auswählen

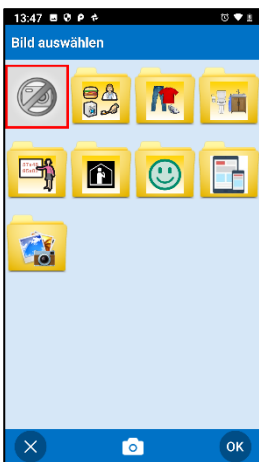


Wählen Sie aus dem Bildarchiv ein Bild für die Aktivität aus.

5.9.5 Startzeit festlegen

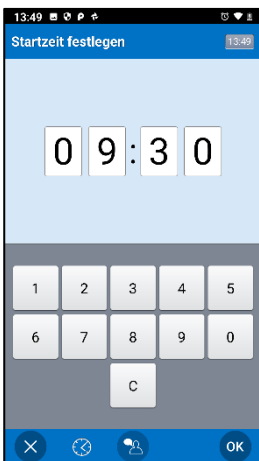

Geben Sie die Startzeit der Aktivität mit vier Ziffern ein.

5.9.6 Endzeit festlegen

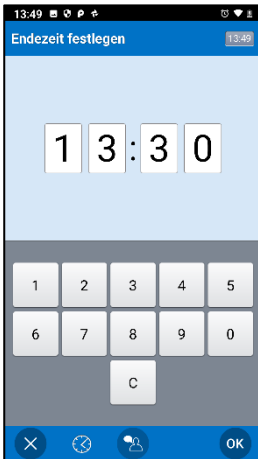

Geben Sie die Startzeit der Aktivität mit vier Ziffern ein.

5.9.7 Auswahl Ganztätig

Entscheiden Sie, ob die Aktivität zeitlich festgelegt sein soll.

5.9.8 Auswahl "Löschen nach"

Legen Sie fest, ob die Aktivität automatisch am Tag nach ihrem Auftreten entfernt werden soll.

5.9.9 Kontrolle durch Abhaken

Legen Sie fest, ob die Aktivität nach Beendigung über ein Kontrollkästchen "abgehakt" werden muss.

5.9.10 Kategorie auswählen




Weisen Sie der Aktivität eine Kategoriefarbe zu.

Wenn die Aktivität keine Kategoriefarbe haben soll, wählen Sie "Keine Kategorie".

Die Kategorien werden im Einstellungs Menü festgelegt; siehe 6.16 .

5.9.11 Info-Menü

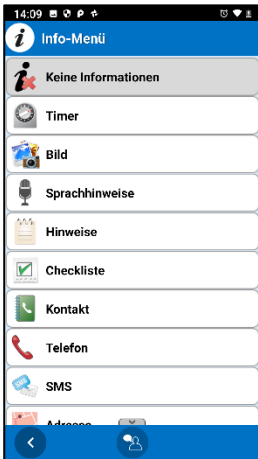


Fügen Sie der Aktivität zusätzliche Informationen hinzu. (Siehe Beschreibung in 5.2 .) Je nach Funktion erfolgt die Verknüpfung auf unterschiedliche Weise. Siehe die Überblicksdarstellung unten.

Wenn die Aktivität keine zusätzlichen Informationen haben soll, wählen Sie "Keine Informationen".


Stellen Sie ein, welche Funktionen über das Info-Menü verfügbar sein sollen; siehe 6.6 *Info-Menü*.

Hinweise

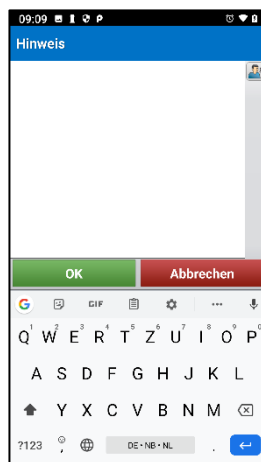


Erstellen Sie einen neuen Hinweis oder übernehmen Sie einen bestehenden. Geben Sie den Hinweistext ein.

Checkliste

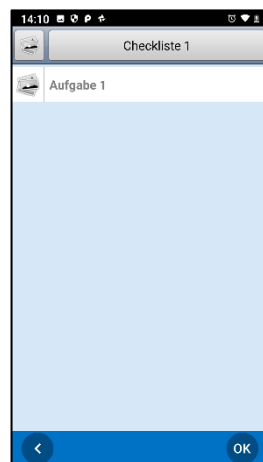

Erstellen Sie eine neue Checkliste oder übernehmen Sie eine bestehende. Geben Sie ein Bild und/oder Text für die Aufgaben der Checkliste ein.

Sprachhinweise

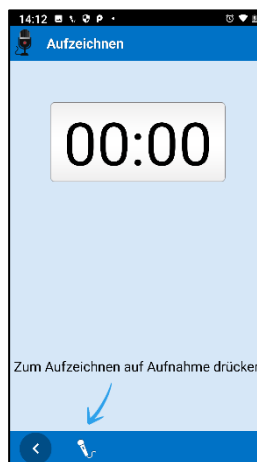


Erstellen Sie eine neue Aufnahme oder übernehmen Sie eine bestehende. Drücken Sie *Aufnahme starten*, um die Aufzeichnung des Sprachhinweises zu starten.

Timer



Wählen Sie einen Standardtimer oder *Kein Standardtimer* und geben Sie Timer Zeit, Name und/oder Bild ein.

5.9.12 Alarm auswählen

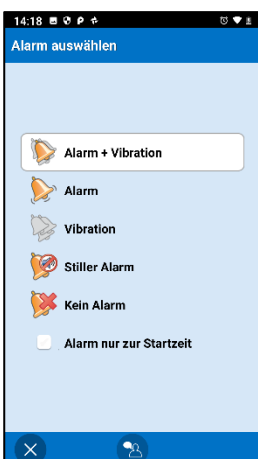


Wählen Sie aus, welcher Alarmtyp zur Aktivität gehören soll.

- *Alarm + Vibration* 
- *Alarm*
- *Vibration* 
- *Stiller Alarm* (nur Alarme mit Alarm-Anzeige)
- *Kein Alarm* (weder Alarm-Anzeige noch Signal/Vibration)
- *Alarm nur zur Startzeit* (kein Alarm zur Endzeit).

Ihre Auswahl ist an der Schaltfläche *Alarm* ersichtlich.

5.9.13 Erinnerung eingeben

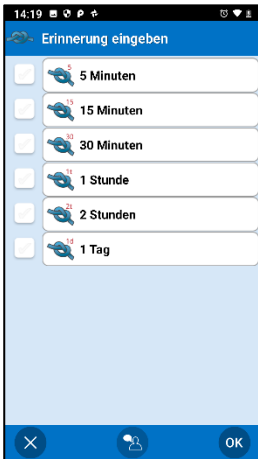

Versehen Sie die Aktivität mit einer oder mehreren Erinnerungen. Ihre Auswahl ist an der Schaltfläche *Erinnerung* ersichtlich.


5.10 Uhr-Anzeige

Die *Uhr-Anzeige* gibt einen Überblick über das Datum, die Uhrzeit und die Tageszeit. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Öffnen der *Uhr-Anzeige*:


1. Über das *Kalender-Menü* .
2. Tippen Sie in der *Kalender-Anzeige* auf die Uhr (einstellungsabhängig).

Die *Uhr-Anzeige* wird entsprechend den getroffenen Einstellungen eingeblendet; (siehe 6.8).


Analog

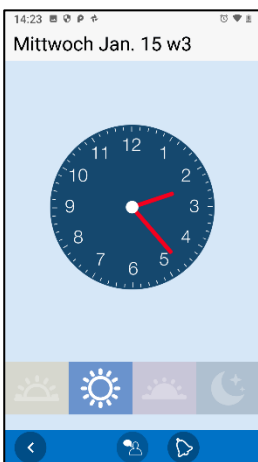

Digital

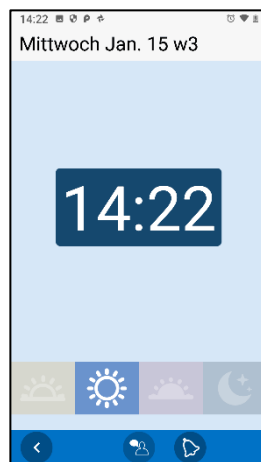

Analog und digital

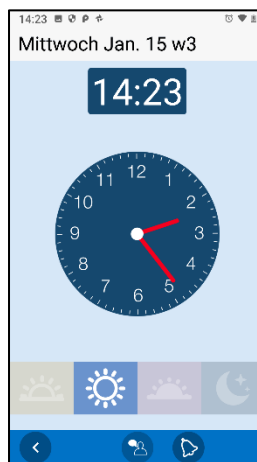

Sie können sehen, ob es Morgen, Tag, Abend oder Nacht ist.

Morgen 06-10

Tag 10-18


Abend 18-23

Nacht 23-06.



5.11 Aktivität suchen



Die Suche nach Aktivitäten können Sie im *Kalender-Menü* durchführen. Die folgende Anleitung wird gezeigt:

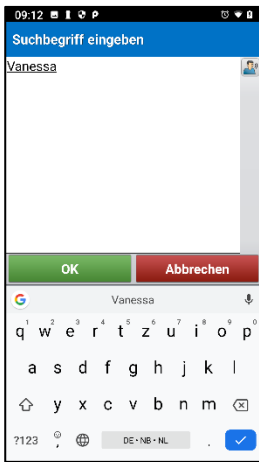

Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf OK.
Wenn es unter den wiederkehrenden Aktivitäten einen Treffer gibt, erscheint die Ansicht rechts. Andernfalls werden die Suchergebnisse direkt angezeigt.
Tippen Sie auf die gewünschte Aktivität, um ihre Details in der *Aktivitätsanzeige* zu sehen.
Wenn die Suche nach Aktivitäten erfolglos bleibt, wird eine Meldung angezeigt.

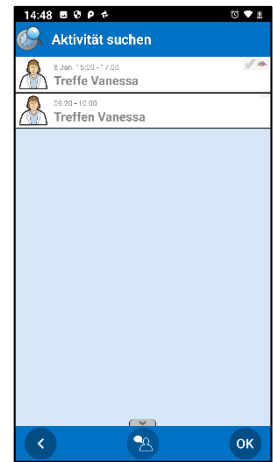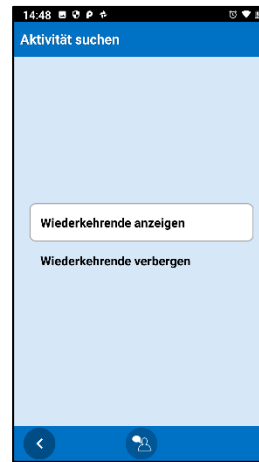

6. Einstellungsmenü



Die Einstellungen für HandiCalendar werden über das *Einstellungsmenü* verwaltet. Öffnen Sie dieses im *Kalender-Menü*.

Als kurze Beschreibung, wie man zu einer bestimmten Einstellungsseite gelangt, wird das folgende Format verwendet: **Einstellungen|Kalender-Anzeige**. Es bedeutet: "Gehen Sie ins Kalender-Menü, wählen Sie das Einstellungsmenü aus und wählen Sie dann Kalender-Anzeige."

6.1 Schutz durch Code

Durch einen Schutzcode für das *Einstellungsmenü* können Sie unbeabsichtigte Veränderungen an den Einstellungen verhindern.




Wählen Sie über **Einstellungen|Schutz durch Code** den Punkt "Einstellungen mit Code schützen" aus. Sie können auch einen eigenen Code einstellen.



Rufen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Geräts die *Einstellungs-App* auf, wählen Sie *HandiCalendar* und dann *Einstellungen mit Passwort schützen*. Der Code lautet 0353 und kann nicht geändert werden.

6.2 Kalender-Anzeige

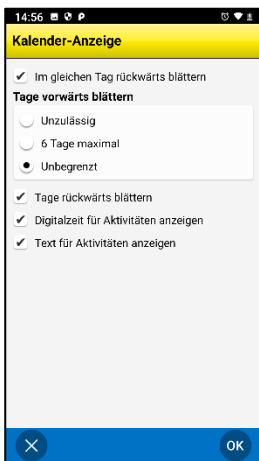



Über **Einstellungen|Kalender-Anzeige** können Sie die Einstellungen für die Kalender-Anzeige anpassen; siehe Kapitel 5.1 .

Die verschiedenen Einstellungen sind nachfolgend beschrieben.

6.2.1 Im gleichen Tag rückwärts blättern

Wenn "Im gleichen Tag rückwärts blättern" nicht ausgewählt ist, können Sie frühere Aktivitäten am selben Tag nicht sehen.

6.2.2 Tage vorwärts blättern und Tage rückwärts blättern

Wenn "Tage vorwärts blättern" bzw. "Tage rückwärts blättern" nicht ausgewählt ist, scheinen die *Blättern*-Tasten  und  in der Kalender-Anzeige nicht auf. Bei "Tage vorwärts blättern" kann eingestellt werden, dass das Vorwärtsblättern für 6 Tage oder über unbegrenzt viele Tage möglich ist.

6.2.3 Digitalzeit für Aktivitäten anzeigen




Wenn "Zeit für Aktivitäten anzeigen" ausgewählt wurde, sieht es wie das Bild oben aus.



Wenn "Zeit für Aktivitäten anzeigen" nicht ausgewählt wurde, sieht es wie das Bild unten aus.

6.2.4 Text für Aktivitäten anzeigen

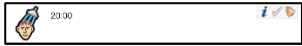

Wenn "Text für die Aktivität anzeigen" nicht ausgewählt ist, erscheint im Aktivitätsfeld kein Text.

Auf diese Weise ist es möglich, dass Text zwar nicht angezeigt wird, aber dennoch mittels Sprachausgabe vorgelesen werden kann.


6.2.5 Einstellungen Zeitsäule (iOS)



In iOS gibt es ein paar zusätzliche Einstellungen für die Kalender-Anzeige:




- *Startansicht.* Wählen Sie aus, ob die Zeitsäulenansicht, Listenansicht, Wochenansicht oder Monatsansicht die Startansicht sein soll.
- *Schnellmenü für Kalender zeigen.* Legen Sie fest, ob eine einfache Möglichkeit zum Wechseln zwischen den Kalenderansichten gegeben sein soll (anstatt über das *Kalendermenü*).
- *Zoom.* Stellen Sie die Zeitsäulenansicht mit einem kleinen oder großen Zoom ein. Mit dem kleinen Zoom sehen Sie einen größeren Ausschnitt des Tages, dafür sind Bilder und Text kleiner. Mit dem großen Zoom sind die Bilder und der Text größer, dafür ist der angezeigte Ausschnitt des Tages kleiner.
- *Viertelstunden-Uhr zeigen.* Legen Sie fest, ob Sie die Viertelstunden-Punkte in der Zeitsäulenansicht zu sehen sein sollen.

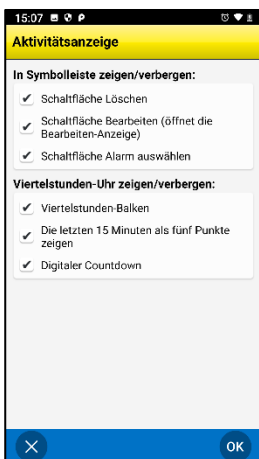6.3 Aktivitätsanzeige




Über **Einstellungen|Aktivitätsanzeige** können Sie die Einstellungen für die Aktivitätsanzeige anpassen; siehe Kapitel 5.2 .

Zeigen/Verbergen

- *Schaltfläche Löschen.* Verbergen Sie , um ein versehentliches Entfernen von Aktivitäten aus dem Kalender zu verhindern.
- *Bearbeiten-Schaltfläche.* Verbergen Sie , um das Bearbeiten von Aktivitäten im Kalender zu verhindern.
- *Schaltfläche Alarm.* Verbergen Sie , um das Ändern des Alarmtyps für Aktivitäten im Kalender zu verhindern.


Viertelstunden-Uhr zeigen/verbergen

- *Viertelstunden-Balken.* Die verbleibende Zeit bis zum Beginn bzw. zum Ende der Aktivität wird in Form von "Punkten" angezeigt; siehe 1.7 Das Prinzip der Viertelstunden-Uhr.
- *Letzte Viertelstunde als fünf Punkte.* Der untere Viertelstunden-Punkt ist in 5 kleine Punkte unterteilt, die jeweils 3 Minuten darstellen. Dies bietet eine detailliertere Zeitanzeige unmittelbar vor dem Eintreten einer Aktivität.
- *Digitaler Countdown.* Die verbleibende Zeit bis zum Beginn bzw. zum Ende der Aktivität wird in Digitalform angezeigt.

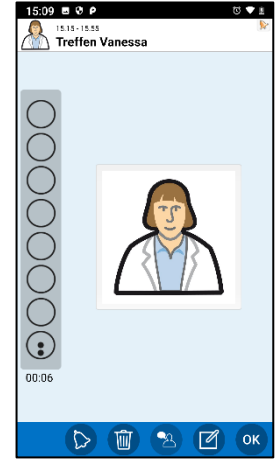

6.4 Aktivität hinzufügen

Über **Einstellungen|Aktivität hinzufügen** wählen Sie aus, nach welcher Methode neue Aktivitäten hinzugefügt werden sollen.

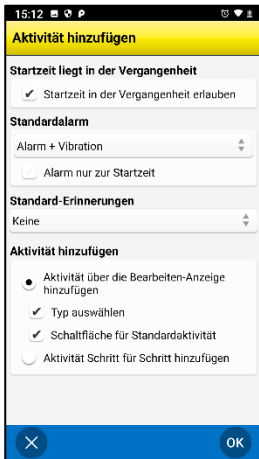

Es gibt zwei Hauptoptionen:

- Aktivität über die Bearbeiten-Anzeige hinzufügen
- Aktivität Schritt für Schritt hinzufügen

Die Beschreibung beider Verfahren finden Sie in 5.4 A.

Die gewählte Hauptoption lässt sich dann noch weiter anpassen. Siehe die Optionen auf der Einstellungsseite.

6.4.1 Startzeit in der Vergangenheit erlauben

Legen Sie fest, ob das Hinzufügen von Aktivitäten an einem in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt möglich sein soll.

6.4.2 Standardalarm

Wählen Sie aus, welcher Alarmtyp beim Hinzufügen einer Aktivität voreingestellt sein soll.



Sie können dabei zwischen folgenden Optionen wählen:

- Alarm + Vibration
- Alarm
- Vibration
- Stiller Alarm
- Kein Alarm
- Alarm nur zur Startzeit



Sie können dabei zwischen folgenden Optionen wählen:

- Alarm
- Stiller Alarm
- Kein Alarm
- Alarm nur zur Startzeit

Wie und mit welchen Signaleigenschaften der Alarm ausgelöst wird, ist von den Toneinstellungen des Geräts abhängig. Wenn das Gerät die Vibrierfunktion


unterstützt und diese in den Toneinstellungen des Geräts ausgewählt ist, dann vibriert der HandiCalendar-Alarm.

6.4.3 Standard-Erinnerungen (Android)




Wählen Sie die Erinnerung(en) aus, die beim Hinzufügen einer Aktivität voreingestellt sein soll(en). (5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 1 Tag)

6.5 Bearbeiten-Anzeige

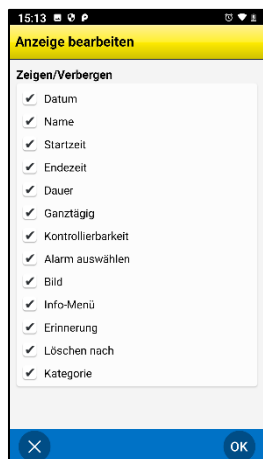


Über **Einstellungen|Bearbeitungsanzeige**, können Sie festlegen, welche Tasten und Schaltflächen in der Bearbeiten-Anzeige aufscheinen sollen; siehe 5.9 .


6.6 Info-Menü

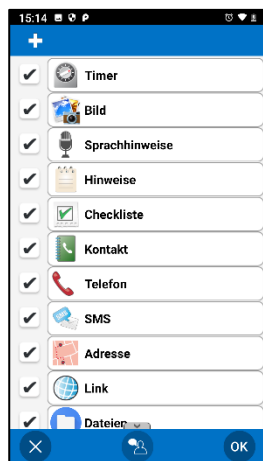


Über **Einstellungen|Info-Menü** können Sie festlegen, welche Inhalte im Info-Menü angezeigt werden sollen; siehe 5.9.11 .




Über die Taste  können Sie Anwendungen von Drittanbietern zum Info-Menü hinzufügen.


Sie können die Reihenfolge im Info-Menü bestimmen, indem Sie das gewünschte Element oder die Anwendung markieren und auf *Nach oben* bzw. *Nach unten* tippen (diese Schaltflächen erscheinen oben, wenn eine Zeile markiert wurde). Um eine Drittanbieteranwendung aus dem Info-Menü zu entfernen, markieren Sie sie und tippen Sie auf .

6.7 Kalender-Menü

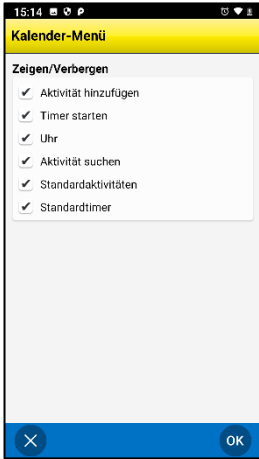

Über **Einstellungen|Kalender-Menü** können Sie festlegen, welche Funktionen über  in der Kalender-Anzeige verfügbar sein sollen.

6.8 Zeitanzeige

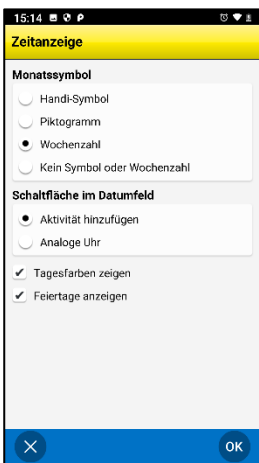

Über **Einstellungen|Zeitanzeige** können Sie die folgenden Anpassungen vornehmen:

- Analoge Uhr anzeigen oder Schaltfläche Aktivität hinzufügen im Datumfeld
- Monatssymbol oder Wochenzahl im Datumfeld anzeigen
- Standardisierte Farben für Wochentage anzeigen
- Feiertage anzeigen

Die Einstellungen sind nachfolgend beschrieben.


6.8.1 Schaltfläche im Datumfeld

Taste "Aktivität hinzufügen"



Bei Betätigen dieser Taste wird die Anleitung für das Hinzufügen von Aktivitäten aufgerufen; siehe *5.4 Aktivität hinzufügen*.


Analoge Uhr

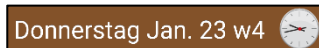

Durch Antippen der Uhr wird die Uhr-Anzeige aufgerufen; siehe *5.10*.

6.8.2 Monatssymbol


Handi-Symbol

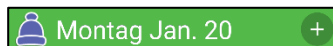

Wochenzahl



Piktogramm Symbol

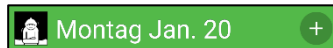

Weder Monat-Symbol noch Wochenzahl



6.8.3 Wochentagsfarben anzeigen

Die voreingestellten Wochentagsfarben sind: Grün = Montag, Blau = Dienstag, Weiß = Mittwoch, Braun = Donnerstag, Gelb = Freitag, Rosa = Samstag und Rot = Sonntag.

Wochentagsfarben

Keine


Wochentagsfarben

Montag Jan. 20 w4 +	Montag Jan. 20 w4 +
Dienstag Jan. 21 w4 +	Dienstag Jan. 21 w4 +
Mittwoch Jan. 22 w4 +	Mittwoch Jan. 22 w4 +
Donnerstag Jan. 23 w4 +	Donnerstag Jan. 23 w4 +
Freitag Jan. 24 w4 +	Freitag Jan. 24 w4 +
Samstag Jan. 25 w4 +	Samstag Jan. 25 w4 +
Sonntag Jan. 26 w4 +	Sonntag Jan. 26 w4 +

6.8.4 Feiertage anzeigen

Wenn "Feiertage anzeigen" ausgewählt ist, werden allen gesetzlichen Feiertage entsprechend den Einstellungen in 5.1.6 *Feiertage* angezeigt.

6.9 Zeiteingabe (Android)

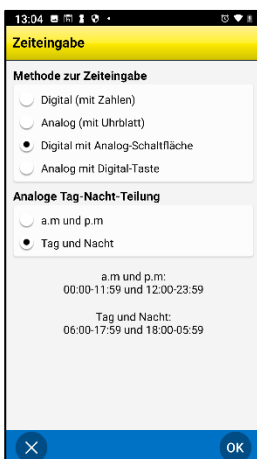


Über **Einstellungen|Zeiteingabe** können Sie die Einstellungen für die Zeiteingabe festlegen. Sie entscheiden, ob die Zeit digital mit Ziffern oder analog mit einem Ziffernblatt eingegeben werden soll. Es ist auch möglich, eine Taste anzubieten, mit der sich die Eingabe auf "Sonstiges" umstellen lässt.

Bei der analogen Eingabe können Sie entscheiden, ob der Tag in AM/PM oder Tag/Nacht unterteilt werden soll.


Die Einstellungen sind nachfolgend beschrieben.

6.9.1 Methode zur Zeiteingabe


*Digital
(mit Zahlen)*

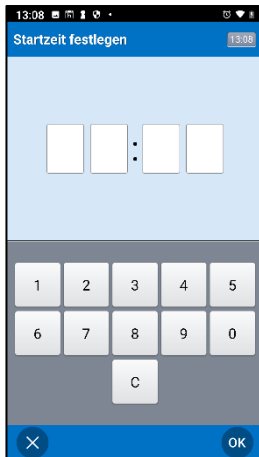


*Analog
(mit Uhrblatt)*

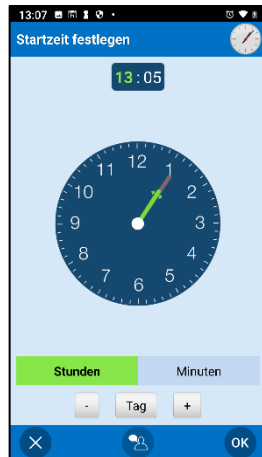

*Digital mit Analog-
Schaltfläche*

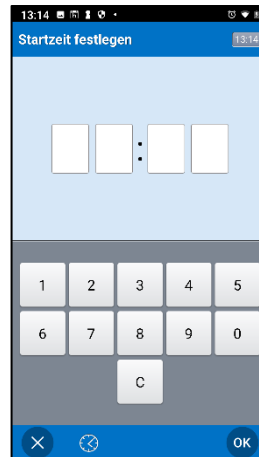

*Analog mit
Digital-Taste*

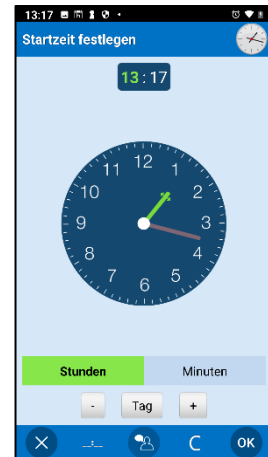


6.9.2 Analoge Tag-Nacht-Teilung

Wählen Sie aus folgenden Optionen:


- **AM und PM.** Voreingestellt ist die 12-Stunden-Anzeige. 00:00-23:59 bzw. 12:00-23:59.
- **Tag und Nacht.** Vereinfachte Methode 06:00-17:59 bzw. 18:00-05:59.

6.10 Uhr-Anzeige

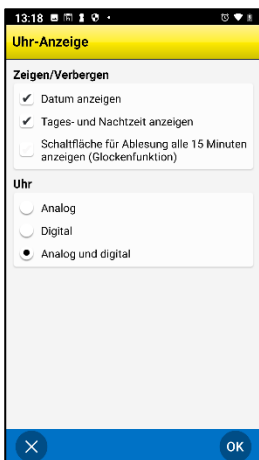


Über **Einstellungen|Uhr-Anzeige** können Anpassungen an der Uhr-Anzeige vorgenommen werden:


Datum
Digitale Uhr
Analoge Uhr
Tageszeit

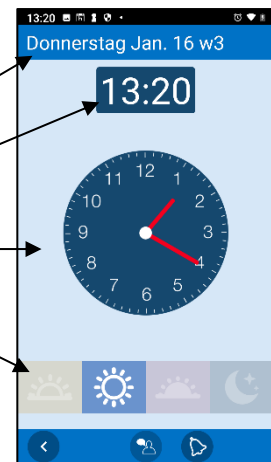

Schaltfläche für Ablesung alle 15 Minuten (Glockenfunktion)

Die Schaltfläche  ist in der Symbolleiste verfügbar. Für eine Beschreibung der Funktion, siehe 5.10 Uhr-Anzeige.


6.11 Monatsansicht

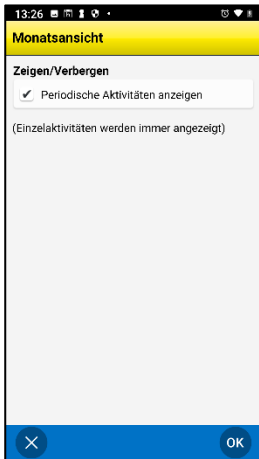

Über **Einstellungen|Monatsansicht** können Sie festlegen, ob wiederkehrende Aktivitäten in der Monatsansicht aufscheinen sollen (kleine schwarze Quadrate an allen zutreffenden Tagen).

Bei einer sehr großen Anzahl wiederkehrender Aktivitäten empfiehlt es sich nicht, diese Funktion zu aktivieren.


6.12 Wochenansicht

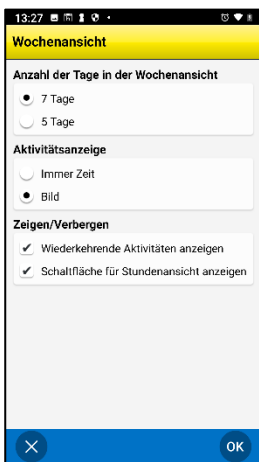


Über **Einstellungen|Wochenansicht** können Sie folgende Einstellungen für die Wochenansicht vornehmen:

- *Anzahl der Tage in der Wochenansicht.* 7 Tage (Montag-Sonntag) oder 5 Tage (Montag-Freitag).
- *Aktivitätsanzeige.* “Immer Zeit” bedeutet, dass die Aktivität immer mit ihrer Startzeit angezeigt wird, auch wenn sie mit einem Bild versehen ist.
- *Wiederkehrende Aktivitäten anzeigen.* Nicht auswählen, wenn die wiederkehrenden Aktivitäten in der Wochenansicht ausgeblendet werden sollen.



Schaltfläche für Stundenansicht anzeigen. Um zur Stundenanzeige zu wechseln, tippen Sie auf . Dadurch sehen Sie nicht die geplanten Aktivitäten, sondern eine Übersicht über freie/verplante Zeit.

6.13 Timer starten

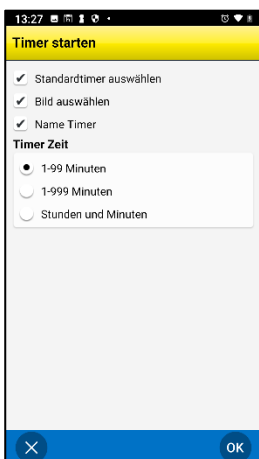

Über **Einstellungen|Timer starten** können Sie auswählen, welche Ansichten in *Timer starten* angezeigt werden sollen; siehe Kapitel 5.6 *Timer*):


- Standardtimer auswählen
- Bild auswählen
- Name Timer

Sie wählen außerdem aus, wie die Eingabe der Timerzeit über die Ansicht “Countdown-Zeit” erfolgen soll; siehe unten.

6.13.1 Countdown-Zeit festlegen

Für das Ausfüllen der Ansicht "Countdown-Zeit" gibt es drei Möglichkeiten:

- 1–99 Minuten. Max. 2 Ziffern.
- 1-999 Minuten. Max. 3 Ziffern.
- Stunden und Minuten Max. 4 Ziffern, wobei die beiden ersten für die Stunden und die beiden letzten für die Minuten stehen.

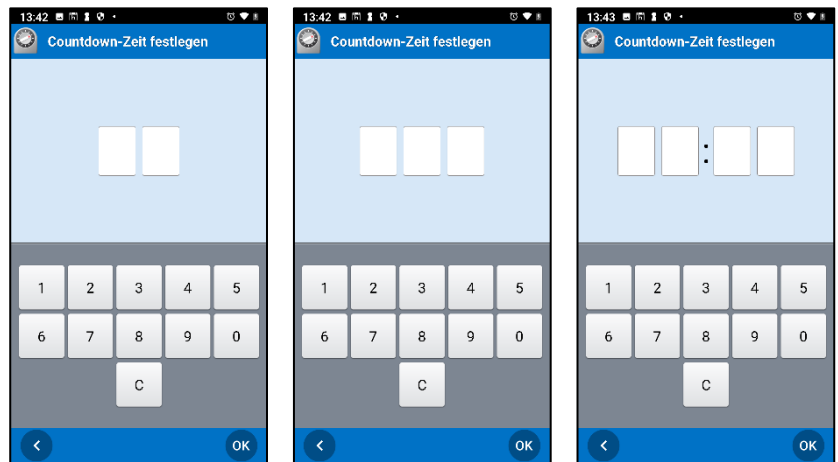

6.14 Standardaktivitäten



Über **Einstellungen|Standardaktivitäten** können die Standardaktivitäten und Ordner definiert werden. Dies kann auch über myAbilia erfolgen.

Tippen Sie auf die Schaltflächen oben, um eine Standardaktivität oder einen Ordner zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen:



Schaltfläche Neu. Wenn Sie sich auf der obersten Ebene – d. h. nicht in einem Ordner – befinden, können Sie wählen, ob Sie eine neue Standardaktivität oder einen neuen Ordner anlegen möchten.



Schaltfläche Bearbeiten. Wählen Sie zunächst das zu bearbeitende Element aus.



Schaltfläche Löschen. Wählen Sie zunächst das zu löschende Element aus.

Zum Verbergen/Zeigen der Aktivität gehen Sie in 5.4.2.3 S.

6.15 Standardtimer


Das Festlegen von Standardtimern erfolgt über **Einstellungen|Standardtimer**. Das Anlegen und Bearbeiten von Standardtimern und Ordner funktioniert auf dieselbe Weise für 6.14 beschrieben.

6.16 Kategorien




Über **Einstellungen|Kategorien** ist es möglich, die *Kategoriebezeichnungen* anzupassen und festzulegen, welche Kategorien in der Liste aufscheinen sollen.



Markieren Sie die betreffende Kategorie und bearbeiten Sie die Bezeichnung über die Schaltfläche . Wählen Sie über die Kontrollkästchen alle Aktivitäten aus, die angezeigt werden sollen.



Markieren Sie die betreffende Kategorie. Die Schaltfläche  wird eingeblendet. Wählen Sie *Bearbeiten* oder *Verbergen/Zeigen*.

6.17 Alarmklang

Über **Einstellungen|Alarmklang** können Sie den Alarmklang für HandiCalendar einstellen. Bei dieser Funktion gibt es Abweichungen zwischen Android und iOS, siehe die Beschreibung unten.

6.17.1 Einstellungen des Alarmklangs in der Android-App



Es ist möglich, für *nicht-kontrollierbare Aktivitäten*, *kontrollierbaren Aktivitäten*, *Timer* sowie *Erinnerungen* unterschiedliche Klänge einzurichten.

Wählen Sie den Alarmklang in der Liste aus und testen Sie ihn über die Schaltfläche *Abspielen*.

Bei *Erinnerungen* stehen auch die Optionen *Kein Ton* und *Vibration* zur Auswahl.

Die Alarmzeit, d. h. die Zeit, zu der der Alarm und die Erinnerungen ertönen/vibrieren, kann auf *Signal*, *15 Sekunden*, *30 Sekunden*, *1 Minute*, *2 Minuten* und *5 Minuten* eingestellt werden. (Bei "Signal" wird der Ton einmal bzw. maximal 5 Sekunden lang abgespielt).

6.17.1 Einstellungen des Alarmklangs in der iOS-App



Aufgrund der *Einschränkungen* bezüglich der Alarme unter *iOS* bietet die *iOS-App* weniger *Einstellungsmöglichkeiten* als die *Android-App*.

Es wird für alle Aktivitäten der gleiche Alarmklang verwendet.


Die Alarmzeit, d. h. die Zeit, zu der der Alarm und die Erinnerungen ertönen/vibrieren, wird für jeden Alarmklang einzeln festgelegt. Die Zeit steht in Klammern hinter dem Namen des Alarmklangs.

Wählen Sie den Alarmklang in der Liste aus. Er wird abgespielt, sofern der Ton des Geräts eingeschaltet ist (nicht im stillen Modus).


6.18 Alarm-Anzeige (Android)



Über **Einstellungen|Alarm-Anzeige** legen Sie fest, wie der Alarm agieren soll:


- *Vollbild*. Der Alarm wird über den ganzen Bildschirm angezeigt.
- *Benachrichtigung*. Der Alarm wird als Benachrichtigung angezeigt, abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen Ihres Geräts. Benachrichtigungen können auch auf einer intelligenten Uhr ausgegeben werden.
- *Schlummer-Schaltfläche anzeigen*.  erscheint in der Alarm-Anzeige. Wenn Sie auf die *Schlummer-Schaltfläche* tippen, wird die Alarm-Anzeige geschlossen und der Alarm um 5 Minuten verschoben.

6.19 Sprachgaube

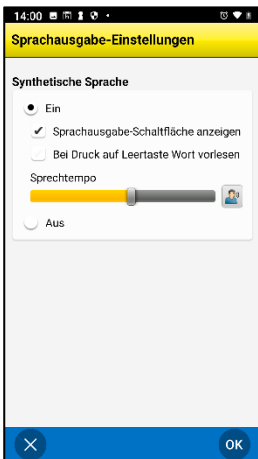

Über **Einstellungen|Synthetische Sprache|Sprachausgabe-Einstellungen** können Sie Einstellungen an der synthetischen Sprache vornehmen.

Zuerst muss eine Stimme auf das Gerät heruntergeladen werden (WLAN ist erforderlich). Alle verfügbaren Stimmen sind aufgelistet. Dann kann die Sprachausgabe angepasst werden:

- *Sprachausgabe-Schaltfläche anzeigen*. Die Sprachausgabe-Schaltfläche  ist in den verschiedenen Ansichten von HandiCalendar zu finden.
- *Bei Druck auf Leertaste Wort vorlesen*. Die Wörter werden während dem Tippen auf der Tastatur vorgelesen. Das letzte geschriebene Wort wird vorgelesen, sobald Sie die Leertaste drücken.
- *Sprechtempo*. Passen Sie das Sprechtempo mit dem Schieberegler an.

6.20 Protokolle (Android)



Über **Einstellungen|Protokolle** können Sie Protokolldateien verwalten. Protokolldateien werden im Hintergrund erstellt und dienen in erster Linie der Fehlersuche.

Die Protokolldateien werden automatisch im Speicher des Geräts abgelegt, wo sie nicht zugänglich sind.

Wenn Sie **Hochladen auf Server** wählen, werden die Protokolldateien über das Mobilfunknetz oder WLAN auf den Support-Server von Abilia hochgeladen.

6.21 Über HandiCalendar (Android)



In **Einstellungen|Über HandiCalendar** können die Software-Version, die Geräteerkennung sowie Informationen zum Gerät eingesehen werden. Außerdem finden Sie hier Ihren *Lizenzschlüssel* und das Ablaufdatum Ihrer Lizenz.

6.22 Abmelden

Über **Einstellungen|Abmelden** können Sie sich von HandiCalendar abmelden. Wenn Sie sich abmelden, verschwinden alle HandiCalendar-Daten vom Gerät. Die Daten bleiben aber im myAbilia-Konto gespeichert. Wenn Sie HandiCalendar das nächste Mal starten, erscheint das Anmeldefenster für HandiCalendar und Sie können sich erneut anmelden.

7 HandiCalendar auf Apple Watch (iOS)



Gilt nur für iOS

7.1 Funktionsübersicht

HandiCalendar bietet bei einer Installation auf Apple Watch die folgenden Funktionen:

- Bildunterstützung im Kalender
- Liste der Aktivitäten des Tages
- Aktivitätsanzeige mit visueller Zeitunterstützung (Viertelstunden-Prinzip)
- Angepasste Alarm-Anzeige

Das Abhaken von Aktivitäten ist direkt auf der Uhr möglich. Verbundene Funktionen wie z. B. Checklisten werden auf der Uhr nicht angezeigt.

Die Funktionsweise der Uhr folgt den Richtlinien von Apple: Die Uhr ist als Ergänzung zum Telefon gedacht und kann dieses nicht ersetzen. Der Schwerpunkt liegt auf den Funktionen, die vom Benutzer in Situationen, in denen das Telefon nicht verfügbar ist, am meisten benötigt werden.

7.2 Alarme auf Apple Watch

- Der Alarm (Ton/Vibration) wird auf der Uhr angezeigt, wenn das Handy-Display ausgeschaltet ist
- Auf der Uhr bestätigte Benachrichtigungen sind auch auf dem Handy bestätigt.
- Wenn keine Verbindung zwischen Uhr und Handy besteht, können Sie trotzdem einen Alarm auf der Uhr bestätigen (die Synchronisation erfolgt bei Wiederherstellung der Verbindung)

7.3 Installation

Der Download von HandiCalendar auf Apple Watch erfolgt über die **Watch**-App auf Ihrem Handy:

- **Benachrichtigungen.** Wählen Sie HandiCalendar und die Option "iPhone Benachrichtigungen spiegeln".
- **HandiCalendar.** Wählen Sie die Option "App auf Apple Watch anzeigen".

8. Sicherheit und Haftung

Im Falle einer Verletzung oder eines Verletzungsrisikos wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Anbieter oder Abilia.

Das Produkt erfüllt hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität die Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte. Bei der Inbetriebnahme und der täglichen Verwendung ist stets auf den sicheren Gebrauch des Produkts zu achten. Bitte wenden Sie sich bei jeglichen Unklarheiten zur ordnungsgemäßen Verwendung und Inbetriebnahme an Ihren Anbieter.






Das Produkt darf nur für den im vorliegenden Handbuch genannten Zweck und der darin beschriebenen Umgebung verwendet werden. Das Produkt darf nicht als alleiniges Hilfsmittel im Zusammenhang mit einer Medikation, medizinischen Behandlung oder anderen lebensnotwendigen Maßnahmen verwendet werden.

Abilia haftet nicht für Schäden jeder Art, Folgeschäden oder Verluste infolge falscher Verwendung, mangelhafter Wartung und Pflege, unsachgemäßer Einstellungen, Updates des Betriebssystems oder Ähnlichem. Die finanzielle Haftung von Abilia ist in jedem Fall auf den Wert des Produkts selbst beschränkt.

Bewahren Sie dieses Handbuch für später auf. Es steht auch zum Abruf und Download auf www.abilia.com zur Verfügung.

9. Voreinstellungen

Wenn HandiCalendar zum ersten Mal geöffnet wird, ist die Anwendung mit den unten aufgeführten Einstellungen eingerichtet.

HandiCalendar			Ausgewählt	
Schutz durch Code 	Code		0353	
	Einstellungen mit Code schützen			
Kalender-Anzeige	Startansicht 	Zeitachsen-Ansicht	X	
		Listenansicht		
		Wochenansicht		
		Monatsansicht		
		Schnellmenü in Kalender zeigen	X	
	Vergrößerungsstufe 	Klein	X	
		Groß		
		Tage rückwärts blättern	X	
		Tage vorwärts blättern	Unzulässig	
		6 Tage maximal		
		Unbegrenzt	X	
	Im gleichen Tag rückwärts blättern		X	
	Digitalzeit für Aktivitäten anzeigen		X	
	Text für Aktivitäten anzeigen		X	
	QHW zeigen 		X	
Aktivitätsanzeige	In Symbolleiste zeigen/verbergen	Schaltfläche Löschen	X	
		Schaltfläche Bearbeiten	X	
		Schaltfläche Alarm auswählen	X	
	Viertelstunden-Uhr zeigen/verbergen	Viertelstunden-Balken 	X	
		Die letzten 15 Minuten als fünf Punkte zeigen	X	
		Digitaler Countdown	X	
		Startzeit in der Vergangenheit erlauben	X	
	Aktivität hinzufügen	Standardalarm	Alarm + Vibration	X
			Alarm	
			Vibration	
		Stiller Alarm		
		Kein Alarm		
		Alarm nur zur Startzeit		
Standard-Erinnerungen		5 Minuten	X	
		15 Minuten		
		30 Minuten		
		1 Stunde		
	2 Stunden			
		1 Tag		
Aktivität über die Bearbeiten-Anzeigen hinzufügen	Zeigen/verbergen	X		
	Typ auswählen	X		
	Schaltfläche für Standardaktivität	X		
Aktivität Schritt für Schritt hinzufügen	Zeigen/verbergen			
	Datum einstellen	X		
	Typ auswählen	X		
	Standardaktivität auswählen	X		
	Bild auswählen	X		

		Name Aktivität	X
		Info-Menü	X
		Löschen nach	X
		Kontrollierbarkeit und Alarm auswählen	X
		Kategorie auswählen	X
		Erinnerung eingeben	X
		Dauer eingeben	
		Endzeit festlegen	X
Anzeige bearbeiten	Zeigen/verbergen	Datum	X
		Name	X
		Startzeit	X
		Endzeit	X
		Dauer	
		Ganztägig	X
		Kontrollierbarkeit	X
		Alarm auswählen	X
		Bild	X
		Info-Menü	X
		Erinnerung	X
		Löschen nach	X
		Kategorie	X
Info-Menü	Zeigen/verbergen	Timer	X
		Bild	X
		Sprechhinweise	X
		Hinweise	X
		Checkliste	X
		Link	
		Adresse	
		Kontakt	
		Telefon	
		SMS	
Kalender-Menü	Zeigen/verbergen	Aktivität hinzufügen	X
		Monatsansicht 	X
		Wochenansicht 	X
		Timer starten	X
		Uhr	X
		Aktivität suchen	X
		Standardaktivitäten	X
		Standardtimer	X
Zeitanzeige	Monatssymbol	Handi-Symbol	
		Piktogramm	
		Wochenzahl	X
		Kein Symbol oder Wochenzahl	
	Schaltfläche im Datumfeld	Aktivität hinzufügen	X
		Analoge Uhr	
	Wochentagsfarben anzeigen		X
	Feiertage anzeigen		X
Zeitangabe 	Methode zur Zeitangabe	Digital (mit Zahlen)	X
		Analog (mit Uhrblatt)	
		Digital mit Analog-Schaltfläche	
		Analog mit Digital-Taste	
	Analoge Tag-Nacht-Teilung	a.m und p.m	X
		Tag und Nacht	

Uhr-Anzeige	Zeigen/verbergen	Datum	X
		Tages- und Nachtzeit	X
		Schaltfläche für Ablesung alle 15 Minuten anzeigen (Glockenfunktion)	
	Uhr	Analog	X
		Digital	
		Analog und digital	
Monatsansicht	Zeigen/verbergen	Periodische Aktivitäten anzeigen	X
Wochenansicht	Anzahl der Tage in der Wochenansicht	7 Tage	X
		5 Tage	
	Aktivitätsanzeige	Immer Zeit	
		Bild	X
	Zeigen/verbergen	Wiederkehrende Aktivitäten	X
		Schaltfläche für Stundenansicht	
Timer starten	Standardtimer auswählen		X
	Bild auswählen		X
	Name Timer		X
	Timer Zeit	1-99 Minuten	X
		1-999 Minuten	
		Stunden und Minuten	
Kategorie	Blau		X
	Lila		X
	Rot		X
	Orange		X
	Grün		X
	Türkis		X
Alarmklang 		Nicht-kontrollierbare Aktivitäten	Handy
		Kontrollierbare Aktivitäten	Handy
		Timer	Handy
		Erinnerungen	Kein Klang
		Vibration bei Erinnerung	X
		Alarmzeit	30 s
Alarm-Anzeige 	Zeigen/verbergen	Schlummer-Schaltfläche anzeigen	X
	Alarmtyp	Vollbild	X
		Benachrichtigung	
Sprachausgabe-Einstellungen	Ein/Aus		Ein
	Sprachausgabe-Schaltfläche anzeigen		X
	Jedes Wort in Texteingabe sprechen		
	Sprechtempo		mittel

Wir helfen Ihnen!

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die neuesten Gebrauchsanweisungen zu suchen.



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Schweden
Telefon +46 (0)8 594 694 0 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norwegen
Telefon +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Großbritannien
Telefon +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

