



GEWA One

Gebrauchsanweisung

Art. nr: 461600 461605 461610 461615

Softwareversion 3.4 oder höher

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Über GEWA One	5
Zweckbestimmung	5
Über dieses Dokument	6
Übersicht über GEWA One	7
Im Lieferumfang enthaltene Teile	7
Mitgelieferte Dokumente	7
Übersicht Multibox	8
Geräteübersicht	9
Erste Schritte mit GEWA One	10
Hardware vorbereiten	10
Benutzerkonto erstellen und Lizenz registrieren myAbilia	10
SIM-Karte in das Mobilgerät einlegen	11
GEWA One konfigurieren	11
In den Bearbeitungsmodus wechseln	12
Einstellungen öffnen	12
Konfigurieren der Alarmfunktion	16
Personalisieren Sie den GEWA One	17
Schaltflächen und Symbole in GEWA One	17
Element hinzufügen	18
Seite hinzufügen	19
Schaltfläche hinzufügen	19
Das Aussehen eines Elements bearbeiten	25
Schaltflächen anordnen	25
Verknüpfung hinzufügen	25
Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen	26
Android-Einstellungen ändern	27
Verwenden Sie GEWA One	29
Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt funktioniert	29
Multibox ein- oder ausschalten	29
Ein- und Ausschalten des Mobilgeräts	30
Jemanden anrufen	31
Eine neue Textnachricht senden	31
Eine Textnachricht lesen	31
Lautstärke einstellen	32
Funktion „Alarm“ verwenden	33

Scanfunktion verwenden	34
Wartung	38
Laden der Batterien	38
Batteriestatus der Multibox prüfen	38
Reinigen des GEWA One	39
Die GEWA One Anwendung aktualisieren	40
Backup erstellen	40
GEWA One wiederherstellen	40
Multibox aktualisieren	41
Fehlerbehebung	42
Lagerung und Entsorgung	43
Lagerung	43
Entsorgung	43
Produktdaten	43
Android-Mobilgerät	43
Multibox	44
Zubehör	44
Wichtige Informationen	45
Sicherheitsdefinitionen	45
Sicherheitshinweise vor Gebrauch von GEWA One	45
Schwere Vorfälle	45
Konformität mit den Anforderungen für Medizinprodukte	46
Produkthaftung	46
Eingetragene Marken	46
Kontaktinformation	47

Einleitung

Über GEWA One

Das Produkt ist eine Fernbedienung für Haushaltsgeräte und elektronische Vorrichtungen. Das Produkt besteht aus einem Mobilgerät und einer Einheit für die Umgebungskontrolle (Multibox). Mit einer installierten SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Produkt auch verwendet werden, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen sowie um Textnachrichten zu senden und zu empfangen.

myAbilia

myAbilia ist ein Webservice zur Verwaltung und Synchronisierung der Daten im Produkt. Um das Produkt nutzen zu können, ist ein myAbilia Benutzerkonto erforderlich und die Lizenz für das Produkt muss registriert sein. GEWA One Siehe *Anpassen von GEWA mit myAbilia* in Dokumenten auf der Produktseite für GEWA One auf abilia.com.

Zweckbestimmung

Das Produkt hilft Anwendern, die physisch, kognitiv bzw. visuell nicht in der Lage sind, eine herkömmliche Fernbedienung zu verwenden, elektronische Geräte zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz zu steuern. Bei solchen elektronischen Geräten kann es sich beispielsweise um Fernsehgeräte, Beleuchtung, Klimaanlage, Türöffner usw. handeln. Der Anwender kann über einen externen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder durch Antippen des Mobilgerät-Bildschirms elektronische Geräte steuern, indem er drahtlos ein Signal an den Empfänger des jeweiligen Geräts sendet.

Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

Über dieses Dokument

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Einrichtung und Verwendung des Produkts. GEWA One Das Benutzerhandbuch richtet sich an Techniker und Hilfspersonen, die für die Konfiguration von GEWA One und die Schulung der Benutzer in der Verwendung des Produkts verantwortlich sind.

Die Konfigurationsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass der Leser mit dem Konzept von Infrarot- (IR) und GEWA Radio (GR)-Signalen vertraut ist.

Übersicht über GEWA One


Im Lieferumfang enthaltene Teile

- Mobilgerät:
 - Android-Smartphone
Das Smartphone ist für GEWA One konfiguriert. Anwendungen können nicht installiert oder entfernt werden.
 - Ladegerät für das Mobilgerät, inkl. USB-Kabel (2 m)
- Gerät für die Umgebungskontrolle (Multibox)
 - Multibox
 - Ladegerät für die Multibox, inkl. USB-Kabel (2 m)
- OTG-Kabel (USB-A- bis USB-C)
- Headset und USB-C-Adapter
- Installationswerkzeug für SIM-Karten
- Beleg mit Lizenzschlüssel

Mitgelieferte Dokumente


- Gebrauchsanweisung (das vorliegende Dokument)

Übersicht Multibox

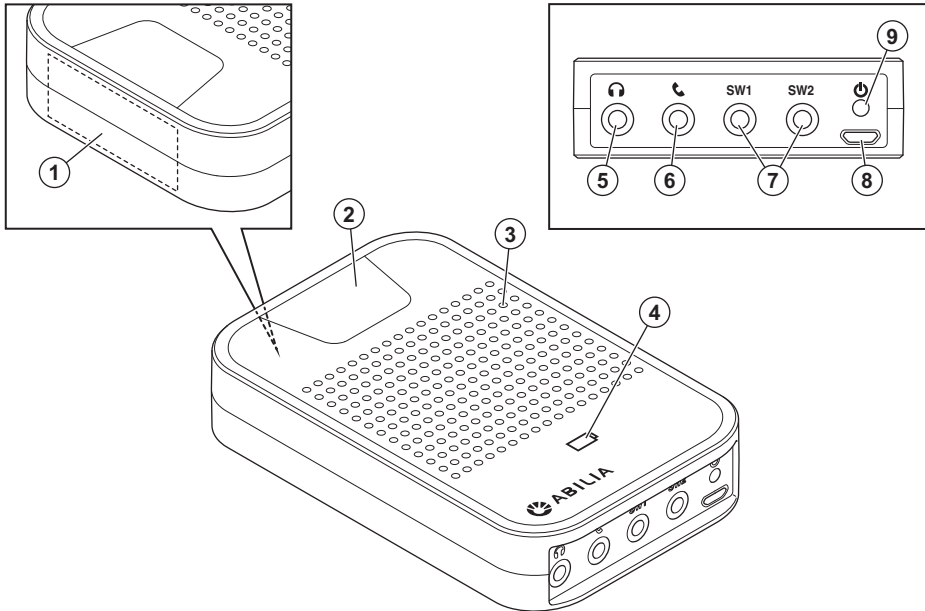

1. Empfänger von Infrarotsignalen (IR) für IR-Aufnahmen.
2. Aktivitätsanzeige
3. Lautsprecher (nicht verwendet)
4. Batteriestatusanzeige
5. Headset-Buchse
6. Telefonbuchse (nicht verwendet)
7. SW1/SW2, Klinkenbuchse für externen Schalter und Relaisausgang
8. Mikro-USB-Port
9. Ein-/Aus-Schaltfläche

Geräteübersicht

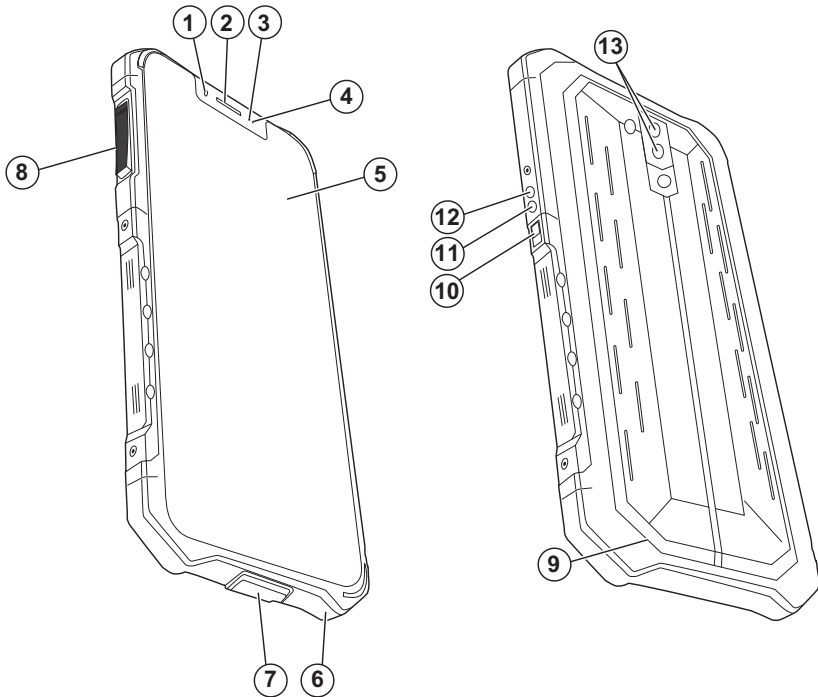

1. Frontkamera (nicht verwendet)
2. Kopfhörer
3. LED-Kontrolllampe
4. Lichtsensor / Näherungssensor
5. Bildschirm
6. Mikrofon
7. USB-C-Anschluss
8. SIM / TF-Steckplatz
9. Lautsprecher
10. Ein-/Aus-Schaltfläche
11. Lautstärkeregler (-)
12. Lautstärkeregler (+)
13. Hauptkamera (nicht verwendet)

Erste Schritte mit GEWA One

Hardware vorbereiten

1. Laden Sie die Akkus von Multibox und Mobilgerät auf. Siehe *Laden der Batterien* auf Seite 38.
2. Wenn ein externer Schalter oder ein Relaisausgang mit GEWA One verwendet werden soll, schließen Sie den Schalter oder Relaisausgang an die Buchse SW1 oder SW2 an Multibox. Siehe *Produktdaten* auf Seite 43 für Informationen zu den SW1- oder SW2-Buchsen.

HINWEIS:

- Schließen Sie nur externe Schalter von Abilia AB an. Wenn andere Steuerschalter verwendet werden, liegt die Verantwortung für die Verwendung GEWA One von beim Benutzer.
- Ein externer Schalter oder ein Relaisausgang wird nicht mit GEWA One geliefert.

Benutzerkonto erstellen und Lizenz registrieren myAbilia

1. Gehen Sie auf einem Computer zu myabilia.com und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Anmelden bei myAbilia
3. Wählen Sie , „Mein Profil“ und „Lizenzen“.
4. Lizenz hinzufügen
5. Geben Sie den mit dem Produkt gelieferten Lizenzschlüssel ein und wählen Sie „Hinzufügen“.
6. Wählen Sie die Registerkarte „Module“.
7. Wählen Sie „GEWA“ und „Image-Archiv“.
8. Wählen Sie Speichern.

SIM-Karte in das Mobilgerät einlegen

HINWEIS: Im Lieferumfang von GEWA One ist keine SIM-Karte enthalten.

1. Öffnen Sie den Deckel „TF/SIM CARD“ auf der linken Seite des Mobilgeräts.
2. Ziehen Sie die SIM-Karten-Halterung mit dem SIM-Karten-Installationswerkzeug aus dem Mobilgerät.
3. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein.
4. Setzen Sie den SIM-Kartenhalter wieder in das Mobilgerät ein.
5. Schließen Sie den „TF/SIM-CARD“ Deckel.

GEWA One konfigurieren


1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche an der Multibox und lassen Sie sie wieder los.
Die Multibox startet und macht einen Ton.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche an der Seite des Mobilgeräts gedrückt.
Das Mobilgerät beginnt mit einer Konfigurationsanleitung.
3. Wählen Sie „Erste Schritte“ und folgen Sie den Anweisungen in GEWA One.
4. Melden Sie sich mit dem myAbilia Benutzerkonto auf dem Mobilgerät an.
5. Folgen Sie den Anweisungen in GEWA One, um die Multibox hinzuzufügen.

HINWEIS:


- Um GEWA One konfigurieren zu können, ist eine Internetverbindung erforderlich. GEWA One sucht automatisch nach einem WLAN-Netzwerk.
- Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, kann GEWA One ohne Internetverbindung verwendet werden. Die Benutzerdaten werden dann jedoch nicht automatisch zwischen GEWA One und myAbilia synchronisiert.

In den Bearbeitungsmodus wechseln

1. Wählen Sie  und „In den Bearbeitungsmodus wechseln“.

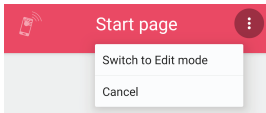

2. Wenn die Konfiguration des GEWA One abgeschlossen ist, wählen  Sie und „In den Normalmodus wechseln“.

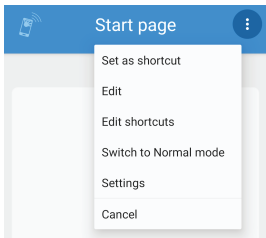

TIPP: Der Bearbeitungsmodus kann in myAbilia deaktiviert werden, um die Benutzeroberfläche bei Verwendung der Scanfunktion zu vereinfachen. Wenn Sie den Bearbeitungsmodus deaktivieren, wird  ausgeblendet. Siehe *Anpassen von GEWA mit myAbilia* in Dokumenten auf der Produktseite für GEWA One auf [abilia.com](https://www.abilia.com).

Einstellungen öffnen

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  und „Einstellungen“.
- Wenn ein externer Schalter angeschlossen ist, verwenden Sie das „Langdruck-Menü“:
 - a. Halten Sie den externen Schalter gedrückt, bis sich das „Langdruck-Menü“ öffnet, und wählen Sie „Einstellungen“. Siehe *Verwendung des GEWA One mit einem externen Schalter* auf Seite 35.
 - b. Wählen Sie „Einstellungen“.

Menü Einstellungen

Symbol	Einstellung	Beschreibung
	„Scannen“	Siehe <i>Scaneinstellungen</i> auf der nächsten Seite.
	„Telefon“	Siehe <i>Telefoneinstellungen</i> auf Seite 15.
	„Multibox“	Multibox-Installation und Statusinformationen. Wenn ein Update verfügbar ist, ist die Schaltfläche „Multibox aktualisieren“ aktiviert. Siehe <i>Multibox aktualisieren</i> auf Seite 41.
	„Sichern & Wiederherstellen“	Funktionen zum Sichern der Daten des Produkts und zur Wiederherstellung aus einer vorhandenen Sicherungsdatei.
	„GEWA Radio-Geräte“	Funkbasierte Geräte, die zusammen mit dem Produkt verwendet werden, hinzufügen, umbenennen, entfernen und/oder ersetzen.
	„Alarm“	Die Alarmfunktion konfigurieren. Siehe <i>Konfigurieren der Alarmfunktion</i> auf Seite 16.
	„myAbilia Konto“	Siehe das Ablaufdatum der Lizenz für GEWA One und melden Sie sich von myAbilia ab.
	„Über“	Softwareversion und Information, ob ein Software-Update verfügbar ist.
	„Zurück zu GEWA One“	Einstellungen schließen und zu GEWA One zurückkehren.

Scaneinstellungen

Symbol	Scaneinstellung	Beschreibung	Wert (Standard)
	„Punktscan-Geschwindigkeit“	Die Geschwindigkeit, mit der sich die Scanlinien über den Bildschirm bewegen.	1-20 (8)
	„Reihen-/Linearscan-Geschwindigkeit“	Die Zeit, zu der jedes Element ausgewählt wird, wenn alle Elemente auf dem Bildschirm durchsucht werden.	0,5–5 s (1 s)
	„Lineares Scannen immer an“	Aktiviert die ausschließliche Verwendung von linearem Scannen (elementweise).	(Deaktiviert)
	„Wartezeit vor Scannen“	Die Verzögerung, bis der Scanvorgang des ersten Elements abgeschlossen und mit dem zweiten Element fortgesetzt wird.	0,0–10,0 s (0,5 s)
	„Langdruck-Menü“	Aktiviert das Langdruck-Menü.	(Aktiviert)
	„Verzögerung Langdruck-Menü“	Die Zeit, die der externe Schalter gedrückt bleiben muss, damit sich das „Langdruck-Menü“ öffnet.	1,0–5,0 s (2,5 s)
	„Scan-Ton“	Aktiviert oder deaktiviert den Signalton für den Scanvorgang.	(Deaktiviert)
	„Zurück-Schaltfläche Scan-Ton“	Option zur Aufnahme von Tonsignalen für die Zurück-Schaltfläche.	
	„Scanfeld Darstellung“	Optionen für die Farbe und Rahmenstärke des markierten Feldes während des Scanvorgangs.	

Telefoneinstellungen

Symbol	Telefoneinstellung	Beschreibung
	„Telefonlautstärke“	„Medienvolumen“: Scan-Ton. „Anruflautstärke“: Ausgabelautstärke eines Telefonats. „Ruftonlautstärke“.
	„Automatische Bildschirmhelligkeit“	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Helligkeit der Umgebung.
	„Bildschirmhelligkeit“	Manuelle Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Wert 0-8.
	„Bildschirm-Zeitüberschreitung“	Zeit ohne Aktivität am Mobilgerät, nach der der Bildschirm abgeschaltet wird. Wert 1-15 Minuten oder Nie.
	„Bildschirm während des Ladens an“	Wenn diese Option aktiviert ist, erlischt der Bildschirm nicht, während das Mobilgerät geladen wird.
	„Toneinstellungen“	Öffnet die Android-Toneinstellungen.
	„Android-Einstellungen“	Öffnet die Android-Standardeinstellungen.

Konfigurieren der Alarmfunktion

Die Funktion aktiviert ein IR-Signal, ein GEWA-Funksignal oder einen Relaisausgang. Informationen zur Verwendung der Alarmfunktion finden Sie unter *Funktion „Alarm“ verwenden* auf Seite 33.

Alarmfunktion aktivieren

1. Wählen Sie in Einstellungen „Alarm“.
2. Anruffunktion aktivieren
3. Wählen Sie einen Typ aus und befolgen Sie die Anweisungen in GEWA One.

Zeit für Alarmverzögerung bearbeiten

1. Wählen Sie in Einstellungen „Alarm“.
2. Wählen Sie „Alarmverzögerung“.
3. Wählen Sie – oder +.

Personalisieren Sie den GEWA One

GEWA One müssen für den Benutzer mit Seiten und Schaltflächen für die Umgebungssteuerung angepasst werden.

Seiten und Schaltflächen können auf myabilia.com hinzugefügt werden. Die mit vorgenommene Anpassung myAbilia wird mit dem Mobilgerät synchronisiert. Siehe *Anpassen von GEWA mit myAbilia* in Dokumenten auf der Produktseite für GEWA One auf abilia.com.

TIPP: Sie können Bilder in myAbilia hochladen und anstelle der Symbole in GEWA One verwenden. Bilder können nur zu Elementen in myAbilia hinzugefügt werden.

Schaltflächen und Symbole in GEWA One

	Optionen		Speichern
	Neues Element		Zurück
	Symbol auswählen		Kein GR-Befehl
	Farbe ändern		Kein Makrobefehl
	Ton aufnehmen		Kein GR-Befehl

Element hinzufügen

1. Wählen  Sie im Bearbeitungsmodus.
2. Wählen Sie 
Eine Liste aller verfügbaren Symbole öffnet sich.
3. Wählen Sie ein Symbol.
4. Wählen Sie „Name“ und geben Sie einen Namen ein. Zum Beispiel „Schlafzimmer“ oder „TV“.

HINWEIS: Sie müssen ein Symbol oder einen Namen auswählen, aber es ist nicht notwendig, beide auszuwählen.

TIPP: Um per Sprache zu schreiben, wählen Sie .

5. Wenn Sie Farben ändern möchten:
 - a. Wählen Sie .
 - b. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
 - c. Wählen Sie eine Symbol- und Textfarbe
 - d. Wählen Sie .
6. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen
 - a. Wählen Sie .
 - b. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen Siehe *Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen* auf Seite 26.
 - c. Wählen Sie .
7. Gehen Sie wie folgt vor:
 - *Seite hinzufügen*, siehe Seite 19.
 - *Schaltfläche hinzufügen*, siehe Seite 19

Seite hinzufügen

Die Funktionen der Umgebungskontrolle können auf separaten Seiten organisiert werden. Beispielsweise können separate Seiten für Fernseher, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kontakte hinzugefügt werden.

1. Führen Sie das Verfahren in *Element hinzufügen* auf Seite 18 durch.
2. Seite auswählen▼.
3. Wenn Sie das Seitenlayout ändern möchten:
 - a. Wählen Sie ▼ im zweiten Menü.
 - b. Wählen Sie ein Seitenlayout.
Standardmäßig ist das dynamische Seitenlayout ausgewählt. In einem dynamischen Layout ändern sich Größe und Position der Schaltflächen abhängig von der Anzahl der Schaltflächen.
4. Wählen Sie .

Schaltfläche hinzufügen

Schaltflächen können so konfiguriert werden, dass sie Signale für Umgebungssteuerungsfunktionen senden, Alarmer aktivieren, Kommunikationsfunktionen öffnen und Seiten öffnen. Eine Schaltfläche besteht aus einem Befehl und einem Namen oder einem Symbol.

Auf einer Seite können zugehörige Schaltflächen hinzugefügt werden. So können beispielsweise auf einer Seite mit dem Namen „Schlafzimmer“ alle Schaltflächen für die Umgebungssteuerung im Schlafzimmer hinzugefügt werden. Schaltflächen können nicht auf andere Seiten verschoben werden.

IR-Schaltfläche hinzufügen


GEWA One kann die folgenden Signale für IR-Elemente verwenden.

Signalton	Anwendung	Anwendungsbeispiele
IR	IR-Sender aller Art.	Fernbedienungen für Fernseher oder Kabelbox.
GewaLink	Alle Abilia-Einheiten zur Umgebungskontrolle.	GEWA Andromeda BED oder Fensteröffner.
4096	Funktionen mit strenger Berechtigung.	Türen zu Wohnung oder Haus.

1. Führen Sie das Verfahren in *Element hinzufügen* auf Seite 18 durch.
2. Wählen Sie .
Standardmäßig ist „IR-Element“ ausgewählt. Die neue Schaltfläche wird mit dem Symbol  hinzugefügt.
3. Wählen Sie die neue Schaltfläche.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - IR Aufzeichnen
Siehe *IR-Signal aufzeichnen* auf Seite 21.
 - GEWA-Link verwenden
 - GEWA 4096 Code verwenden
5. Befolgen Sie die Anweisungen in GEWA One.

IR-Signal aufzeichnen

1. Stellen Sie die Fernbedienung und die Multibox auf eine ebene Fläche, um sie ruhig zu halten.
2. Richten Sie die TV-Fernbedienung aus einem Abstand von ca. 20 cm (A) auf die Multibox.

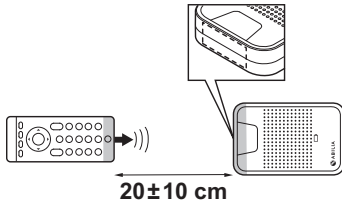

3. Halten Sie die Fernbedienungstaste gedrückt, bis das blaue Licht an der Multibox erlischt.

TIPP: Wenn die IR-Aufzeichnung fehlschlägt:

- Ändern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Multibox.
- Achten Sie darauf, dass kein Licht, wie starke Sonneneinstrahlung, die Multibox stört.
- Wiederholen Sie den Vorgang, aber drücken Sie die Fernbedienungstaste in Schritt 3 und lassen Sie sie wieder los.

IR-Makrotaste hinzufügen

HINWEIS: IR-Elemente, die in einem Makro enthalten sind, müssen zuvor als separate Schaltflächen erstellt worden sein. IR-Signale können nicht direkt in ein Makro aufgenommen werden.

Ein Makro ist eine Abfolge von Signalen. Eine Schaltfläche mit Makrofunktion kann eine Abfolge von mehreren Signalen senden, so als wären mehrere Schaltflächen nacheinander gedrückt worden, z.B. um den Fernseher einzuschalten und ein bestimmtes Programm auszuwählen.

1. Führen Sie das Verfahren in *Element hinzufügen* auf Seite 18 durch.
2. Wählen Sie und ▼ „IR Makro“.
3. Wählen Sie .
Die neue Schaltfläche wird mit dem Symbol hinzugefügt.
4. Wählen Sie die neue Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen in GEWA One.

GEWA-Radio Schaltfläche hinzufügen

HINWEIS: Die mit dem Produkt zu verwendenden GEWA Radio-Geräte müssen erst in Einstellungen hinzugefügt werden, ehe eine Schaltfläche mit einem GEWA Radio-Signal hinzugefügt werden kann. Siehe *Einstellungen öffnen* auf Seite 12 und Bedienungsanleitung für das GEWA Radio-Gerät.

1. Führen Sie das Verfahren in *Element hinzufügen* auf Seite 18 durch.
2. Wählen Sie ▼ und „GEWA Radio“.
3. Wählen Sie .

Die neue Schaltfläche wird mit dem Symbol  hinzugefügt.

4. Wählen Sie die neue Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen in GEWA One.

Alarmschaltfläche hinzufügen

HINWEIS: Alarmschaltflächen können nicht in myAbilia hinzugefügt werden.

1. Führen Sie das Verfahren in *Element hinzufügen* auf Seite 18 durch.
2. Wählen Sie und ▼ „Alarm aktivieren“.
3. Wählen Sie .

Die neue Schaltfläche wird mit dem Symbol  hinzugefügt.

Seitenlink hinzufügen

Seitenverknüpfungen sind Schaltflächen, die mit Seiten verlinken. Mehrere Schaltflächen können auf dieselbe Seite verweisen.

1. Wählen  Sie im Bearbeitungsmodus.
2. Wählen Sie ▼ und „Seitenlink“.
3. Wählen Sie .

Die neue Schaltfläche wird mit dem Symbol  hinzugefügt.

4. Wählen Sie die neue Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen in GEWA One.

Kommunikationsschaltfläche hinzufügen

Eine Telefon-, Nachrichten- oder Ziffernblock-Schaltfläche hinzufügen

Telefon-, Nachrichten- und Ziffernblock-Schaltflächen müssen hinzugefügt werden, um Telefongespräche führen und Textnachrichten senden zu können. Auf den Schaltflächen werden Benachrichtigungen über verpasste Anrufe und neue Textnachrichten angezeigt.

1. Wählen  Sie im Bearbeitungsmodus.
2. Wenn Sie einen Namen für die Schaltfläche eingeben möchten, wählen Sie „Name“ und geben Sie einen Namen ein.
3. Wählen Sie  und „Kommunikation“.
4. Wählen Sie  im zweiten Menü und eine der folgenden Optionen:
 - Telefon
 - Mitteilung
 - Ziffernblock

Das Symbol kann nicht geändert werden.

5. Wenn Sie Farben ändern möchten:
 - a. Wählen Sie .
 - b. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
 - c. Wählen Sie eine Symbol- und Textfarbe
 - d. Wählen Sie .
6. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen
 - a. Wählen Sie .
 - b. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen Siehe *Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen* auf Seite 26.
 - c. Wählen Sie .
7. Wählen Sie .

TIPP: Um sicherzustellen, dass der Benutzer immer die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe und neue Nachrichten sieht, fügen Sie Verknüpfungen für die Schaltflächen hinzu. Siehe *Verknüpfung hinzufügen* auf Seite 25.

Eine Kontakt-Schaltfläche hinzufügen

1. Wählen  Sie im Bearbeitungsmodus.
2. Wählen Sie „Name“ und geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
3. Wählen Sie  und „Kommunikation“.
Standardmäßig ist „Kontakt“ ausgewählt.
4. Wählen Sie „Telefonnummer“ und geben Sie eine Telefonnummer für den Kontakt ein.
5. Wenn Sie Farben ändern möchten:
 - a. Wählen Sie .
 - b. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
 - c. Wählen Sie eine Symbol- und Textfarbe
 - d. Wählen Sie .
6. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen
 - a. Wählen Sie .
 - b. Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen Siehe *Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen* auf Seite 26.
 - c. Wählen Sie .
7. Wählen Sie .

TIPP:

- Sie können Bilder für Ihre Kontakte in myAbilia hochladen. Bilder können nur zu Elementen in myAbilia hinzugefügt werden.
- Fügen Sie alle Kontaktschaltflächen auf einer Seite hinzu, um sie leicht zu finden. Siehe *Seite hinzufügen* auf Seite 19.

DAS Aussehen eines Elements bearbeiten

Sie können den Namen, das Symbol und die Farbe von Text und Symbol einer Seite oder Schaltfläche ändern.

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  auf einer Seite oder Schaltfläche und dann „Bearbeiten“.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie .

TIPP: Sie können Bilder in myAbilia hochladen und anstelle der Symbole in GEWA One verwenden. Bilder können nur zu Elementen in myAbilia hinzugefügt werden.

Schaltflächen anordnen

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  auf einer Schaltfläche und „Nach oben“ oder „Nach unten“.

HINWEIS: Sie können Schaltflächen nur innerhalb einer Seite verschieben. Schaltflächen können nicht auf andere Seiten verschoben werden. Auf myabilia.com gibt es weitere Möglichkeiten, die Schaltflächen anzuordnen.

Verknüpfung hinzufügen

Verknüpfungen zu häufig verwendeten Elementen können hinzugefügt werden, um sie immer unten auf dem Bildschirm in GEWA One anzuzeigen. Es können bis zu 4 Schaltflächenkombinationen gleichzeitig angezeigt werden.

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  ein Element aus und wählen Sie „Als Verknüpfung festlegen“.
Die Schaltflächenkombination erscheint unten auf dem Bildschirm.

Verknüpfungen bearbeiten

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  und „Verknüpfungen bearbeiten“.
2. Wählen Sie  auf einer Verknüpfung und „Nach vorn“, „Zurück“ oder „Löschen“.
3. Wählen Sie .

Einen Signalton für den Scanvorgang aufzeichnen

Alternativ zum Standard-Scan-Sound können Sie Scan-Sounds für einzelne Seiten und Schaltflächen aufzeichnen.

Scangeräusche werden während des Reihen- und Linearscans abgespielt. Sie können auch einen Scan-Ton einstellen, der abgespielt wird, wenn eine Seite oder Schaltfläche ausgewählt wird.

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  auf einer Seite oder Schaltfläche und dann „Bearbeiten“.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie „Aufzeichnen“ und machen Sie einen Ton. Sagen Sie zum Beispiel das Wort „Schlafzimmer“.
4. Wählen Sie die Stopp-Schaltfläche, um die Aufnahme zu stoppen, oder warten Sie, bis die Aufnahme beendet ist.
5. Wenn Sie den aufgenommenen Ton hören möchten, wählen Sie die Wiedergabetaste.
6. Wenn Sie möchten, dass der Ton abgespielt wird, wenn eine Seite oder Schaltfläche ausgewählt wird, wählen Sie ▼ und dann „Scannen UND Auswahl“.
7. Wählen Sie , um den Ton zu speichern. Um den Ton zu verwerfen und einen neuen Ton aufzunehmen, tippen Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche.

Ein Ton für die Zurück-Schaltfläche kann in „Einstellungen“, „Scannen“ und „Scan-Ton der Zurück-Taste“ aufgenommen werden.

Android-Einstellungen ändern

Die Android-Einstellungen sind bei Lieferung des Produkts für GEWA One optimiert. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie neben den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Android-Einstellungen Änderungen vornehmen, da dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

Die Android-Einstellungen öffnen

1. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus  und „Einstellungen“.
2. Wählen Sie „Telefon“.
3. Wählen Sie „Android-Einstellungen“

Ändern der Sprache

1. Wählen Sie unter „Android-Einstellungen“ „System“, „Sprachen & Eingabe“ und „Sprachen“.
2. Wählen Sie „Sprache hinzufügen“ und die gewünschte Sprache aus.
3. Ziehen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, zuerst in die Liste.

HINWEIS: Wenn Sie zu einer Sprache wechseln, die nicht von GEWA One unterstützt wird, werden die Menütexte in GEWA One in der nächsten Sprache in der Liste angezeigt, die unterstützt wird, oder in Englisch, wenn keine andere Sprache ausgewählt ist.

4. Wählen Sie , um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Schriftgröße ändern

1. Wählen Sie unter „Android-Einstellungen“ „Anzeige“, „Erweitert“ und „Schriftgröße“.
2. Wählen Sie eine Schriftgröße.
3. Wählen Sie , um zu den Einstellungen zurückzukehren.

WLAN-Netzwerk ändern

1. Wählen Sie unter „Android-Einstellungen“ „Netzwerk & Internet“ und „WLAN“.
2. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus.
3. Geben Sie ein Passwort ein und wählen Sie „Verbinden“.
4. Wählen Sie , um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Verwenden Sie GEWA One



WARNUNG: Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass alle angeschlossenen Haushaltsgeräte und elektronischen Vorrichtungen ordnungsgemäß installiert, bestimmungsgemäß verwendet und sicher benutzt werden können.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt funktioniert

- Platzieren Sie die Multibox im selben Raum wie das Mobilgerät in einem Abstand von weniger als 1 m vom Mobilgerät.
- Halten Sie das Produkt von Geräten wie Mikrowellenherden fern, die das Bluetooth® Signal stören könnten.
- Laden Sie die Akkus von Multibox und Mobilgerät täglich auf.

Multibox ein- oder ausschalten

- Um die Multibox zu starten, drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche und lassen die Schaltfläche wieder los. Ein Signalton zeigt an, dass die Multibox eingeschaltet ist.
- Um die Multibox auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche gedrückt. Ein Signalton zeigt an, dass die Multibox ausgeschaltet ist.

Ein- und Ausschalten des Mobilgeräts

HINWEIS: Der Bildschirm schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ab. Siehe *Telefoneinstellungen* auf Seite 15.

Wenn Sie den Touchscreen verwenden:

- Um das Mobilgerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.
- Um das Mobilgerät vollständig auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche gedrückt, bis sich das Ein/Aus-Menü auf dem Bildschirm öffnet.
- Um das Mobilgerät in den Ruhemodus zu versetzen, drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche. Der Bildschirm erlischt.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche, um das Mobilgerät aus dem Schlafmodus zu starten.

Wenn Sie einen externen Schalter verwenden:

- Um das Mobilgerät auszuschalten, öffnen Sie das „Langdruck-Menü“ und wählen Sie „Weitere Optionen“, „Strommenü“ und „Ausschalten“.
- Um das Mobilgerät in den Ruhemodus zu versetzen, öffnen Sie das „Langdruck-Menü“ und wählen Sie „Weitere Optionen“ und „Aus“.
- Um das Mobilgerät aus dem Ruhemodus einzuschalten, drücken Sie den externen Schalter.

Jemanden anrufen

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie eine Kontakttaaste.
- Verwenden Sie eine Telefontaaste.
- Verwenden Sie eine Ziffernblock-Schaltfläche.

Die Tonausgabe erfolgt standardmäßig über den Lautsprecher des Mobilgeräts. Wenn ein Headset angeschlossen ist, erfolgt die Tonausgabe über das Headset.

Um die Kommunikationstasten zu verwenden, muss eine SIM-Karte im Mobilgerät installiert sein. Siehe *SIM-Karte in das Mobilgerät einlegen* auf Seite 11

Eine neue Textnachricht senden

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie eine Kontakttaaste.
- Verwenden Sie eine Nachrichten-Schaltfläche.
- Verwenden Sie eine Ziffernblock-Schaltfläche.

TIPP:

- Um per Sprache zu schreiben, wählen Sie .
- Während Sie die Nachricht eingeben, werden Vorschläge für die nächsten Wörter oberhalb der Tastatur angezeigt. Wählen Sie ein vorgeschlagenes Wort, um es einzufügen.

Um die Kommunikationstasten zu verwenden, muss eine SIM-Karte im Mobilgerät installiert sein. Siehe *SIM-Karte in das Mobilgerät einlegen* auf Seite 11

Eine Textnachricht lesen


1. Wählen Sie eine Nachrichten-Schaltfläche.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste aus.

TIPP: Auf der Schaltfläche „Nachrichten“ wird ein Benachrichtigungssymbol angezeigt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist.

Lautstärke einstellen

An der oberen rechten Seite des Mobilgeräts befinden sich zwei Lautstärketasten. Die obere Taste erhöht die Lautstärke, die untere verringert die Lautstärke. Wenn Sie eine Lautstärketaste drücken, erscheinen ein Schieberegler und drei Schaltflächen auf dem Bildschirm.

- Drücken Sie eine Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Der Schieber (A) bewegt sich nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf (B), um die Lautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen einzustellen: EIN, nur Vibration oder AUS.
- Tippen Sie auf (C), um die Medienlautstärke ein- und auszuschalten.
- Tippen Sie auf (D), um die Android-Toneinstellungen zu öffnen.

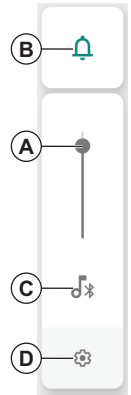

Um die Lautstärke während eines Gesprächs anzupassen, während Sie die Scanfunktion verwenden, öffnen Sie das „Langdruck-Menü“ und wählen Sie „Lautstärke erhöhen“ oder „Lautstärke senken“.

Funktion „Alarm“ verwenden

HINWEIS:

- Verwenden Sie die Alarmfunktion nicht als Notfallalarm und verwenden Sie sie nicht, wenn der Benutzer in Gefahr ist, wenn die Funktion ausfällt. Mögliche Gründe für den Ausfall der Alarmfunktion sind leere Batterien, unbeabsichtigte Unterbrechung der Verbindung oder Verlassen des Reichweitenbereichs, Ausfall des Telefonnetzes usw.
- Ein externer Schalter oder ein Relaisausgang wird nicht mit GEWA One geliefert.

Um die Alarmfunktion nutzen zu können, muss sie aktiviert sein. Siehe *Alarmfunktion aktivieren* auf Seite 16.

Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn Sie einen externen Schalter drücken und für die konfigurierte Anzahl von Sekunden gedrückt halten. Die Funktion aktiviert ein IR-Signal, ein GEWA-Funksignal oder einen Relaisausgang. Die Multibox startet automatisch neu, wenn die Funktion „Alarm“ aktiviert wurde.

Die Alarmfunktion kann auch über eine Schaltfläche aktiviert werden. Siehe *Alarmschaltfläche hinzufügen* auf Seite 22.

Scanfunktion verwenden

Stellen Sie sicher, dass ein externer Schalter an die Buchse SW1 oder SW2 der Multibox angeschlossen ist.

Sie können die folgenden Scanmethoden auswählen:

- Zeilenscan (Standardeinstellung): Ein markiertes Feld bewegt sich zwischen allen Objekten auf dem Bildschirm – zuerst vertikal (zeilenweise), dann horizontal (elementweise).
- Linearer Scan: Ein hervorgehobenes Feld bewegt sich elementweise zwischen allen Objekten auf dem Bildschirm.
- Punktscan: Zwei sich überkreuzende Linien bewegen sich über den Bildschirm – zuerst die vertikale Linie, dann die horizontale Linie.

HINWEIS: Beim Versenden einer Nachricht über die Tastatur verhält sich „Linear Scannen“ wie „Zeilenscan“ und „Zeilenscan“ verwendet einen Zwischenschritt (horizontale Gruppenscans).

Um die Scanmethode zu ändern, siehe *Verwendung des „Langdruck-Menüs“* auf Seite 35.

Um die Scan-Einstellungen (z. B. die Scan-Geschwindigkeit) zu ändern, siehe *Scaneinstellungen* auf Seite 14.

Verwendung des GEWA One mit einem externen Schalter

1. Drücken Sie den externen Schalter.
Der Scanvorgang beginnt.
2. Den markierten Bereich / das markierte Element oder die vertikale Position wählen.
3. Wenn Sie Zeilenscan verwenden:
 - a. Wählen Sie das markierte Element aus.
4. Wenn Sie Punktscan verwenden:
 - a. Nähern Sie sich einer präziseren vertikalen Position.
 - b. Wählen Sie die vertikale Position.
Der horizontale Scanvorgang beginnt.
 - c. Wählen Sie die horizontale Position.
 - d. Nähern Sie sich einer präziseren horizontalen Position.
 - e. Wählen Sie ein Element am Linienschnittpunkt aus.

Wenn Sie den externen Schalter nicht drücken, wird der Scanvorgang wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.

Um zur vorherigen Seite oder Ansicht zurückzukehren, verwenden Sie die Option „Zurück“ im „Langdruck-Menü“. Siehe *Verwendung des „Langdruck-Menüs“* auf Seite 35.

Verwendung des „Langdruck-Menüs“

Das „Langdruck-Menü“ enthält Optionen zum Scannen und Navigieren. Um das „Langdruck-Menü“ zu öffnen, halten Sie den Schalter 2,5 Sekunden lang gedrückt.

Zum Ändern der Verzögerungszeit für das Öffnen des „Langdruck-Menüs“ oder zum Deaktivieren des „Langdruck-Menüs“ siehe *Scaneinstellungen* auf Seite 14.

Funktionen im „Langdruckmenü“

	„Wechseln“	Schaltet zwischen „Punktscan“ und „Zeilenscan“ um. Das Symbol ändert sich je nach gewähltem Scantyp. HINWEIS: Der lineare Scan wird durch Aktivieren der Scaneinstellung „Lineare Abtastung immer an“ ausgewählt. Siehe <i>Scaneinstellungen</i> auf Seite 14.
	„Tastatur schließen“	Nur verfügbar, wenn die Tastatur geöffnet ist. Schließt die Tastatur, um das Scannen der anderen Schaltflächen auf dem Bildschirm zu ermöglichen.
	„Navigation“	Öffnet die Navigationsoption, um auf dem Bildschirm nach oben und unten zu blättern. Nur verfügbar, wenn Sie blättern müssen, z. B. wenn Sie ein Symbol für eine Schaltfläche oder Seite auswählen.
	„Zurück“	Geht im Aktivitätsstapel einen Schritt zurück. HINWEIS: Bei Verwendung eines externen Schalters gelangen Sie so am schnellsten zur vorherigen Seite oder Ansicht zurück.
	„Einstellungen“	Öffnet die Einstellungen.
	„GEWA One“	Öffnet GEWA One.
	„Bearbeitungsmodus“ / „Normalmodus“	Wechselt in GEWA One zwischen Bearbeitungsmodus und Normalmodus.
	„Weitere Optionen“	Öffnet Optionen, die nicht auf die erste Seite des „Langdruck-Menüs“ passen.
	„Lautstärke erhöhen“	Erhöht die Lautstärke. Nur während eines Telefonats verfügbar.
	„Lautstärke senken“	Verringert die Lautstärke. Nur während eines Telefonats verfügbar.

	„Aus“	Schaltet den Bildschirm aus und bringt ihn in den Ruhemodus.
	„Ein/Aus-Menü“	Öffnet das Ein/Aus-Menü auf dem Mobilgerät.
	„Abbrechen“	Schließt das „Langdruck-Menü“.

Wartung

Laden der Batterien

 **ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich das mit GEWA One mitgelieferte Ladegerät.

Es wird empfohlen, die Multibox und das Mobilgerät jede Nacht aufzuladen, wenn GEWA One nicht verwendet wird.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Geräts.
2. Stecken Sie den großen Stecker des USB-Kabels in ein Batterieladegerät.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

Batteriestatus der Multibox prüfen

Die Batteriestatusanzeige zeigt den Ladezustand der Batterie an. Der Batteriestatus wird auch in Einstellungen im Menü „Multibox“ angezeigt.

- Kein Licht: Die Multibox ist ausgeschaltet.
- Grünes Licht alle fünf Sekunden: Die Multibox ist eingeschaltet und geladen.
- Grünes, blinkendes Licht: Die Batterie wird geladen.
- Grünes Dauerlicht: Die Batterie ist vollständig geladen und das Ladegerät ist angeschlossen.
- Rotes, blinkendes Licht: Die Batterieladung liegt unter 10 %.

Reinigen des GEWA One

 **WARNUNG:** Verwenden Sie keine flüssigen oder aerosolbasierten Reinigungsmittel, die brennbare Substanzen enthalten.

1. GEWA One ausschalten. Siehe *Multibox ein- oder ausschalten* auf Seite 29 und *Ein- und Ausschalten des Mobilgeräts* auf Seite 30.
2. Trennen Sie alle Kabel.
3. GEWA One mit einem feuchten weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf ein schwaches Reinigungsmittel für die Multibox.
4. GEWA One mit einem trockenen Tuch trocknen.

Die GEWA One Anwendung aktualisieren

Prüfen Sie regelmäßig, ob die neueste Version der GEWA One Anwendung installiert ist.

1. Wählen Sie unter Einstellungen „Über“.
2. Wenn eine neue Version verfügbar ist, tippen Sie auf „Auf Updates prüfen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Backup erstellen

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass immer ein Backup der Systemkonfigurationen vorhanden ist, die verwendet werden können, wenn GEWA One nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn das Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist, werden die Einstellungen, Schaltflächen und Seiten automatisch mit myAbilia synchronisiert. Eine weitere Sicherung ist nicht erforderlich.

Wenn das Mobilgerät ohne Internetverbindung verwendet wird, erstellen Sie nach der Konfiguration von GEWA One ein Backup.

1. Wählen Sie in „Backup & Wiederherstellen“.
 2. Wählen Sie „Backup“.
- Die Datei wird in „gewa-connect-files“ auf dem Mobilgerät gespeichert.

GEWA One wiederherstellen

Wenn das Mobilgerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie GEWA One wiederherstellen, wenn Sie ein Backup erstellt haben. Zum Erstellen eines Backups siehe *Backup erstellen* auf Seite 40.

1. Wählen Sie in „Backup & Wiederherstellen“.
2. Wählen Sie „Wiederherstellen“.
3. Bestätigen Sie, dass Sie die Daten wiederherstellen möchten. GEWA One wird sofort mit den Daten aus der Backup-Datei aktualisiert.

Multibox aktualisieren

Wenn ein neues Update verfügbar ist, wird im Menü „Multibox“ in die Schaltfläche „Multibox aktualisieren“ aktiviert und der Text „Update verfügbar“ angezeigt.

1. Verbinden Sie die Multibox über ein geeignetes USB-Kabel mit dem Mobilgerät.
Auf dem Mobilgerät öffnet sich ein Berechtigungsdialog.
2. Auswählen, um die Berechtigung zu erteilen.
3. Wählen Sie „Multibox aktualisieren“ und folgen Sie den Anweisungen.
Die Multibox gibt einen Signalton aus und das Update wird gestartet.

HINWEIS: Trennen Sie das USB-Kabel erst, wenn die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Unterstützung für den GEWA One benötigen, wenden Sie sich an die unter *Kontaktinformation* auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanleitung angegebene Stelle oder besuchen Sie www.abilia.com/intl/manuals.

Problem	Ursache	Lösung
Die Multibox oder das Mobilgerät startet nicht, wenn Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche drücken.	Die Batterie ist leer.	Batteriewechsel. Siehe <i>Laden der Batterien</i> auf Seite 38.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Support. Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite oder auf abilia.com , um Ihren nächstgelegenen Händler zu finden.
Die Multibox funktioniert nicht richtig.	Die Multibox muss neu gestartet oder zurückgesetzt werden.	Starten Sie das Mobilgerät und die Multibox neu. Wenn die Multibox immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Schaltfläche, um sie zurückzusetzen. Ein Signalton zeigt an, dass die Multibox zurückgesetzt wird. Koppeln Sie die Multibox mit dem mobilen Gerät unter „Einstellungen“ und „Multibox“.
Die Aufzeichnung von IR-Signalen schlägt fehl.	Der Sender ist zu nah oder zu weit vom IR-Empfänger des entfernt.	Vergrößern oder verringern Sie den Abstand zwischen und Sender.
	Der Sender verwendet Funk- oder Bluetooth-Signale.	Stellen Sie sicher, dass der Sender keine Funk- oder Bluetooth-Signale verwendet. Es können nur IR-Signale aufgezeichnet werden.
	Licht, wie starke Sonneneinstrahlung, stört die Multibox.	Multibox vor Licht schützen.
	Die Fernbedienungstaste gedrückt halten, um IR-Signale aufzuzeichnen, funktioniert nicht.	Drücken Sie die Fernbedienungstaste und lassen Sie sie los, anstatt sie gedrückt zu halten.
Kann nicht zu einem Objekt navigieren, wenn die Scan-Funktion verwendet wird.	Es ist nicht möglich, zu einigen Elementen zu navigieren, ohne das „Langdruck-Menü“ zu verwenden.	Verwendung des „Langdruck-Menüs“ Siehe <i>Verwendung des „Langdruck-Menüs“</i> auf Seite 35.

Lagerung und Entsorgung

Lagerung

Lagern Sie das Produkt in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.

Entsorgung




Das Produkt enthält elektrische Komponenten, die dem Recycling zugeführt werden müssen. Eine fachgerechte Entsorgung ist zu gewährleisten.

Produktdaten

Android-Mobilgerät

Akkus	Lithium-Polymer, wiederaufladbar, 5.000 mAh
Kameras (hinten und vorne)	16/8 MP Nicht verwendet
Anzeige	6,2 Zoll
Betriebssystem	Android 9
Umgebungstemperatur:	-30°C - +60°C
Abmessungen, L × B × T	166 x 83 x 13,3 mm
Gewicht, inkl. Akku	267,5 g
Anschluss für Datenübertragung	
Gerätehersteller	Ulefone
Geschätzte Lebensdauer	3 Jahre

Multibox

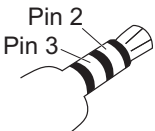Lautsprecher	3 W
Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	3350 mAh
Batterielaufzeit	52 h (Schlafmodus)
Stromverbrauch	20 mA (Schlafmodus), 330 mA (Audiowiedergabe)
Stromversorgung	5 V
Umgebungskontrolle	GewaLink, GEWA 4096, aufgezeichnete IR-Signale und GEWA Radio
Bluetooth®	3.0
Anschluss für Telefon	Nicht verwendet
SW1, SW2	3,5-mm-Klinkenbuchse für externen Schalter und Relaisausgang HINWEIS: Relaisausgänge müssen mit 3,5 mm 4-poligen Klinkensteckern angeschlossen werden. Nur Pin 2 und 3 der Klinkenstecker werden verwendet. 
Abmessungen, L × B × T	108 × 67 × 22 mm
Gewicht, inkl. Akku	153 g
Anschluss für Datenübertragung	Mikro-USB 2.0
Geschätzte Lebensdauer	3 Jahre

Zubehör

Verfügbares Zubehör finden Sie unter www.abilia.com oder scannen Sie den QR Code.



Scan mich!

Wichtige Informationen

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und verstehen.

Sicherheitsdefinitionen

 **WARNUNG:** Verletzungs- oder Todesgefahr bei Nichtbeachtung der Anweisungen.

 **ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann das Produkt beschädigt werden.

HINWEIS: Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

Sicherheitshinweise vor Gebrauch von GEWA One

 **WARNUNG:** Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass alle angeschlossenen Haushaltsgeräte und elektronischen Vorrichtungen ordnungsgemäß installiert, bestimmungsgemäß verwendet und sicher benutzt werden können.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder aerosolbasierten Reinigungsmittel, die brennbare Substanzen enthalten.

Schwere Vorfälle

Tritt im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegender Vorfall auf, muss dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Ein Vorfall gilt als schwerwiegend, wenn er direkt oder indirekt zu einer der folgenden Situationen geführt hat, geführt haben könnte oder hätte führen können:

- Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person.
- Vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person.
- Eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Konformität mit den Anforderungen für Medizinprodukte

GEWA One wird als technische Hilfe für Menschen mit Behinderungen vermarktet und erfüllt alle notwendigen Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien für Medizinprodukte.

Produkthaftung

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit ISO 14971 entwickelt und einer Risikobewertung unterzogen. Die Bedienungsanleitung und die technischen Spezifikationen wurden gemäß den Sicherheitsbewertungen in der Risikoanalyse erstellt. Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts immer die Sicherheit. Wird das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet, kann es Risiken bergen, für die Abilia AB keine Verantwortung übernimmt. Die geschätzte Lebensdauer des Produkts gilt bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Einhaltung der Wartungsanweisung.

Abilia AB haftet nicht für Verluste, Schäden oder Folgeschäden, wenn das Produkt auf andere Weise, als in diesem Dokument angegeben, verwendet oder installiert wurde. Schäden oder Manipulationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie und schließen die Haftung des Herstellers aus.

Eingetragene Marken

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von *Bluetooth SIG, Inc.* Abilia AB nutzt die *Bluetooth®*-Marke unter Lizenz.

Kontaktinformation

Schweden

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Schweden
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norwegen

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norwegen
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Großbritannien

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Großbritannien
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors



461600 461605 461610 461615_Gebrauchsanweisung_GEWA One (Ulefone-Mobilgerät)_DE, May 2022



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Schweden
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA