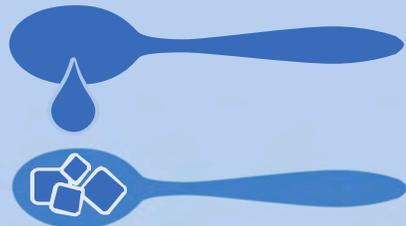
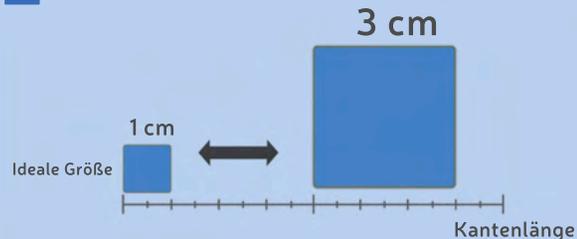
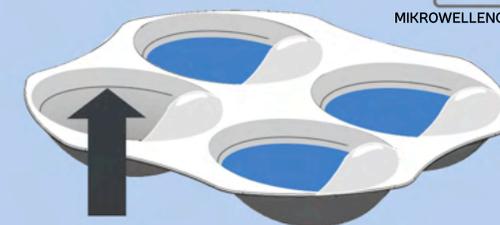


**1 NAHRUNGS-AUSWAHL**

Flüssigkeiten: z.B. Suppen, Getränke
Weiche Nahrung: z.B. Haferflocken, Kartoffelpüree, Müsli
Feste Nahrung: z.B. Obst, Gemüse, Fleisch

2 NAHRUNG ZUBEREITEN

Der Obi eignet sich am besten für Speisen, die in den oben dargestellten Größenbereich, wie z.B. eine Himbeere gebracht wurden.


3 NAHRUNG EINFÜGEN

max. Füllstand


Die Nahrung in die Schalen füllen. Die Schalen bitte nur bis zur Markierung des maximalen Füllstandes befüllen!

4 AUFSTELLEN UND TASTER ANSCHLIEßEN


Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene und waagerechte Fläche. Bewegen Sie den Arm wie abgebildet nach rechts. Stecken Sie nun die gewünschten Taster für die Auswahl und die Anreicherung ein und platzieren Sie diese, so, dass der Benutzer sie bedienen kann.

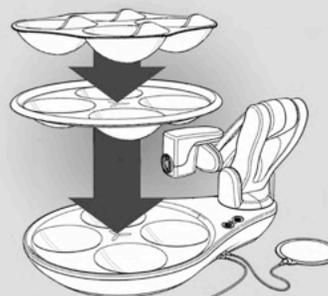5 TELLER UND BASISPLATTE EINSETZEN

Setzen Sie die dunkelgraue Basisplatte ein und legen Sie den Teller auf.

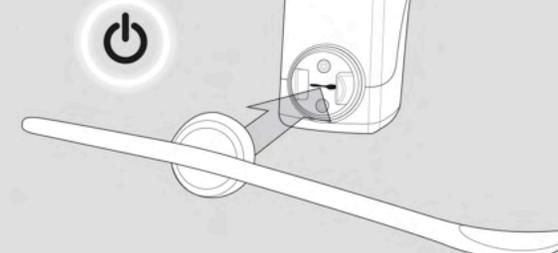6 LÖFFEL AUFSTECKEN

Stecken Sie den gewünschte Löffel auf. Schalten Sie den Obi mit der AN-/Aus-Taste ein und warten Sie bis die Kalibrierung durchgeführt wurde.

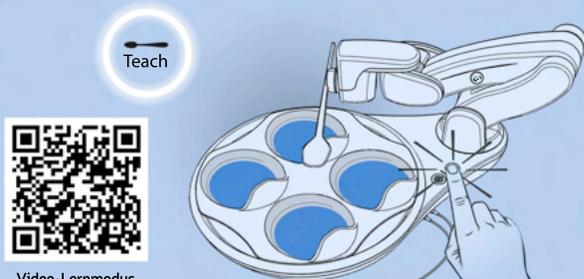7 LERNMODUS STARTEN

Positionieren Sie den Benutzer aufrecht und stationär. Drücken Sie die Teach-Taste (Lernen).

8 ANREICHUNGSPORT BESTIMMEN

Wenn die Teach-Taste blinkt, befindet der Arm in einer nicht anlernbaren Position und muss neu positioniert werden


Fassen Sie den Arm so, dass der Daumen das Teach-Symbol bedeckt. Heben und drehen Sie den Löffel, um ihn vor dem Mund des Benutzers zu positionieren.
⚠️ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.
Lernen Sie keine Lieferposition im Mund an!

9 LERNMODUS VERLASSEN

Drücken Sie die Teach-Taste (Lernen) erneut, um die Position zu speichern und den Lernmodus zu verlassen.


ESSEN

1 ESSEN AUSWÄHLEN

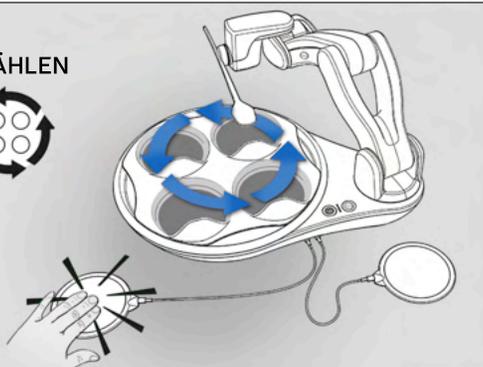


Der Auswahltaster bewegt den Arm bei jedem Druck zur nächsten Schale. Verwenden Sie diesen Taster zur Auswahl der gewünschten Schale / Speise.

2 ESSEN ANREICHEN

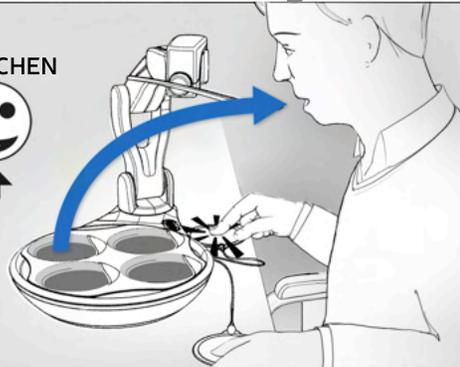


Drücken Sie nun die Taste für die Anreicherung. Der Arm nimmt die Speise auf und bringt Sie an die Position die zuvor eingelegt wurde.

3 ARM ZURÜCKFÜHREN

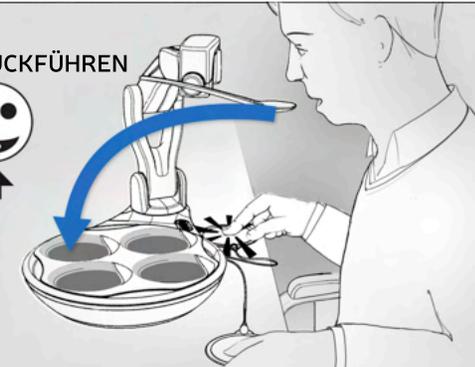

Nach der Übernahme der Speise vom Löffel, können Sie die Anreicherungs-Taste erneut auslösen, um den Löffel an die gleiche Schale zurück zu führen.

REINIGUNG

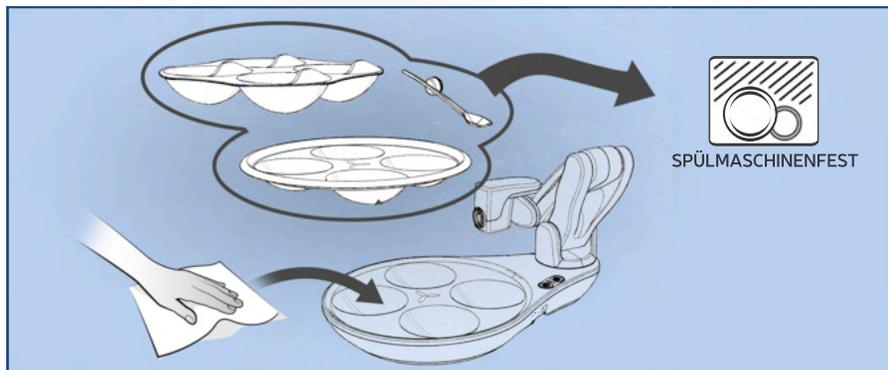


Teller, Basisplatte und Löffel können sowohl mit der Hand als auch in der Spülmaschine gespült werden. Die Basis, das Gehäuse und der Arm des Gerätes dürfen nur mit einem feuchten oder einem Desinfektionstuch abgewischt werden.

HINDERNISSE



Blinkt die An/Aus-Taste, ist der Arm gegen ein Hindernis gestoßen. Der Arm fährt etwas zurück. Entfernen Sie das Hindernis und lösen Sie anschließend den Taster erneut aus, damit der Arm seine Bewegung beenden kann.

AUFLADEN

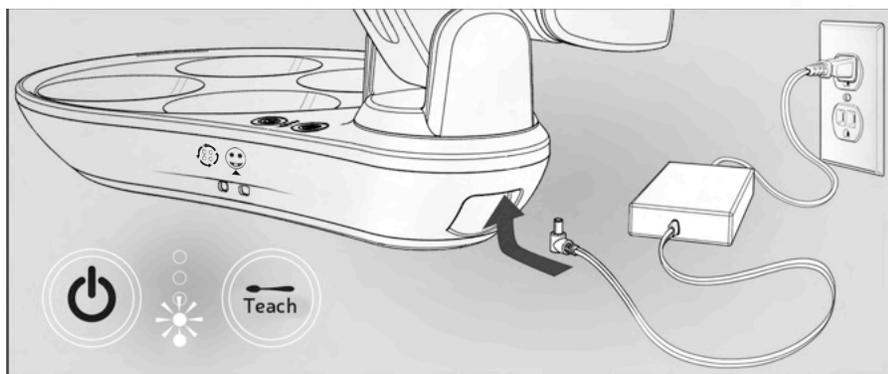

Zwischen den An/Aus- und Teach-Tasten befindet sich die Ladestandsanzeige. Um den Obi aufzuladen, verbinden Sie das Ladegerät mit der Ladebuchse des Obi und einer passende Steckdose. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 5 Lämpchen.

SERVICEBEDARF



Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Versuchen Sie nicht das Problem selber zu lösen.