

ALLORA 2 Tastenkombinationen



Lautstärke +



Lautstärke –



Allora Einstellungsmenü



Sprachausgabe Stumm schalten



Nachricht zur Satzvorhersage einfügen



Datum aussprechen lassen



Uhrzeit aussprechen lassen



Schriftgröße + (wenn max. Schriftgröße erreicht ist, fängt es wieder mit der kleinsten an)



Schriftgröße – (wenn min. Schriftgröße erreicht ist, fängt es wieder Mit der von der größten an)



Zweites Display an- und ausschalten. Einstellung bleibt aktiv bis sie geändert wird



Schaltet Sprachausgabe zwischen beiden Displays um (nur wenn 2. Display getrennt vom Gerät ist) – Einstellung bleibt aktiv bis sie geändert wird



Umschalten zwischen Satzvorhersage, Wortvorhersage oder keine Vorhersage
Einstellung bleibt aktiv bis sie geändert wird



Zeigt Batteriestatus, Status des 2. Bildschirms und Firmware Version an



Zeigt Telefonanbieter, Signalstärke (nur für SMS) und freien SMS Speicherplatz an