


Kurzanleitung

TD I-110




Was ist im Lieferumfang enthalten?

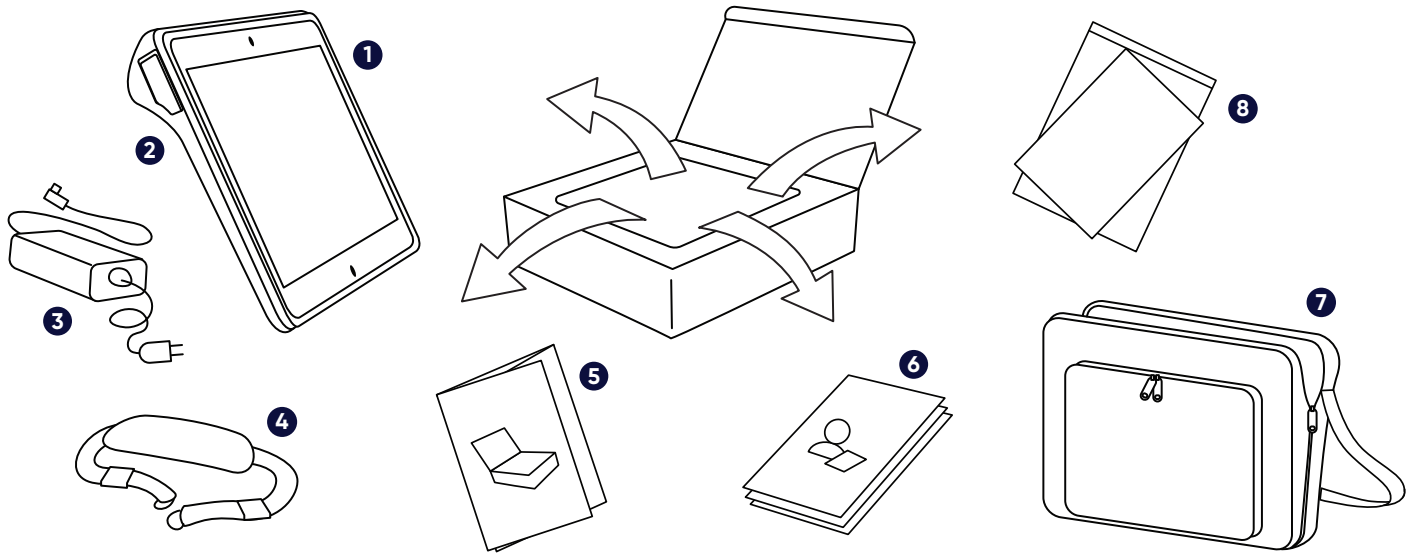

- ➊ Gerät
- ➋ Schutzhülle
- ➌ USB-Netzteil
- ➍ Tragegurt
- ➎ Kurzanleitung
- ➏ Lernkarten für TD Snap
- ➐ Transporttasche
- ➑ Sicherheit- und Zertifizierungs-, Lizenz- und Konfigurationsdokumente

Das Gerät kennenlernen

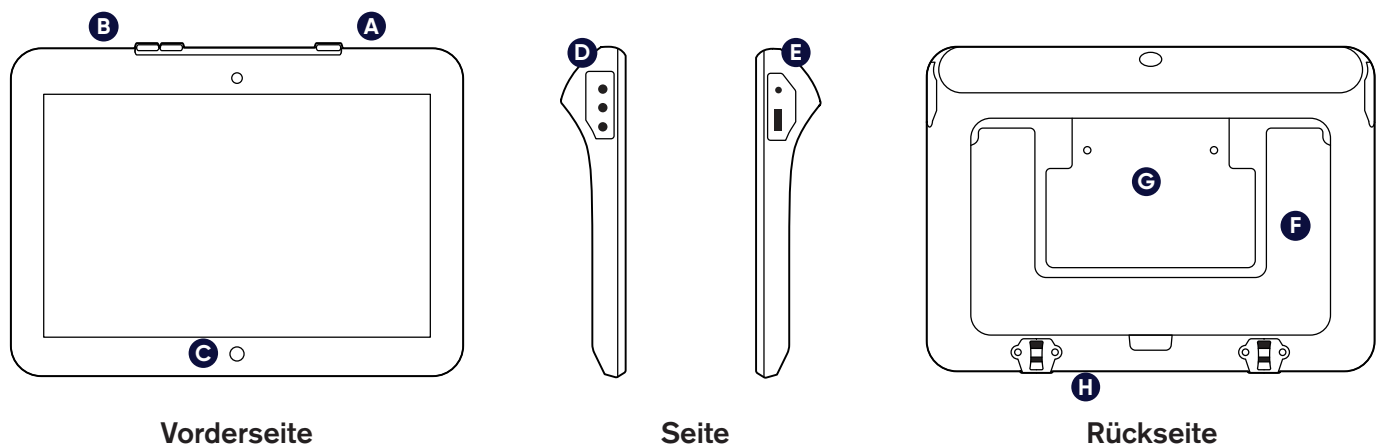



- ➐ Netzschalter
- ➑ Lautstärketasten
- ➒ Windows-Hometaste
- ➓ Audio- und Tasteranschlüsse
- ➔ Stromanschluss & USB-Anschluss
- ➖ Ständer
- ➗ Position für optionale Halterung
- ➘ Verbindungselemente für den Tragegurt

Einfach die Schritte in dieser Kurzanleitung befolgen, und schon ist Ihr Gerät einsatzbereit.

1. Schritt: Ersteinrichtung

Das Gerät einschalten


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und stecken Sie den Stecker in die Steckdose
- 2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste

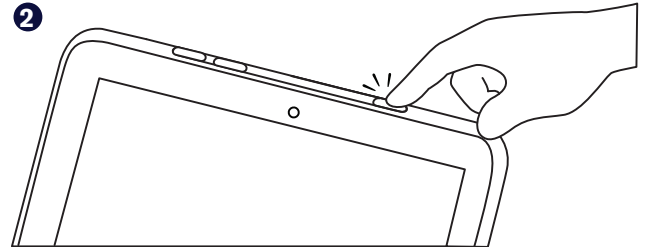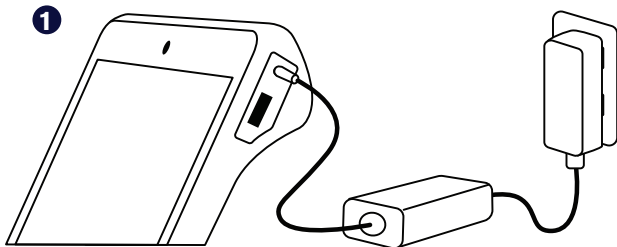

Einrichtung von Windows

Wenn Ihr Gerät nicht vorkonfiguriert wurde, werden Sie aufgefordert, zunächst die Einrichtung von Windows abzuschließen.

Dieser Vorgang ist zwar auch ohne Microsoft-Konto möglich, doch wir empfehlen, dass Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden oder eines erstellen, anstatt das Konto eines Betreuers zu verwenden.

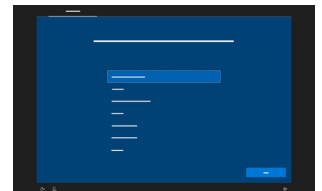

2. Schritt: Einrichtung von TD Snap



Tippen Sie das Symbol doppelt an, wird die App „TD Snap“ gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen neuen Benutzer zu erstellen, oder stellen Sie eine gespeicherte Benutzerdatei wieder her.

3. Schritt: Montage und Positionierung

Sie können das Gerät mit einem Halterungssystem positionieren, es auf eine Oberfläche flach auflegen oder mit dem eingebauten Ständer aufstellen. Zunächst sollte der Benutzer bequem sitzen und dann eine Geräteposition wählen, die ihm/ihr eine freie Sicht auf den Bildschirm und einen einfachen Zugriff auf seine/ihre gewünschte Auswahlmethode ermöglicht. Die Position des Geräts sollte angenehm für den Benutzer sein, und nicht umgekehrt. Es ist zu erwarten, dass das Gerät während des Tages neu positioniert werden muss. Bringen Sie für einen sicheren Transport den Tragegurt an.

4. Schritt: Lernkarten für TD Snap

Fahren Sie mit der Einrichtung mit den Lernkarten für TD Snap fort, die in der Verpackung Ihres Geräts enthalten sind. Anhand der Lernkarten werden Sie durch die Funktionen von TD Snap, die grundlegende Bearbeitung, das Sichern Ihrer Daten und einige Aktivitäten geführt, die Ihnen helfen, TD Snap in Ihren Alltag zu integrieren.

Zusätzliche Ressourcen

Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Telefon oder benutzen Sie die Links.



Tobii Dynavox
de.tobiidynavox.com



myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com



TD-Facebook-
Community
qrco.de/fbdede



Tobii Dynavox-
Lernzentrum
(nur Englisch)
learn.tobiidynavox.com



Gerätehandbuch
TD I -110
qrco.de/bcnrvK



Gerätehandbuch
TD Snap
qrco.de/bcgYP0



Über
Auswahlmethoden
qrco.de/bbFP7D



Technischen Support erhalten
Sie von Ihrem Tobii Dynavox-
Händler vor Ort.