

Communicator 5

Lernkarten



Dies sind Ihre neuen Lernkarten für Communicator 5, die Ihnen bei den ersten Schritten mit dem neuen Gerät helfen. Sie enthalten Ideen zur täglichen Verwendung und eine schrittweise Anleitung, wie Sie einfache Änderungen vornehmen.

Communicator 5 bietet ein breites Spektrum an Seiten und Bildschirmstastaturen sowie einfach zu bedienende Werkzeuge für E-Mail, Textnachrichten, Telefon, IR-Fernbedienungen und vieles mehr.

Inhalt


- 1 QR-Codes & Instandhaltung des Geräts
- 2 Glossar für Communicator 5
- 3 Bearbeitung der Startseite & Message Banking
- 4 Häufig gestellte Fragen & Einfach Ausprobieren!
- 5 Zugriff auf den Computer & Computer Control
- 6 Windows Zugriff & Wichtige Informationen
- 7 Sprechen & Tastatur-Layouts ändern
- 8 Meine Sätze & E-Mail
- 9 IR-Fernbedienung & Kalender
- 10 Textnachrichten & Meine Textdateien
- 11 Kamera und Meine Bilder & Zusatzfunktionen
- 12 Profile sichern/exportieren & Startanleitung
- 13 myTobiiDynamox.com & weiterer Support



QR-Codes

Über die QR-Codes in diesem Dokument erhalten Sie schnell Zugriff auf Informationen (z. B. Videos), ohne dass Sie Internetadressen eingeben müssen.

Zum Scannen der Codes können Sie Ihr Handy oder Tablet verwenden. Die Informationen werden dann automatisch angezeigt.

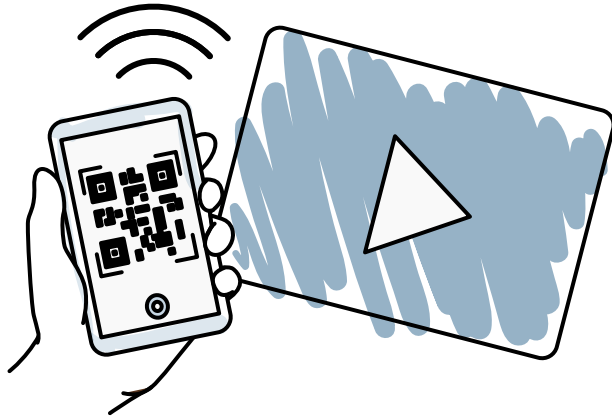

Wenn Sie auf Ihrem Gerät keine App zum Lesen von QR-Codes haben, gehen Sie wie folgt vor:

Für Android

Im Play Store von Google finden Sie kostenlose QR-Code-Reader. Am besten geben Sie „QR Scanner“ oder „QR Reader“ als Suchbegriff ein.

Für Windows

Laden Sie einfach eine kostenlose App zum Lesen von QR-Codes aus dem Windows Store herunter. Unter „QR Scanner“ oder „QR Reader“ werden Ihnen verschiedene Wahlmöglichkeiten angeboten.

Für iOS

Das Scannen von QR-Codes ist ab iOS 11 integriert. Sie müssen einfach nur die Kamera-App öffnen und sie auf den QR-Code richten, damit eine Benachrichtigung erscheint.

Wenn Sie nicht auf iOS 11 aktualisiert haben oder aktualisieren können, müssen Sie eine App zum Scannen von QR-Codes herunterladen. Im App Store sind viele derartige Apps kostenlos oder zum Kauf erhältlich.



Instandhaltung des Geräts

Unsere Geräte unterscheiden sich von gewöhnlichen Laptops oder Tablets.

Mit ihrer schnellen und stoßsicheren SSD Festplatte, der IP54 Schutzklasse für Feuchtigkeits- und Staubschutz und einem Bildschirm aus bruchsicherem Gorilla Glas.

Sie können das Gerät ohne Bedenken überallhin mitnehmen und darauf vertrauen, dass es der Beanspruchung gewachsen ist.

Sie möchten das Gerät bei Nieselregen benutzen?

Kein Problem! Es ist gegen Spritzwasser geschützt. Achten Sie einfach darauf, dass unterwegs die Anschlüsse des Geräts abgedeckt sind, dann bleibt Ihnen genug Zeit, sich einen trockenen Platz zu suchen.

Sie möchten das Gerät beim Essen benutzen?

Kein Problem. Falls nötig, können Sie den Bildschirm einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.



Es ist wichtig und ganz einfach, das Gerät instandzuhalten.

Instandhaltung der Kabel:

- Stellen Sie das Gerät beim Aufladen in der Nähe der Steckdose auf, damit niemand aus Versehen an den Kabeln oder Steckern zieht.
- Das Netzkabel darf nicht eng aufgerollt, verdreht oder um etwas herumgewickelt werden.

Reinigung:

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Sie können hierfür antibakterielle Reinigungstücher verwenden.
- Wischen Sie nur die Außenflächen ab und lassen Sie das Produkt von selber trocknen.



Verwenden Sie keine Sprays, die in das Gerät eindringen könnten.



Glossar für Communicator 5

Feld

Ein Element auf einer Seite, das der Benutzer auswählen kann. Es enthält einen Klang, einen Buchstaben, ein Wort oder einen Satz. Über Felder kann man auch Einstellungen ändern.

Seite


Eine Oberfläche, auf der mehrere Felder gleichzeitig zu sehen sind. Die Felder auf einer Seite können mit einer anderen Seite verknüpft sein, auf der weitere Inhalte zu sehen sind.

Seitenset

Eine Zusammenstellung von Seiten, oft mit einem gemeinsamen Thema. Zum Beispiel kann ein Seitenset Inhalte rund um E-Mails und Textnachrichten, häufig verwendete Sätze oder eine benutzerdefinierte Seite (z. B. mit Inhalten zu einer interessanten Fernsehsendung) enthalten. Ein Seitenset kann aus einer oder mehreren Seiten bestehen.


Benutzer

Ein Benutzerprofil enthält alle Seitensets, Einstellungen, Sätze und Kontakte einer Person.

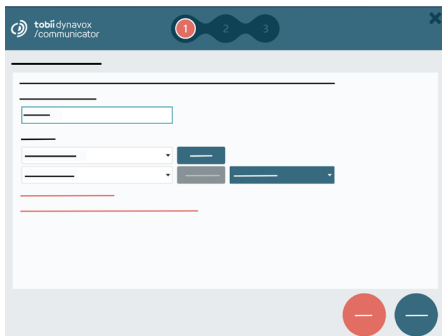

Startseite

Die Startseite (bzw. Hauptseite), die der Benutzer mit anderen Seitensets (z. B. Tastatur, E-Mail usw.) verknüpft.

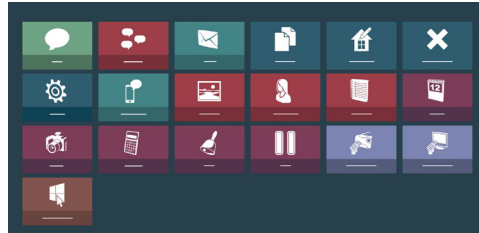

Eingabemethode

Die Art und Weise, wie jemand Felder auf dem Bildschirm aktiviert. Es gibt hierfür in Communicator 5 vier Möglichkeiten.

1 Gaze Interaction

Hierbei wird das Gerät mit den Augen gesteuert.

2 Touch/Maus

Die Aktivierung erfolgt durch Berühren des Touchscreens oder per Linksklick mit der Maus.

3 Mit Maus verweilen

Der Mauscursor muss eine bestimmte Zeit lang über einem bestimmten Bereich verweilen. Ein Mausklick ist hierbei nicht nötig.

4 Scanning

Sobald ein Feld hervorgehoben wird, können Sie es per Taster auswählen.

Glossar für Communicator 5

Schnellmenü

Gewährt schnellen Zugriff auf die erweiterten Einstellungen, häufige Funktionen und zur Anpassung der Startseite. Dieses Menü ist nur über Touch und Maus verfügbar.

So wird es aktiviert:

- Rechtsklicken Sie mit einer Maus an irgendeiner Stelle des Bildschirms.
- Drücken und halten sie 3 Sekunden auf einem Touchscreen.



Wortvorhersage

Die automatische Wortvorhersage unterstützt mit Grammatik- und Rechtschreibhilfen die schnelle Worteingabe. Die Felder der Wortvorhersage ändern sich während der Eingabe.

Einstellungen



Einstellungen

- Das Menü „Einstellungen“ steht dem Benutzer für alle Eingabemethoden zur Verfügung.
- Es ermöglicht die Änderung der Lautstärke, Helligkeit, Eingabe- und Tastatureinstellungen usw.
- Auf das Menü „Einstellungen“ können Sie von der Startseite aus zugreifen..

Erweiterte Einstellungen

- Auf erweiterte Einstellungen können Sie nur mit dem Touchscreen oder per Maus zugreifen.
- Sie finden die erweiterten Einstellungen im Schnellmenü.
- Es gibt dort sechs Registerkarten:
 - ▶ Eingabe
 - ▶ Tastaturen und Sprache
 - ▶ Audio
 - ▶ Anwendungen
 - ▶ Benutzereinstellung
 - ▶ System



Bearbeitung der Startseite

Bei den Seitensets, die Sie auf der Startseite sehen, handelt es sich nur um Vorschläge. Sie können sie nach Belieben entfernen und weitere Seitensets hinzufügen.

Ein Seitenset entfernen:

- 1 Wählen Sie **Startseite bearbeiten**.



- 2 Wählen Sie das Seitenset aus, das Sie entfernen möchten
- 3 Wählen Sie **Entfernen**.
- 4 Bestätigen Sie im Popup-Fenster mit „Entfernen“.

Ein Seitenset hinzufügen:

- 1 Wählen Sie **Alle Seitensets**.



- 2 Wählen Sie z.B. **Textkommunikation**.
- 3 Durchsuchen Sie verschiedene Seitensets, die Ihnen angeboten werden.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Seitenset aus.
- 5 Wählen Sie **„Zur Startseite hinzufügen“** aus.



Hilfreicher Tipp

Wenn Sie die Statusleiste für ihre Startseite aktivieren, können Sie ohne großen Aufwand den Trackstatus, den Batterieladestand oder den Status ihrer WLAN Verbindung überwachen.

Diese Schritte können nur mittels Touchscreen oder per Maus ausgeführt werden.

- 1 Öffnen Sie das Schnellmenü.
- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **System**.
- 4 Wählen Sie Statusleiste aktivieren.



Message Banking

Message Banking ist eine Möglichkeit, wie Sie die eigene Stimme mit aufgezeichneten Mitteilungen bewahren können. Diese Mitteilungen können später in Kommunikationssoftware wie z. B. Communicator 5 zum Einsatz kommen.



Hilfreiche Tipps

Es ist wichtig, so früh wie möglich damit zu beginnen, damit Sie qualitativ hochwertige und deutlich verständliche Mitteilungen aufnehmen können.

Wenn Sie diesen Code scannen, erhalten Sie weitere Informationen zum Message Banking



Grundlagen des Message Banking

Message Banking von Tobii Dynavox bietet Ihnen kostenlos die Möglichkeit, Ihre aufgenommenen Mitteilungen zu sammeln, zu ordnen und zu speichern, bis sie gebraucht werden. Sie können auf jedem zur Wiedergabe derartiger Mitteilungen geeigneten System heruntergeladen und verwendet werden.

1. Schritt: Wählen Sie, welche Mitteilungen Sie aufzeichnen und speichern möchten.

Nehmen Sie sich Zeit. Denken Sie an Sätze, Mitteilungen und Geschichten, die Ihnen wichtig sind.

2. Schritt: Nehmen Sie Ihre Mitteilungen auf.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Mitteilungen aufzunehmen.

- 1 Sie können die Aufnahme direkt in Communicator 5 durchführen.
- 2 Oder Sie zeichnen die Mitteilungen mit einem guten Digitalrekorder auf und laden sie in die Message Bank von Tobii Dynavox hoch. Wir empfehlen den tragbaren Digitalrekorder Zoom H1.

3. Schritt: Laden Sie die gespeicherten Mitteilungen in Communicator 5 herunter.

- 1 Importieren Sie Ihre WAV-Audiodateien aus der ZIP-Datei in der Message Bank.
- 2 Die Aufnahmen werden automatisch in den entsprechenden Seitensets „Meine Sätze“ importiert und den dortigen Seiten hinzugefügt.
- 3 Die Mitteilungen werden mithilfe von Tags kategorisiert, die Sie ihnen in der Message Bank zugewiesen haben und zur Vorhersage verwendet haben.



Häufig gestellte Fragen

Wem kann Message Banking etwas nützen?

Message Banking kommt vor allem für Personen mit einer degenerativen Erkrankung wie z. B. amyotropher Lateralsklerose (ALS), Motoneuronenerkrankungen (MND) oder der Parkinson-Krankheit, mit bevorstehender totaler Glossektomie bzw. Laryngektomie oder geplanter stationärer Behandlung mit Intubation oder Beatmungsgerät in Frage.

Muss ich mein Gerät vor jeder Nutzung kalibrieren?

Nein. Ihr Kalibrierungsprofil wird gespeichert. Wenn Sie jedoch feststellen, dass es nicht genau funktioniert, sollten Sie Ihren Trackstatus überprüfen, und wenn Sie an einem sehr hellen Ort (z. B. am Fenster) sitzen, empfiehlt es sich möglicherweise, den Vorhang zu schließen. Wenn Sie das Gerät neu kalibrieren möchten, so ist dies jederzeit möglich.

Kann ich mein Gerät zur Kommunikation per E-Mail und SMS benutzen?

Ja! Sie können mit Communicator 5 E-Mails und Textnachrichten versenden.

Gibt es eine Lösung, wenn jemand aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, eine Kommunikationsoberfläche zu berühren?

Ja! Auf einem Kommunikationsgerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Auswahl zu treffen. Sie werden oft auch Auswahlmethoden genannt. Personen, die nicht in der Lage sind, den Bildschirm zu berühren, können Gaze Interaction, Kopfzeiger oder Scanning als Hauptauswahlmethode verwenden.



Einfach ausprobieren!

Hier einige Möglichkeiten, wie Sie sich mit dem Gerät vertraut machen können.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten:

- Sie müssen nichts völlig Neues erschaffen. Der Rahmen ist vorgegeben. Machen Sie sich einfach mit der Software Communicator 5 vertraut und passen Sie sie wie gewünscht an.
- Setzen Sie sich selbst oder den Benutzer nicht zu sehr unter Druck. Es ist nicht realistisch, gleich zu Beginn alles richtig zu machen. Fehler dürfen passieren.
- Lassen Sie sich nicht entmutigen. Das Eyetracking muss erlernt werden, und dazu braucht es Übung. Machen Sie Pausen, wann immer es nötig ist.

So können Sie Zeit sparen:


- Sie brauchen nicht auf Groß- und Kleinschreibung zu achten, wenn Sie das Gerät zum Sprechen verwenden.
- Nutzen Sie die Abkürzungserweiterung und die Wortvorhersage.
- Vorbereitung ist das A und O. Viele Interaktionen lassen sich vorhersehen. Wenn Sie wichtige Sätze abspeichern, haben Sie schnellen Zugriff darauf, ohne sie jedes Mal wieder neu einzugeben.
- Stellen Sie sicher, dass auch eine andere Kommunikationsmöglichkeit genutzt werden kann.



Zugriff auf den Computer

Communicator 5 Windows Zugriff

Wie funktioniert diese Software?

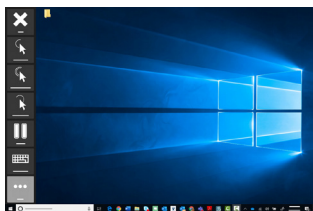

Über ein seitliches Menü können Sie mit den Elementen auf Ihrem Computer interagieren, z. B. mit Ihren Desktop-Apps und dem Internet.

Wie kann ich diese Software ansteuern?

Benutzen Sie Ihre Augen oder einen Taster für den Zugriff auf Ihren Desktop.

Wie sieht die Tastatur aus?



Es stehen verschiedene Tastatur-Layouts zur Verfügung, die zu den Tastatur-Layouts in Communicator 5 passen und daher eine schnelle Eingewöhnung ermöglichen.

Wie kann ich die Eingabe beschleunigen?


Beide Softwares beschleunigen die Texteingabe durch Wortvorhersage. Die Wortvorhersage erlernt Wörter, die Sie häufig verwenden. Sätze, die Sie in Communicator 5 verwenden und speichern, stehen ebenfalls zur Verfügung (nur bei Communicator 5 Windows Zugriff).

Welche Sprachen sind verfügbar?

Beide Softwares sind in verschiedenen Sprachen erhältlich. Auf tobiidynavox.com können Sie sich einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen.

Computer Control

Wie funktioniert diese Software?

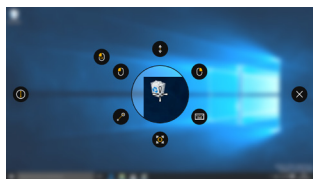


Über ein Interaktionsmenü (rund um das Element, das Sie auswählen möchten) können Sie mit den Elementen auf Ihrem Computer interagieren, z. B. mit den Desktop-Apps und dem Internet.

Wie kann ich diese Software ansteuern?

Mit der Software Computer Control können Sie Ihren Computer mit den Augen steuern.

Wie sieht die Tastatur aus?

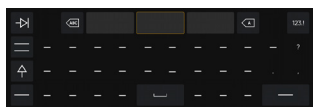


Die Tastatur wurde so optimiert, dass Sie schnellen und effizienten Zugriff auf alles Benötigte erhalten.


Computer Control

Computer Control nutzt eine neue und intuitive Auswahlmethode, die „Interaktion zuerst“ genannt wird. Sie wählen das Element, mit dem Sie interagieren möchten (z. B. eine Datei oder einen Desktop-Link), und suchen sich dann aus, was Sie damit tun möchten.


Wie funktioniert das?

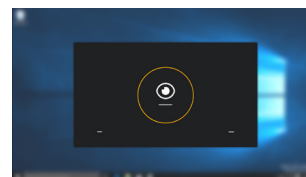

Wenn Sie sich auf dem Bildschirm umsehen, wird Ihnen eine schwache „Blickbereichsdarstellung“ auffallen, die Ihrem Blick folgt.

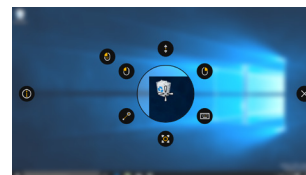

Wenn Sie mit einem Symbol oder Feld auf dem Bildschirm interagieren, schauen Sie auf das Element. Die Blickbereichsdarstellung ändert sich dann und das Aktionsfeld ist zu sehen.

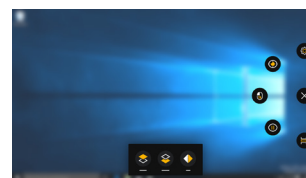

Schauen Sie auf das Aktionsfeld, wo nun das vollständige Interaktionsmenü erscheint. Dort finden Sie von oben aus gesehen im Uhrzeigersinn Symbole für Scrollen, Rechtsklick, Tastatur, Genauigkeitseinstellung, Klicken und Ziehen, Linksklick und doppelten Linksklick.

Wählen Sie einfach die gewünschte Funktion aus. Wenn Sie beispielsweise vom Desktop aus Google Chrome öffnen möchten, blicken Sie auf das Doppelklicksymbol, um die Anwendung zu starten. Wenn Sie ein kleines Objekt anwählen möchten, sollte es sich möglichst in der Mitte des Kreises befinden. Hierbei hilft Ihnen die Genauigkeitseinstellung.

Über das Feld „Mehr“ haben Sie folgende Möglichkeiten: Zugriff auf Einstellungen, Kalibrierung, Pausieren der Augensteuerung, kontinuierliches Klicken, App-Wechsel und Zugriff auf Verknüpfungen.



Windows Zugriff




Über Windows Zugriff können Sie Ihren Computer mithilfe in Communicator 5 integrierter Funktionen steuern.

Die Menüleiste von Windows Zugriff kann sich seitlich oder unten auf Ihrem Bildschirm befinden.



Die Einstellungen für Windows Zugriff finden sie auch im Seitenset Einstellungen.

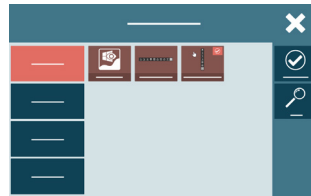

Klicks in Windows Zugriff:


Sie können Linksklicks, Rechtsklicks und Doppelklicks ausführen. Es gibt zwei Auswahlmethoden.

Zum Klicken verweilen:

Verweilen Sie mit dem Mauszeiger über dem gewünschten Objekt, um es anzuklicken.

Zum Klicken zoomen:



Verweilen Sie mit dem Mauszeiger über dem gewünschten Objekt, damit der Zoom beginnt. Am Ende des Zooms erfolgt der Klick.

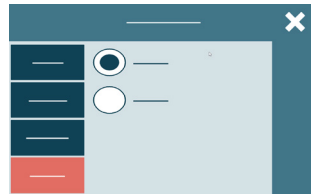

Zugriff auf Programme:

Über „Programme“ auf Menüseite 2 in Windows Zugriff können Sie Ihre am häufigsten verwendete Software starten.

Über die Einstellungen für Windows Zugriff können Sie Programme hinzufügen oder entfernen.

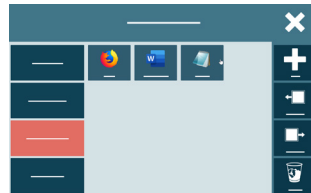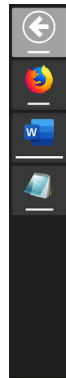

Wichtige Informationen

Support und Schulung: <https://de.tobiidynavox.com/pages/lernmaterial>

Notizen: _____



Sprechen



Machen Sie sich mit dem Tastaturlayout im Seitenset „Sprechen“ vertraut. Das Ziel besteht darin, die Kommunikation möglichst schnell und effizient zu gestalten.

Übungsanleitung:

1 Beginnen Sie mit der Eingabe von Wörtern auf der Tastatur (Namen von Familienmitgliedern, Lieblingsorte usw.). Wenn Sie dann noch weiter üben möchten, geben Sie die Antworten auf diese Fragen ein.

- Was ist deine Lieblingsfarbe?
- Welche Bücher liest du gerne?
- Was für Filme magst du?

2 Üben Sie den Umgang mit der Wort- und Satzvorhersage:

Beginnen Sie, die Antworten auf folgende Fragen einzugeben. Nach 1 oder 2 Buchstaben können Sie in den Wortvorhersagefeldern nachsehen, ob das Wort darin vorkommt.

- In welches Land möchtest du gerne reisen?
- Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärest du und warum?

3 Verwenden Sie das Gerät im Alltag. Üben Sie den Umgang mit der Tastatur und den Vorhersagefeldern in folgenden Situationen:

- Sie erzählen, was Sie gestern Abend oder am Wochenende gemacht haben.
- Sie sprechen über eine aktuelle Meldung aus den Nachrichten.




Wussten Sie schon ...

Dass ein Wort desto wahrscheinlicher in der Wortvorhersage erscheint, je häufiger Sie es eingeben?

Wussten Sie schon ...

Dass Sie zwischen verschiedenen Tastatur-Layouts wählen können? Siehe die Karte „Tastatur-Layouts ändern“.

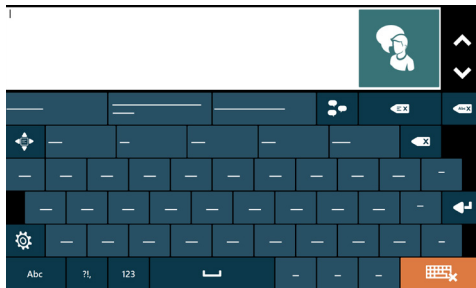

Tastatur-Layouts ändern

In Communicator 5 stehen verschiedene Tastatur-Layouts zur Auswahl.

Setup-Menü



- Wählen Sie das **Einstellungen Seitenset** aus.
- Wählen Sie **Tastatureinstellungen** aus. Es erscheinen verschiedene Screenshots mit Tastatur-Layouts. Es gibt drei grundlegend verschiedene Arten von Layouts.

	Normal (Standard)	Raster	Große Tasten
Anordnung (unten beschrieben)	QWERTZ, ABC, SCANNING, Zeiger	ABC, SCANNING, Zeiger	ABC, SCANNING, Zeiger
Vorhersage	Wort- und Satzvorhersage	Keine	Wortvorhersage
Feldgröße	Klein	Mittel	Groß
Fingerführung	Nein	Ja	Ja
Extras	Großes Mitteilungsfenster für Mitteilungen und Text mit mehreren Zeilen.	Für Eyetracking geeignet. Großer Zielbereich.	Mehrfache Buchstabenwahl für Benutzer, die größere Felder benötigen.

- Wählen Sie die Tastatur aus und zeigen Sie eine Vorschau des Layouts an.
- Wenn Sie für den gewählten Tastaturtyp eine andere Anordnung der Tasten wünschen, wählen Sie QWERTZ/ABC aus.
- Es gibt vier Auswahlmöglichkeiten.

- QWERTZ ist das normale, von gewöhnlichen Tastaturen bekannte Layout.
- ABC ist ein alphabetisches Layout.
- Das Layout „Scanning“ eignet sich optimal, wenn jemand einen Taster als Auswahlmethode verwendet.
- Das Layout „Zeiger“ eignet sich optimal, wenn jemand einen Zeiger als Auswahlmethode verwendet.



Meine Sätze



Das Seitenset „Meine Sätze“ besteht aus den bisher verwendeten Mitteilungen und freiem Platz für eigene Sätze. Mit im Voraus gespeicherten Aussagen zu wichtigen Themen kann man schnell kommunizieren, ohne die ganze Mitteilung einzugeben.

- 1 Denken Sie an Kategorien (Situationen) und Sätze, auf die Sie schnellen Zugriff haben möchten. Das können beispielsweise Verabredungen, Restaurantbesuche, Treffen mit Freunden usw. sein.

Eine neue Kategorie hinzufügen:

- Wählen Sie **Neue Kategorie hinzufügen**.
- Geben Sie den Kategorienamen ein.
- Wählen Sie „Fertig“.



Einen neuen Satz hinzufügen:

- Wählen Sie die **Kategorie** für den neuen Satz aus.
- Wählen Sie **Neuen Satz hinzufügen** aus.
- Geben Sie den Satz ein.
- Wählen Sie „Fertig“.



- 2 Sobald Sie die Sätze eingegeben haben, wählen Sie jeden Satz einzeln an. Machen Sie sich damit vertraut, wie er lautet und wo er sich befindet. Passen Sie die Sätze oder Speicherorte an, falls dies nötig sein sollte.

- 3 Üben Sie mit den Sätzen, die Sie eingegeben haben, und fügen Sie gegebenenfalls weitere hinzu.



Hilfreicher Tipp

Wenn Ihnen keine unterschiedlichen Satzkategorien angezeigt werden, müssen Sie sie möglicherweise importieren. Um Sätze zu importieren, wählen Sie **Erweiterte Einstellungen → Tastaturen und Sprache → Meine Sätze → Importieren** und befolgen die Bildschirmanweisungen.



E-Mail



Mit der E-Mail-Funktion können Sie einfach und effizient E-Mails versenden, empfangen und verwalten. Zur Einrichtung der E-Mail-Funktion benötigen Sie jemanden, der den Touchscreen bedienen kann.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- 1 Öffnen Sie das **Schnellmenü**.
- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie „Anwendungen“.
- 4 Wählen Sie „E-Mail“.
- 5 Wählen Sie „Neu“.
- 6 Wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter (Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, Live oder GMX). Wenn Ihr E-Mail-Anbieter nicht in der Liste vorkommt, wählen Sie **Manuelle Konfiguration** und lassen sich von Ihrem E-Mail-Anbieter die Serverdaten geben.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Wählen Sie **„Fertig stellen“** und **„Okay“**, um das Menü zu schließen.

Jetzt ist alles bereit zum Ausprobieren!

- 1 Versenden Sie eine E-Mail.
- 2 Lesen Sie eine E-Mail.
- 3 Antworten Sie auf eine E-Mail.



IR-Fernbedienung




Mit den IR-Fernbedienungsfunktionen können Sie Unterhaltungselektronik wie Fernseher, DVD-Spieler oder Radio bedienen. Mit zusätzlicher Ausrüstung können Sie per Umfeldsteuerung auch die Beleuchtung, die Türen oder das Bett regulieren.

Zur Einrichtung der IR-Funktionen müssen Sie dem Gerät bestimmte Befehle beibringen. Für den Fernseher benötigen Sie zum Beispiel Ein/Aus, Lauter/Leiser, Kanalwahl vorwärts/rückwärts usw.

Auf Ihrer Startseite finden Sie Seitensets mit vollständigen Fernbedienungen für Fernseher, DVD-Spieler, Stereoanlagen und Radios. Wenn Sie nicht alle Funktionen benötigen, können Sie der Startseite vereinfachte Seitensets hinzufügen.

- 1 Nehmen Sie die Fernbedienung für das zu programmierende Gerät.
- 2 Holen Sie das Kommunikationsgerät.
- 3 Gehen Sie zum gewünschten Fernbedienungs-Seitenset und wählen Sie das Feld aus, dessen Funktion Sie programmieren möchten.
- 4 Es erscheint ein Popup-Fenster mit der Meldung, dass noch kein Befehl programmiert wurde.
- 5 Wählen Sie **Ja** aus, um einen neuen Befehl zu programmieren.
- 6 Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger an der Rückseite des Kommunikationsgeräts.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 8 Anschließend gelangen Sie wieder zurück zu dem Seitenset.
- 9 Das Feld ändert die Farbe, wenn es erfolgreich programmiert wurde.
- 10 Sie sollten das Feld testen, bevor Sie zum nächsten Feld übergehen.

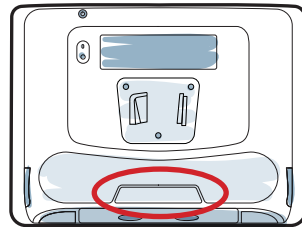

Hilfreicher Tipp

Das Gerät lässt sich auch mit intelligenter Heimtechnik wie Alexa und Google Home verwenden.



Kalender



Mit dem Kalender-Seitenset können Sie Termine und Erinnerungsbenachrichtigungen einrichten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- 1 Wählen Sie auf der Startseite **das Kalender-Seitenset** aus.
- 2 Das aktuelle Datum wird gelb hervorgehoben.

So fügen Sie einen Termin hinzu:

- Gehen Sie zum Datum des Termins.
- Wählen Sie **Neu** aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung für den Termin ein.
- Wählen Sie die Start- und Endzeit.
- Sie können angeben, dass Sie eine Erinnerungsbenachrichtigung erhalten möchten.



Textnachrichten (SMS)



Sie können Textnachrichten senden und empfangen, indem Sie ein Handy über Bluetooth mit Ihrem Gerät koppeln. Zur Einrichtung des Telefons benötigen Sie jemanden, der den Touchscreen bedienen kann.

- 1 Öffnen Sie das **Schnellmenü**.
- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Wählen Sie **Mobiltelefon**.
- 5 Installieren Sie die App Tobii Dynavox Beam (BETA) auf Ihrem Telefon.
- 6 Starten Sie die App und wählen Sie **Telefon verbinden**.
- 7 Schalten Sie Bluetooth ein und koppeln Sie Ihr Telefon.

Wenn Sie diesen QR-Code scannen, sehen Sie eine Liste mit kompatiblen Handys.



Jetzt ist das Telefon einsatzbereit. Probieren Sie es aus!

Schicken Sie jemandem eine kurze Textnachricht. Bitten Sie um Rückantwort, damit Sie wissen, ob es funktioniert.



Meine Textdateien



Im „Meine Textdateien“ Seitenset können Sie längere Textdateien speichern. Dies können beispielsweise persönliche Geschichten, Reden oder Präsentationen sein. Wenn Sie Ihre Dateien hier speichern und ordnen, können Sie leicht darauf zugreifen und steuern, wann Sie mit dem Sprechen beginnen oder aufhören möchten.

So erstellen Sie eine neue Textdatei:

- 1 Wählen Sie **Neu** aus.
- 2 Beginnen Sie, den Inhalt der Datei einzugeben. Sie können ihr später einen Namen geben.
- 3 Anschließend wählen Sie „Fertig“.
- 4 Ein Popup-Fenster mit dem Namen und dem Inhalt der Datei erscheint. Standardmäßig erscheint der Anfang des eingegebenen Texts im Dateinamen.
 - Über das Tastatursymbol neben dem Dateinamen können Sie Änderungen vornehmen.
 - Wählen Sie die Schaltfläche „Löschen“.
 - Geben Sie den neuen Dateinamen ein.
 - Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können jederzeit zu Ihrer Datei zurückkehren und sie bearbeiten.

- 1 Wählen Sie in der linken Spalte den Dateinamen aus.
- 2 Klicken Sie auf das Feld **Bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten oder ergänzen Sie das Dokument.

So sprechen Sie den Inhalt der Datei aus:

- 1 Wählen Sie in der linken Spalte den Dateinamen aus.
- 2 Wählen Sie **Text ausgeben**.
- 3 Um das Sprechen zu beenden, wählen Sie **Sprechen stoppen**.



Kamera und Meine Bilder



Mit den Seitensets Kamera und „Meine Bilder“ können Sie Bilder aufnehmen, speichern und ordnen.



Wenn Sie mit dem Kamera Seitenset Bilder aufnehmen, werden diese in einem entsprechenden Ordner gespeichert und erscheinen automatisch im Seitenset „Meine Bilder“.

Mit „Meine Bilder“ können Sie auf den Ordner „Bilder“ Ihres Geräts zugreifen.

Auf die Bilder können Sie folgende Filter anwenden:

- Alle Bilder
- Zuletzt hinzugefügt
- Datum
- Kamerabilder
- Ordner

Wenn Sie „Ansicht“ wählen, können Sie:

- Das Bild nach rechts oder links drehen
- Eine Beschreibung hinzufügen
- Drucken
- Löschen

Mit einer Diashow können Sie die Bilder automatisch der Reihe nach präsentieren.

Sie können als Geschwindigkeit „Langsam“, „Mittel“ oder „Schnell“ auswählen. Alternativ dazu können Sie manuell von einem Bild zum nächsten wechseln.



Zusatzfunktionen



Alarm

Mit dem Seitenset „Alarm“ auf der Startseite können Sie schnell die Aufmerksamkeit auf sich lenken.



Musikwiedergabe

Mit dem Musikwiedergabe Seitenset können Sie von Ihrem Gerät Musik abspielen. Da es sich um ein einfach gestaltetes Seitenset handelt, sollten Sie nicht mehr als drei oder vier Musikalben laden. Zum Laden der Musik müssen Sie entweder per Touchscreen oder mit der Maus auf das Schnellmenü zugreifen können.

Das Musikwiedergabe Seitenset müssen Sie der Startseite hinzufügen. Eine entsprechende Anleitung finden Sie auf Karte Nr. 3 „Bearbeitung der Startseite“.

Bevor Sie Musik in die Software laden, müssen Sie die Musikdateien in einen Ordner auf dem Gerät laden und diesen dann entweder der Musikbibliothek hinzufügen oder die Musik in einen der bereits vorhandenen Ordner kopieren.

- 1 Öffnen Sie das **Schnellmenü**.
- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Wählen Sie **Musikwiedergabe** aus.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Musikbibliothek jetzt neu einlesen“. Die Dateien werden der Musikwiedergabe hinzugefügt.
- 6 Wählen Sie **OK** aus.
- 7 Verlassen Sie „Erweiterte Einstellungen“.



Profile sichern/exportieren

Es ist sehr wichtig, personalisierte Seitensets und Benutzerdaten zu sichern, falls mit Ihrem Gerät etwas passiert. Diese Funktion ist nur über den Touchscreen und die Maus verfügbar.

- 1 Öffnen Sie das **Schnellmenü**.
- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**. 
- 3 Wählen Sie **Benutzereinrichtung**.
- 4 Wählen Sie **Import/Export**, um einen Assistenten zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Gewählte Einstellungen und Daten exportieren** aus.
- 6 Wählen Sie **Weiter** aus.
- 7 Wählen Sie **Standardmäßiger Export** (ein standardmäßiger Export erfasst alle Seitensets, Einstellungen, Klängaufnahmen, Kontakte, Wörterbücher und Grammatikeinstellungen des Benutzers).
- 8 Wählen Sie **Weiter** aus.
- 9 Benennen Sie das Archiv – wir empfehlen, den Namen des Benutzers und das Datum zu verwenden.
- 10 Wählen Sie den Speicherort der Sicherungsdatei – wir empfehlen hierfür einen externen USB-Speicher.

Startanleitung

Eine detailliertere Anleitung und Informationen zu Communicator 5 finden Sie im Dokument „Erste Schritte“.





Über Ihr kostenloses Konto bei myTobiiDynavox.com haben Sie Zugriff auf zahlreiche weitere Funktionen, z. B. Cloud-Speicher für Sicherungsdateien, Synchronisierung von Seitensets, Übungspläne und vieles mehr!

myTobiiDynavox.com



Mit myTobiiDynavox haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sichere Backups für Ihr System
- Informationen zu verfügbaren Updates erhalten
- Seitensets mit anderen teilen



Kontaktieren Sie für weitere Fragen Ihren Hilfsmittelberater:
bit.ly/TDDiscover

Community:
<https://www.facebook.com/groups/128363433866458/>

#PowerToBeYou

